

# Algivon Plus®

Reinforced alginate dressing  
impregnated with 100% Manuka honey

Instructions for use

Advancis  
M e d i c a l

**Algivon Plus®**  
Verstärkte Alginat-Wundauflage, getränkt mit 100% Manukahonig

DE

**Produktbeschreibung**  
Algivon Plus® verfügt über verstärkte Alginatfasern, die eine anhaltende, langsame Freisetzung von Honig unter Beibehaltung der Integrität der Wundauflage ermöglichen. Algivon Plus® ist die ideale Wahl für nassere Wunden, da das Alginat eine gewisse Absorptionskapazität hat, sodass der Honig nicht durch Exsudat ausgewaschen wird. Die Wundauflage ist sehr weich und anstimmigsam, ideal zur Vermeidung von Gewebedemarkierung und sorgt für einen sauberen Wundrand bei großflächigen nekrotischen und verschorften Geweben.



**Anwendungsgebiete**  
Algivon Plus® kann auf alle Wunden aufgetragen werden, aber vor allem: Druckschwüre, Beinschwüre, diabetische Geschwüre, Operationswunden, Verbrennungen, Hautverfärbungen und infizierte Wunden.

**Gegenanzeigen**  
Obwohl der Honig nicht in den Blutkreislauf absorbiert wird, empfehlen wir die Überwachung der Blutzuckerwerte bei Patienten mit Diabetes. Nicht bei Allergie gegen Bienengift verwenden. Manchmal wird von Schmerzen beim Anbringen von Honig berichtet. Je nach Sensitivität der Wunde kann eine angebrachte Dosis Schmerzmittel erwogen werden. Das anfängliche Unbehagen lässt in der Regel nach. Sollte der Schmerz nicht nachlassen, Produkt entfernen und Wunde mit Kochsalzlösung spülen.

**Gebrauchsanleitung**  
Algivon Plus® wird, egal mit welcher Seite nach unten, auf die Wunde aufgelegt. Wundauflagen können nebeneinander platziert werden, um große Wundflächen abzudecken. Es kann mit einer scharfen Schere zugeschnitten werden. Eine geeignete sekundäre Wundauflage zur Aufnahme von Exsudat anfügen.

**Wie oft sollte man wechseln?**  
Abhängig von der Exsudatmenge, eventuell umliegender Gewebeflüssigkeit, Ödemen und der Verbandsart könnte ein täglicher Wechsel nötig sein. Die Auflage kann aber bis zu 7 Tage verbleiben. Verdünnt Wundexsudat den Honig, so verringert sich die Wirksamkeit. Deshalb Verband wechseln, sobald sich die Farbe merklich ändert.

**Entsorgung**  
Als klinischer Abfall zu entsorgen

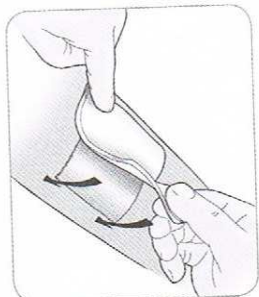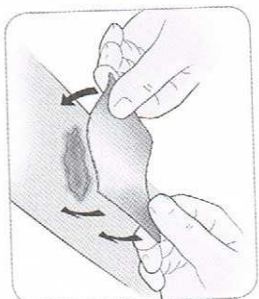

STERILE R



CE 0086



Do not use if packaging is damaged