

Description long

Leukomed® skin sensitive – saugfähiger Wundverband

Leukomed skin sensitive ist ein steriler Wundverband mit Wundauflage für leicht bis mäßig sezernierende Wunden, wie Schnitt- oder Schürfwunden. Besonders geeignet für fragile oder bereits geschädigte Haut. Dank der sanften Skin Sensitive Technologie, ermöglicht der hautfreundliche Silikonaufrag einen sicheren Halt und gleichzeitig eine sanfte Entfernung.

Produkteigenschaften von Leukomed skin sensitive auf einen Blick

- Hautfreundlicher Silikonaufrag: entwickelt für die Bedürfnisse fragiler Haut
- Atraumatische und schmerzarme Entfernung
- Sanft zu fragiler oder bereits geschädigter Haut, wie die Haut von älteren Patienten, Säuglingen oder Patienten, die bestimmte Medikamente erhalten, die die Hautstruktur verändern oder bei Patienten, bei denen ein häufiger Verbandwechsel erforderlich ist
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, vermindert so das Risiko von Mazerationen
- Absorbierend, kann Wundsekret von leicht bis mäßig sezernierende Wunden aufnehmen
- Steril und damit geeignet zum Abdecken von Wunden nach Operationen
- Maße: 8 cm x 15 cm, Inhalt: 20 Stk.

Applikation

Leukomed skin sensitive ist ein saugfähiger, steriler Wundverband für fragile Haut

1. Entfernen Sie die erste Trägerfolie von dem Wundverband
2. Applizieren Sie die Fläche mit dem Silikonaufrag auf der Haut, sodass die Wundauflage auf der Wunde platziert ist
3. Ziehen Sie vorsichtig die zweite Trägerfolie ab
4. Streichen Sie den Wundverband leicht glatt