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


OP-Mundschutz pink mit Gummibändern 10 Stück

PZN 11549806 | Art. 7039

OP-Mundschutz
mit latexfreiem Elastikband - 10 Stück, pink

- 3-lagiger Mundschutz mit glasfaserfreiem Filtermedium
- integrierter Nasenbügel
- mit latexfreiem Elastikband
- EN 14683 Typ II R



Anwendungshinweise

1. Halten Sie die Maske an den Ohrschlaufen.
Der Nasenbügel zeigt nach oben und die farbige Seite des Mundschutzes vom Gesicht weg.
Platzieren Sie die Ohrschlaufen hinter den Ohren.
2. Biegen Sie den Drahtbügel so, dass er sich optimal an Ihre Gesichtsform anpasst, um das Austreten von Luft in diesem Bereich zu verhindern.
3. Ziehen Sie die Maske über Ihr Kinn, um Mund und Nase zu bedecken.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe
Pink, 10 Stück

Produktinformationen
Abmessungen: 20,00 x 10,00 x 2,00 cm
Artikelgewicht: 0,057 kg
Gewicht mit Verpackung 0,06 kg
Inhalt/Menge: 10 St
UVP: 9,99 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20