


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean® DS

Desinfektionstücher

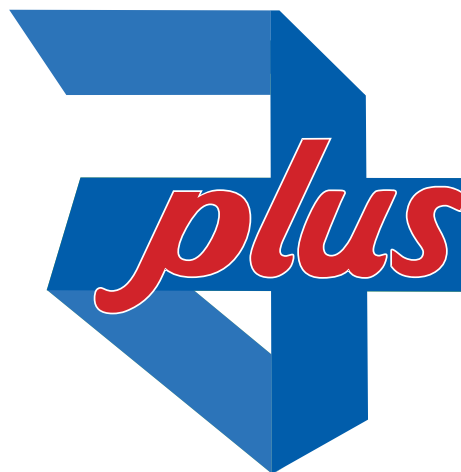

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Nachfüllpack mit abziehbarem Etikett zum Aufkleben auf die Feuchttuchspenderdose
- 120 Tücher (13,5 cm x 20,0 cm)
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung (nur für Duft Neutral)

Anwendung: Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Ausführungen: MyClean® – DS Desinfektionstücher

Artikelbeschreibung	Duft	Pack.-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	Neutral	120 Stück	79623	4046153116331	10305887	12
Desinfektionstücher	Lemon	120 Stück	79624	4046153116355	10305893	12
Desinfektionstücher	Pfirsich	120 Stück	79625	4046153116379	10305901	12
Desinfektionstücher	Apfel	120 Stück	79626	4046153116393	10305918	12

Einwirkzeiten der Tränklösung MyClean® – DS gemäß 4-Felder-Test:

Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und levurozid	konz. – 1 Min.
TBC (M. terrae)	konz. – 1 Min.
BVDV/(HIV)-Inaktivierung	konz. – 30 Sek.
Vaccinia-Viren	konz. – 30 Sek.
Rota-Viren	konz. – 30 Sek.
Noro-Viren (MNV)	konz. – 5 Min.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Symbole:



Gefahr



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MyClean-DS-Desinfektionstücher-20161010