

# DracoFoam

haft

## Schaumstoffwundauflage mit Hafrand

**DracoFoam haft** ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage, die der Abdeckung der Wunde und Absorption des Exsudats dient. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, so dass diese dort abdampfen kann. **DracoFoam haft** schafft ein idealefeuchtes Wundklima und ist somit für eine Vielzahl von chronischen und sekundär heilenden Wunden geeignet. Der Polyurethanschäum ist besonders flexibel, wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die Polyurethanfolie verhindert das Entweichen des Sekrets und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. Die transparente Polyurethan-Membran ist selbstklebend durch Verwendung eines hautfreundlichen und sicher haftenden Acrylatklebers.

### Anwendungsgebiete:

**DracoFoam haft** ist geeignet für Wunden mit hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche chronische Wunden wie Ulcus Cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder Diabetisches Fußsyndrom sowie akute Wunden wie Schürf- und Schnittwunden, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam haft** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoFoam haft** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, die Schutzfolien vom Verband entfernen und die Wundauflage mit der weißen Schaumstoffseite auf die Wunde legen. Anschließend die Kleberänder sanft auf die Haut andrücken. Dabei ist zu beachten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht.

Acrylatkleber haftet nur einmal, eine Repositionierung des Verbandes ist somit nicht möglich. Aufgrund der selbsthaftenden Eigenschaft von **DracoFoam haft** wird keine weitere Fixierung benötigt. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam haft** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

**DracoFoam haft** darf nur einmal verwendet werden. **DracoFoam haft** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist. **DracoFoam haft** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.



Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundbehandlung.

#### Gegenanzeigen:

**DracoFoam haft** soll nicht verwendet werden bei:

- chirurgischen Implantaten
- Verbrennungen 3. Grades
- nicht intakter Wundumgebungshaut

**DracoFoam haft** nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen wie z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid anwenden.

**DracoFoam haft** soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan oder Acrylatkleber angewendet werden.

Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

#### Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm	PZN: 10003146
7,5 cm x 7,5 cm	PZN: 06733293
10 cm x 10 cm	PZN: 10003123
12,5 cm x 12,5 cm	PZN: 06681550

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.



Rev.: 181017RW-13929-GA