



## Milch- und Ei- Allergie Test



### Allergie gegen Kuhmilch und Hühnereier

Allergien gegen Kuhmilch und Hühnereier gehören zu den häufigsten Lebensmittelallergien. Die Symptome reichen von Brennen im Mundraum über Atemwegsbeschwerden und Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Hautreizungen.

Mit dem cerascreen® Milch- und Ei-Allergie Test bestimmen Sie die Anzahl spezifischer IgE-Antikörper für Kuhmilch und Hühnerei in Ihrem Blut. So erfahren Sie, ob Sie auf Kuhmilch oder Hühnerei sensibilisiert und damit möglicherweise allergisch sind.

- + Sensibilisierung gegen Kuhmilch und Hühnereier
- + zuhause Blutprobe nehmen – einfach + bequem
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + Empfehlungen, um allergische Beschwerden zu reduzieren
- + Ergebnis innerhalb von wenigen Tagen nach Probeneingang

### Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



**Testen**, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



**Wissen**, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



**Handeln**, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.

## Milch- und Ei- Allergie Test



### Wie funktioniert der Test?

#### 1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

#### 2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

#### 3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

## Milch- und Ei- Allergie Test

**Der Milch- und Ei- Allergie Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:**

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Milch- und Ei- Allergie Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht durchführen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Milch- und Ei- Allergie Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Milch- und Ei- Allergie Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Milch- und Ei- Allergie Test:  
<https://www.cerascreen.de/products/milch-und-ei-allergie-test>



PZN 14002646

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands  
kostenlos zurückgesendet werden.

