




STI Test XL

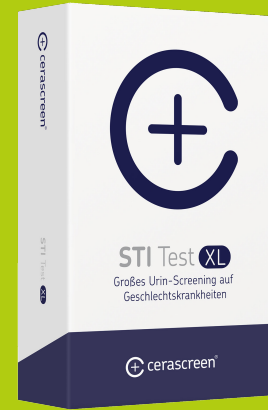

Auf sexuell übertragbare Geschlechtskrankheiten testen

Geschlechtskrankheiten äußern sich nicht immer sofort durch Symptome, können aber unter anderem Juckreiz, Ausschlag und Entzündungen im Genitalbereich, Schmerzen beim Wasserlassen und ungewöhnlichen Ausfluss verursachen.

Das Tückische an den Geschlechtskrankheiten: Es kommt vor, dass Betroffene die Infektion nicht bemerken, während sie trotzdem andere anstecken können. In anderen Fällen sind sie lange symptomlos und können später schwere Symptome verursachen.

Der cerascreen® STI XL Test untersucht Ihre Urinprobe auf Erreger von verschiedenen Geschlechtskrankheiten. Die Probe kann ganz einfach zuhause entnommen werden und wird nach Einsenden, in einem medizinischen Fachlabor analysiert. Bei der Analyse werden für Frauen 10 Erreger untersucht und für Männer 9 Erreger.

Hinweis: Der STI XL Test ersetzt keine ärztliche Beratung. Stellen Sie bei sich einen Verdacht auf eine STI fest, sollten Sie sich in ärztliche Behandlung begeben.

- + Analyse von Erregern u. a. von Tripper, Chlamydien und Trichomoniasis
- + zuhause Urinprobe nehmen – einfach + diskret
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + Empfehlungen für ein geringeres Infektionsrisiko
- + Ergebnis innerhalb von 5-7 Werktagen nach Probeneingang

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer Urinprobe brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.


STI Test XL

Der STI Test XL ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den STI Test XL nicht durchführen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den STI Test XL nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der STI Test XL eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu geeignet, schwere akute Erkrankungen zu untersuchen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum STI Test XL:

<https://www.cerascreen.de/products/geschlechtskrankheiten-test>

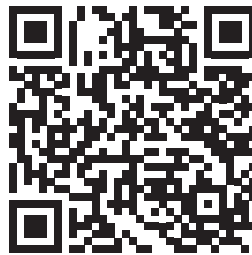

PZN 17516268

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

