

# DracoPor

steril

waterproof

## Steriler Verband zur Wundversorgung

**DracoPor Waterproof** ist für die sterile Versorgung und zum Schutz vor Wasserkontakt bei akuten oberflächlichen Wunden gedacht. **DracoPor Waterproof** kann von medizinischem Fachpersonal und Laien im klinischen oder häuslichen Umfeld verwendet werden.

### Indikationen:

- zur Versorgung akuter oberflächlicher Wunden mit leichtem bis mittlerem Exsudataufkommen

### Anwendung entsprechend der nachfolgenden Empfehlung oder der ärztlichen Anweisung



1. Lösen Sie die erste Hälfte des Papiers auf der Rückseite des Wundverbandes.



2. Kleben Sie den Wundverband zur Hälfte auf die Wunde.



3. Ziehen Sie die zweite Hälfte des Papiers auf der Rückseite unter dem Verband heraus.



4. Greifen Sie die obere Folie an dem blauen Streifen und ziehen Sie diese vollständig vom Wundverband ab.

Wechseln Sie den Verband spätestens, wenn:

1. Flüssigkeit seitlich zur Wundaufgabe austritt.
2. Der Verband beschädigt ist.



## Weitere Hinweise:

Trotz des sanften Polyacrylatklebers kann eine Verwendung von **DracoPor Waterproof** bei Patienten mit besonders sensibler und/oder fragiler (Wundumgebungs-) Haut unter Umständen Hautirritationen und Verletzungen hervorrufen und nur bedingt für diese Personen geeignet sein. Patienten mit sensibler und/oder fragiler (Wundumgebungs-) Haut wird daher empfohlen, vor Anwendung des Produkts ihren Arzt oder Apotheker zu konsultieren.

Sollten während der Anwendung von **DracoPor Waterproof** Schmerzen oder Komplikationen wie allergische Reaktionen und/oder Hautreizungen (z. B. Juckreiz, Rötungen) auftreten, so ist der Verband abzunehmen und ein Arzt über die Umstände zu informieren. Zudem ist ein Arzt aufzusuchen, wenn die Wunde nicht innerhalb weniger Tage Heilungstendenzen zeigt.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

**DracoPor Waterproof** ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vor- kommen stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

**DracoPor Waterproof** kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

CE 0482 **STERILE R**   

Rev.: 210423RW-13190K-GA



Medizinprodukt



Das Produkt ist zum Duschen geeignet.

