

# Askina® Sorb

## Die formstabile Alginat-Wundauflage



Flexibel und einfach zu applizieren

Passt sich optimal den Konturen der Wunde an

Hohe Absorptionskapazität

In einem Stück zu entfernen

Hohe Formstabilität durch vernetzte Faserstruktur


Ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel

Askina® Sorb ist eine hoch flexible, primäre Wundauflage, bestehend aus 85% Calciumalginat und 15% Carboxymethylcellulose (CMC). Die verwebte Alginat-/CMC-Faserstruktur gewährleistet eine herausragende Absorptionsfähigkeit, ein gutes Retentionsvermögen und vermindert das Risiko der Mazeration der Wundränder. Askina® Sorb erlaubt ein atraumatisches, schmerzarmes Entfernen in einem Stück.

### Hohe Absorptionskapazität

Im Rahmen einer Vergleichsuntersuchung\* wurde die Absorptionsfähigkeit von Askina® Sorb mit der eines handelsüblichen auf Carboxymethylcellulose basierenden Wundverbands verglichen.

Das Ergebnis der Untersuchung demonstriert mit 28,08 g/100 cm<sup>2</sup> eine überlegene Absorptionsfähigkeit für Askina® Sorb, gegenüber einem Wert von 19,22 g/100 cm<sup>2</sup> für das Vergleichsprodukt.

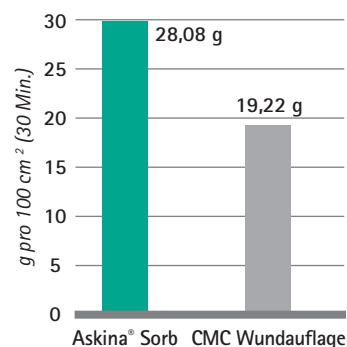


\* Standardtestmethode basierend auf dem Test für Absorptionsfähigkeit, beschrieben im Nachtrag von 1995 der britischen Pharmacopea aus 1993. Quelle: Surgical Testing Material Laboratory. Report #97/825/1, January 1997.

**TIPP**

Kombinationsmöglichkeit mit Prontosan® Wundspül-  
lösung und Prontosan® Wound Gel oder Askina® Gel  
(Hydrogele).

**TIPPS ZUR FIXIERUNG**

- › Abdeckung mit Askina® Pad oder bei stärkerer Exsuda-  
tion mit Askina® Transorbent® oder Askina® Foam
- › Flächige Fixierung mit Fixiervlies bzw. randseitige  
Fixierung mit Pflasterstreifen
- › Zirkuläre Fixierung mit Fixierbinde

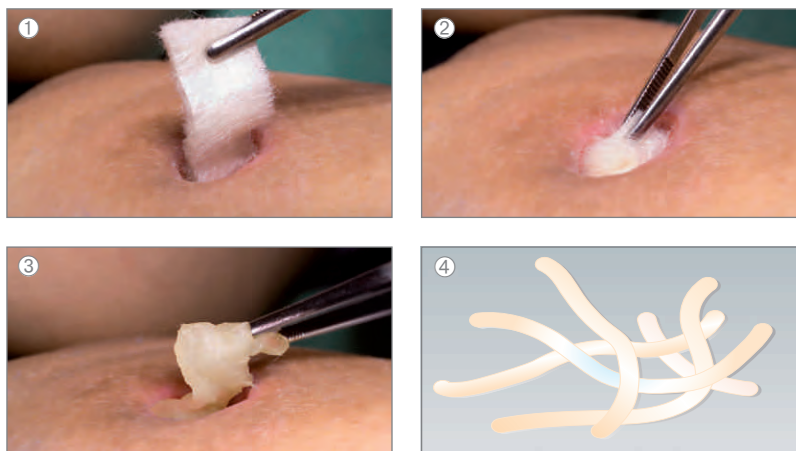**Einsatzgebiete**

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Spalthautentnahmestellen
- › Traumatische Wunden
- › Abschürfungen
- › Thermische Wunden, Verbrennungen Grad II
- › Chirurgische Wunden u.a. in der Proktologie,  
Gefäßchirurgie, Visceralchirurgie, Urologie

- ① Die Askina® Sorb Komresse oder Tamponade kann einfach in die Wunde appliziert werden. Durch die weiche Materialstruktur passt sich Askina® Sorb optimal den Wundgegebenheiten an, ohne dass ein Zuschneiden erforderlich wäre.
- ② Mit Askina® Sorb die Wunde locker auffüllen.
- ③ Durch die hervorragende Absorptionsfähigkeit und Stabilität lässt sich Askina® Sorb besonders gut in einem Stück entfernen.
- ④ Verwebte Alginat-/CMC-Faserstruktur



Askina® Sorb	Abmessung	VE	PZN	REF
Wundauflege	6 cm x 6 cm	3 Stück	2251605	2109S
	6 cm x 6 cm	10 Stück	2251611	2115S
	10 cm x 10 cm	3 Stück	2251640	2107S
	10 cm x 10 cm	10 Stück	2251657	2116S
	15 cm x 15 cm	3 Stück	2252088	2108S
	15 cm x 15 cm	10 Stück	2252102	2102S
Tamponade	2,7 cm x 34 cm	3 Stück	2258323	2106S