

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Produkts.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit Lac®-Ophtal® MP haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche befeuchtet und angenehm beruhigt. Somit können die subjektiven Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Dr. Winzer wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Zweckbestimmung:

Augenbefeuchtungsmittel. Zum Benetzen und Nachbenetzen von harten Kontaktlinsen.

Anwendung:

Lac®-Ophtal® MP verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage. Lac®-Ophtal® MP ist auch für die Nachbenetzung während des Tragens von harten Kontaktlinsen gut geeignet.

Inhaltsstoffe:

Jede 10 ml Flasche enthält 2 % Povidon, Natriumchlorid, Natriumhydroxid-Lösung, Borsäure, Wasser für Injektionszwecke und ist mit Cetrimid konserviert.

Wie oft sollten Sie Lac®-Ophtal® MP anwenden?


Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Tropfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® MP kann 3-5 mal täglich oder häufiger angewendet werden.

Für Kontaktlinsenträger: Zur Nachbenetzung 1-2 Tropfen Lac®-Ophtal® MP in das Auge eintropfen. Harte Kontaktlinsen können bei der Anwendung der Augentropfen im Auge bleiben, weiche Kontaktlinsen können 15 min später wieder eingesetzt werden.

Wie sollten Sie Lac®-Ophtal® MP anwenden?

Es wird empfohlen vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® MP die Hände zu waschen.

Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte der Abbildung. Drehen Sie die Schutzkappe von der Flasche ab. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über das Auge (ohne das Auge zu berühren). Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit dem Zeigefinger Ihrer freien Hand leicht nach unten. Drücken Sie die Flasche vorsichtig zusammen, um einen Tropfen in den Bindehautsack einzutropfen. Schließen Sie die Augen und bewegen Sie sie leicht, damit der Tropfen möglichst gut auf der Augenoberfläche verteilt wird. Wiederholen Sie den Vorgang wenn nötig für das andere Auge und verschließen Sie die Flasche sorgfältig.

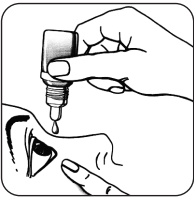

Gegenanzeigen:

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Lac®-Ophtal® MP:

- In selten Fällen kann das Produkt Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen wie z.B. allergische Reaktionen.
- Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (Irritationen, Intoleranz) Lac®-Ophtal® MP nicht weiter anwenden.
- Um Verunreinigungen der Lösung zu vermeiden, sollte die Tropferspitze nicht berührt werden.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt der Flasche mit dem Auge, um Verletzungen oder Schädigungen des Auges zu vermeiden.
- Bei Anwendung unterschiedlicher Präparate am Auge sollten diese in einem Abstand von ca. 15 min. getropft werden.
- Weiche Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® MP entfernt werden. Sie sollten frühestens nach 15 min wieder eingesetzt werden.
- Jede Flasche ist für die Anwendung durch eine Person bestimmt.
- Verwenden Sie Lac®-Ophtal® MP nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 6 Wochen nach Anbruch.
- Prüfen Sie vor der ersten Anwendung, ob die Flasche beschädigt ist. Verwenden Sie keine beschädigten Flaschen.

Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® MP gibt es in Packungen mit 10 ml und 3 x 10 ml Augentropfen.

Aufbewahrung:

Bewahren Sie Lac®-Ophtal® MP bei einer Temperatur zwischen +1 °C und +25 °C auf. Bewahren Sie das Behältnis im äußeren Karton auf.



Konformitätsbewertungsverfahren nach EU
Medizinprodukterichtlinie

CE Zeichen mit Nummer der Benannten Stelle




Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin

Vertrieb:
Dr. Robert Winzer Pharma GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin
E-Mail: winzer@bausch.com

STERILE A

Sterilisiert mit aseptischen Verfahren

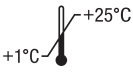

Temperaturbegrenzung



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nach Anbruch 6 Wochen (1,5 Monate) anwendbar.



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



Verwendbar bis

LOT

Fertigungslosnummer, Charge

Ausgabedatum:

Lac®-Ophtal® MP, IFU-02, 2020-06

Weitere Informationen zu Lac®-Ophtal® MP

Wie kann Lac®-Ophtal® MP Ihren Augen helfen?

Lac®-Ophtal® MP verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohltuender Feuchtigkeit versorgt.

Lac®-Ophtal® MP ist ein glasklarer Tropfen, der eine sofortige klare Sicht ohne Schlieren ermöglicht.

Und das können Sie persönlich tun:

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

Lac®-Ophtal® MP ist ein Warenzeichen von Bausch & Lomb oder einer seiner Tochtergesellschaften.

© 2020 Bausch & Lomb Incorporated oder einer seiner Tochtergesellschaften