



COMPRESSANA POWER SOCKS

- + Leistungsfähigkeit und Ausdauer
- + bessere Durchblutung und Sauerstoffversorgung
- + Aktivierung und Stabilisierung der Muskulatur
- + schnellere Regeneration

SPORT INVERNO


- + Wärme und Komfort
- + feuchtigkeitsabsorbierend und atmungsaktiv
- + wärmendes Tragegefühl

compression support
ca. 18 mmHg

Produkt	Größe	Farbe
SPORT INVERNO Sport-Kniestrümpfe mit Wolle/Seide-Mix	II-V 35-48	 silber/ neonblau schwarz/ neonrot



**MERINOWOLLE
& SEIDE**

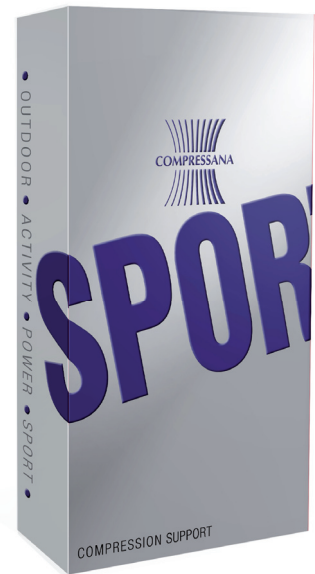

SPORT SUPPORT

- + Hält kühl und trocken
- + feuchtigkeitsableitend
- + schnelltrocknend
- + leichtes Tragegefühl



COOLMAX

compression support
ca. 18 mmHg

Produkt	Größe	Farbe
SPORT SUPPORT Sport-Kniestrümpfe mit Coolmax	II-V 35-48	 weiß schwarz

SPORT COMPETITION

- + Hygiene und Komfort
- + super-fein und samtweich
- + geruchshemmend!

compression support
ca. 21 mmHg

Produkt	Größe	Farbe
SPORT COMPETITION Sport-Kniestrümpfe mit Microfaser, Fußsohlenverstärkung mit atmungsaktiver Baumwolle und Waden-Komfortzone	I-V 36-46	 anthrazit nachtblau
ab Herbst/Winter 2017:		
sport competition Stulpen / Tubes Sportstulpen mit Microfaser	I-V 36-46	 schwarz
sport competition Socken / Socks Sportsocken mit Microfaser	I-V 36-46	 schwarz



MICROFASER



Anzieh- und Pflegehinweise

COMPRESSANA Sportstrümpfe ziehen Sie an wie normale Socken. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und darauf, dass die Zehen nicht eingeeengt sind. Stülpen Sie die Strümpfe nicht um, so vermeiden Sie Einschnürungen. Regelmäßiges Tragen wird empfohlen.

Auch nach vielen Wäschen behalten **COMPRESSANA SPORT** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

- **Vor dem Tragen waschen • auf links waschen**
- **keine Weichspüler verwenden**

Größentabelle COMPRESSANA sport support + inverno mit Schuhgröße

II	35-38	2 ^{1/2} -5	IV	43-45	9-10
III	39-42	6-8	V	46-48	11-12 ^{1/2}

Größentabelle COMPRESSANA sport competition

I	36-38	3 ^{1/2} -5	III	40-42	6 ^{1/2} -8	V	44-46	9 ^{1/2} -11
II	38-40	5-6 ^{1/2}	IV	42-44	8-9 ^{1/2}			

