

QUFORA IRRISE KL BALL VSET

QUFORA IrriSedo Klick Ballonkatheter Verbrauchssset

PZN: 15579626

Inhalt: 1 St

Hersteller: Qufora A/S

Zweckbestimmung

Anwendung Das Qufora® IrriSedo Klick wird verwendet, um bei chronischer Stuhlinkontinenz und/oder Verstopfung Abhilfe zu schaffen. Um die beste Wirkung zu erzielen, sollte die Irrigation regelmäßig - d. h. täglich oder zweitäglich - verwendet werden. Vor Beginn der Irrigation Verwenden Sie das Qufora® IrriSedo Klick ausschließlich nach Abklärung und Empfehlung durch Ihren Arzt und nach einer vollständigen Unterweisung durch eine qualifizierte Fachkraft. Vor der ersten Irrigation ist unbedingt eine digitale Untersuchung des Rektums erforderlich. Die erste Anwendung sollte von erfahrenem medizinischen Fachpersonal überwacht werden. Indikationen zur Anwendung der Irrigation Personen mit den folgenden Gesundheitszuständen und Symptomen können von der Irrigation profitieren: - Neurogene Darmfunktionsstörungen, z.B. bei Verletzungen des Rückenmarks, Spina bifida oder Multipler Sklerose - chronische Verstopfung - chronische Stuhlinkontinenz Innerhalb dieser Gruppen benötigen einige Personen möglicherweise Unterstützung durch Pflegepersonal, um die Irrigation durchzuführen. Die Irrigation darf nicht angewendet werden bei (absolute Kontraindikationen): - bekannter Analstenose oder kolorektal er Stenose. - kolorektalem Karzinom vor der chirurgischen Entfernung. - akuter entzündlicher Darmerkrankung. - akuter Divertikulitis. - innerhalb von 3 Monaten nach einem analen oder kolorektalen Eingriff. - innerhalb von 4 Wochen nach einer endoskopischen Polypektomie. - Ischämischer Kolitis. Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deshalb sollte eine Verordnung durch den Arzt/ das medizinische Fachpersonal stets unter Berücksichtigung der individuellen Umstände des Patienten erfolgen. Die Irrigation darf nur nach besonders sorgfältiger Erörterung und Absprache mit einem Fachmediziner angewendet werden bei (relative Kontraindikationen): - Schwangerschaft oder geplanter Schwangerschaft sowie während der Stillzeit. - Kindern unter 3 Jahren, in Anbetracht der Größe und Form des Katheters. Die Anwendung der Irrigation sollte bei Kindern nur nach Zustimmung eines qualifizierten Fachspezialisten für Pädiatrie erfolgen. - entzündlichen Darmerkrankungen wie z.B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. - aktiver perianaler Sepsis (Fistel oder Abszess). - innerhalb von 6 Monaten nach einem Eingriff im Rektum oder Kolon. - Durchfall unbekannter Genese. - Fäkale Impaktbildung / rektaler Obstipation. - schwerer autonomer Dysreflexie. - schwerer Divertikulose oder Divertikulitis. - Radiologischer Bestrahlungstherapie des Bauch- oder Beckenbereichs. - Bekannter Divertikelerkrankung. - Langzeitbehandlung mit Steroiden. - Behandlung mit Antikoagulantia. - niedrigem Natriumspiegel im Blut. - Tumoren im Beckenbereich. - innerhalb von 3 Monaten nach einer Darmbiopsie. - Behandlung anderer Erkrankungen mittels rektal verabreichter Medikamente, die durch die Irrigation verdünnt werden können. - kongestiver Herzinsuffizienz. Warnhinweise Eine Perforation der Darmwand ist äußerst selten. Es handelt sich jedoch um eine

schwerwiegende und potenziell tödliche Komplikation bei rektaler Irrigation. Sollte eine Perforation eintreten, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls während oder nach einer Irrigation folgende Beschwerden auftreten: - anhaltende oder schwere Blutungen aus dem Enddarm. - anhaltende oder schwere Bauch- oder Rückenschmerzen mit oder ohne Fieber. Bitte beachten Sie Die Irrigation ist oft mit leichten, vorübergehenden Empfindungen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Schüttelfrost, Müdigkeit, Schwitzen, Kopfschmerzen oder leichten Blutungen in Enddarmbereich verbunden. Wenn Sie den Empfehlungen zu Wassermenge und -temperaturen Folge leisten, ist es unwahrscheinlich, dass die Darm-Elektrolyt-Balance beeinflusst wird. Empfohlene Anwendungsdauer (bei routinemäßiger Anwendung jeden oder jeden zweiten Tag) Der Wasserbehälter und der Klick-Schlauch können bis zu 15 Mal verwendet werden. Die Handpumpe und der Regler können bis zu 90 Mal verwendet werden. Sollten innerhalb der empfohlenen Nutzungszeit Verfärbungen irgendwelcher Systemteile auftreten, muss das entsprechende Bauteil ausgewechselt werden. Die Ballonkatheter sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn die Einwegkomponenten des Produkts wiederverwendet werden, besteht ein Risiko unerwünschter Wirkungen, die die Funktion des Produkts und die Gesundheit von Patienten, Pflegepersonal und Dritten beeinträchtigen können. Haftung MBH-International A/S übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder andere Verluste, die entstehen können, wenn dieses Produkt in irgendeiner Weise im Widerspruch zu den Empfehlungen von MBH-International A/S verwendet wird.

Zusammensetzung

Basisset REGULAR: 15 rektale Ballonkatheter, 1 Wasserbehälter, 1 Klick Schlauch