

## **SUPRASORB G GELKOMP 5X6.5**

### **SUPRASORB G Gelkompressen 5x6,5 cm**

PZN: 11267835

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Die SUPRASORB® G Gel-Kompressen sorgen an der Oberfläche der Wunde für ein feuchtes Wundmilieu. Das Gel ist für Wasserdampf und Gase durchlässig. Indikationen: Die SUPRASORB® G Gel-Kompressen können als Wundkontaktschicht angewendet werden und haben eine kühlende und lindernde Wirkung und sorgen für Aufnahme und Retention von Exsudat. Hauptsächlich zur Anwendung bei Verbrennungen, Verbrühungen, Schäden durch Strahlentherapie, epidermalen Schäden und Beingeschwüren. Zur Behandlung von nozizeptiven Wundschmerzen zur Unterstützung des autolytischen Debridements durch Hydratation von nekrotischem und schmierigem Gewebe. Sie ist für die Anwendung auf schmerzenden Wunden geeignet. Gegebenenfalls ist auch eine Anwendung zusammen mit Sekundärverbänden möglich. Die SUPRASORB® G Gel-Kompressen können unter Kompressionsverbänden auf mäßig bis stark exsudierenden Wunden angewendet werden. Die SUPRASORB® G Gel-Kompressen sind angezeigt bei oberflächlichen Verbrennungen und Verbrennungen der mittleren Hautschicht d.h. bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Kontraindikationen: Die SUPRASORB® G Gel-Kompressen dürfen nicht angewendet werden: bei stark blutenden Wunden, bei Verbrennungen dritten Grades zur Abdeckung von tiefen, schmalen Wundhöhlen oder Fistelgängen bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile der Gel-Kompressen.

#### **Zusammensetzung**

Die Suprasorb® G-Gel-Kompressen bestehen aus: Trägerfolie: Polyethylen transparent. Hydrogel-Schicht: Polyethylenmatrix, blau, Wasser, Acrylpolymer auf Basis eines Tauratderivats, Phenoxyethanol. Abdeckfolie: Polyethylen weiß.