



# PRODUKTINFORMATION

Ref. 09/2019

## Ultrana CWC2000 Flächendesinfektionsmittel und Geruchsvernichter für Toilettenstühle, Toilettenschüsseln, Urinflaschen und Urinbeutel

Der keimtötende Geruchsneutralisierer CWC2000 ist Geruchsvernichter und Desinfektionsmittel in einem. CWC2000 reduziert und vernichtet nahezu alle unangenehmen Gerüche und sorgt mit seiner desinfizierenden Wirkung dafür, dass sich keine neuen Gerüche bilden.

Mit CWC2000 desinfizieren Sie zuverlässig Krankenbetten, Rollstühle, Türklinken und andere abwaschbare Oberflächen. Das Produkt ist dermatologisch getestet und sehr gut hautverträglich. CWC2000 ist als Sprühdeseinfektion vielseitig einsetzbar. Entfernen Sie mit diesem Desinfektionsmittel Gerüche, Bakterien und Keime von Oberflächen in medizinischen und öffentlichen Einrichtungen, Arztpraxen und Privathaushalten.



- ✓ Entfernt unangenehme Gerüche
- ✓ Wirkt keimtötend und selbstreinigend
- ✓ Formaldehydfrei, nicht ätzend und biologisch abbaubar
- ✓ Dermatologisch „sehr gut“ getestet, hautverträglich
- ✓ Wirkt nach 5 Min. gegen Bakterien, Keime und Pilze (inkl. MRSA)
- ✓ Wirkt nach 15 Min. gegen Hefepilze

### Inhaltstoffe:

Unter 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Limonene.  
Wirkstoff: 4,75 g Alkyl(C12-16)benzylidimethylammoniumchlorid je 100 g Flüssigkeit.

BauA: Reg.-Nr. N46697

[Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!](#)

### Verkaufseinheiten:

- Karton mit 28 Spezialflaschen à 100 ml
- Karton mit 24 Flaschen à 150 ml
- Karton mit 16 Flaschen à 500 ml
- Karton mit 12 Sprühflaschen à 500 ml
- Kanister 5000 ml

PZN 1381 4738 (100 ml) · PZN 3956 851 (500 ml)

PZN 1246 9050 (150 ml) · PZN 1001 0962 (500 ml Sprühkopf)

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

### Flächendesinfektion Wischverfahren:

Zunächst müssen die zu desinfizierenden Flächen frei von grobem Schmutz sein. CWC2000 wird mit einem trockenen, sauberen Einwegtuch gleichmäßig auftragen. Alle Flächen müssen vollständig benetzt sein (ca. 6 ml CWC2000 / m<sup>2</sup> Fläche). 5 bzw. 15 Min. einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen. Zum Abschluss die Oberfläche mit einem neuen, sauberen und trockenen Einwegtuch trocknen.

### Sprühdeseinfektion:

Zunächst müssen die zu desinfizierenden Flächen frei von grobem Schmutz sein. Die zu desinfizierende Fläche einsprühen bis alle Flächen vollständig benetzt sind (ca. 6 ml CWC2000 / m<sup>2</sup> Fläche), 5 bzw. 15 Min. einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen. Zum Abschluss die Oberfläche mit einem neuen, sauberen und trockenen Einwegtuch trocknen.

CWC2000 wirkt bei einer Einwirkzeit von 5 Min. bei niedriger und hoher Belastung bakterizid (inkl. MRSA) sowie fungizid bei einer Einwirkzeit von 15 Min. levurozid gem. DIN EN 13697.

### Anwendung im Toilettenstuhl:

Je nach Bedarf bis zu 2 Liter Wasser im Toilettenstuhl 7 ml (ca. 2 Spritzer) CWC2000 zugeben und für ca. 48 Stunden unangenehme Gerüche neutralisieren.





# PRODUKTINFORMATION

Rel. 09/2019

## Anwendung in der Urinflasche:

7 ml (ca. 2 Spritzer) in die leere Urinflasche geben und für die Dauer des Einsatzes unangenehme Gerüche neutralisieren.

## Anwendung im Urinbeutel

Zu Befüllung des Urinbeutels mit CWC 2000 benutzen Sie unsere 100 ml Spezialflasche mit Spritzauslauf. Die Befüllung erfolgt grundsätzlich von unten durch den Auslauf. Stellen sie sicher, dass die Topfkammer gut verschlossen ist. Dazu den Auslauf öffnen und ca. 7 ml CWC2000 in die Öffnung spritzen. Den Auslauf wieder verschließen. Der Urinbeutel ist nun bereit zur Verwendung. Zur Leerung Ausgussventil am unteren Ende des Urinbeutels öffnen und gesamten Inhalt im WC entleeren. Zur Wiederverwendung des gebrauchten Urinbeutels CWC2000 einfach wieder von unten durch die Öffnung, die auch zum Entleeren verwendet wird, CWC2000 wie oben dosieren und Beutel wieder verschließen. Der Urinbeutel ist nun bereit für die nächste Anwendung. Herstellerangabe für Mehrfachverwendung von Urinbeuteln beachten. Zubehör und Beutel vor der Mehrfachverwendung auf Materialermüdung prüfen.



Ultrana CWC 2000 ist nur für Urinbeutel mit Tropfkammer geeignet, welche ein Zurückfließen in den Schlauch verhindert.

## Anwendungshinweise zur Flächendesinfektion:

Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernt werden. Tragen Sie bei der Verwendung/Anwendung Schutzhandschuhe und Augenschutz. Das Produkt unverdünnt auf das saubere, trockene Einwegtuch auftragen, gleichmäßig dünn auftragen und einwirken lassen. Achten Sie auf eine vollständige Benetzung und halten Sie die Oberfläche während der gesamten Kontaktzeit feucht.

Die optimale Menge beträgt 6 ml/m<sup>2</sup>. Um eine mögliche Kreuzkontamination auszuschließen, darf die Flaschenöffnung sowie der Schraubverschluss nicht mit der zu desinfizierenden Oberfläche oder mit dem verwendeten Einwegtuch in Berührung kommen.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Schraubverschluss, wenn Sie ihn absetzen müssen, mit dem offenen Teil nach oben platziert wird. Nicht mit anderen Produkten mischen, nicht anders als angegeben mischen oder verdünnen. Verwenden Sie stets unbenutzte Einwegtücher, wenn Sie desinfizieren, ein Neues, um das Spülwasser zu entfernen und ein letztes, um die Oberfläche zu trocknen. Nicht auf heißen Flächen anwenden (>40 °C).

## Anwendungshinweise zur Sprühdeseinfektion:

Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Sprühkopf verwendet werden. Verwenden Sie keinen Sprühkopf von anderen Produkten. Der Sprühkopf muss zusammen mit der Produktflasche weggeworfen werden - nicht wiederverwenden. Zubehör, das nicht wasserbeständig ist, vorher entfernen. Bei Rollstühlen z.B. ist das Sitzkissen zu entfernen. Beim Sprühen darauf achten, dass die Sprühpistole stets vom Körper weg, nach unten gehalten wird. Dämpfe nicht einatmen, nicht in die Augen sprühen, Räume ausreichend lüften. Sprühkopf nicht mit kontaminierter Fläche berühren, um eine Kontamination des Produktsprühkopfes zu vermeiden. Nicht mit anderen Produkten mischen, nicht anders als angegeben verwenden. Verwenden Sie stets unbenutzte Einwegtücher, wenn Sie desinfizieren, ein Neues, um das Produkt mit Wasser zu entfernen und ein letztes, um die Oberfläche zu trocknen. Nicht auf heißen Flächen anwenden (>40° C).

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



# PRODUKTINFORMATION

Rel. 09/2019

## **Anwendungseinschränkung:**

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bei körperlicher und/oder geistiger Einschränkung nur durch Pflegepersonal einsetzen. Dieses Produkt sollte nur von Personen verwendet werden, die die Anweisungen ohne körperliche oder geistige Anstrengung lesen und befolgen können. CWC 2000 wurde speziell entwickelt, um Toilettenstühle, Bettschüsseln, Urinflaschen und Urinbeutel zu desinfizieren, kann aber für alle wasserbeständigen Oberflächen verwendet werden. Nicht geeignet für die Enddesinfektion von halbkritischen und kritischen Medizinprodukten! Nicht geeignet zum Desinfizieren von elektrischen Geräten! Die falsche Dosierung/Anwendung des Produkts kann zu einer mangelhaften Desinfektion führen. Die Wartezeit muss unbedingt eingehalten werden, um die gewünschte Desfunktion zu erhalten. Nach der Desinfektion müssen die Flächen mit Wasser gut gereinigt werden, um zu verhindern, dass Produktreste mit der Haut in Berührung kommen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in direktem Kontakt mit der Haut und vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit verletzter Haut. Nach Hautkontakt oder Augenkontakt sofort mit Wasser abwaschen und Arzt oder Augenarzt konsultieren. Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Das Produkt darf nicht mit anderen Desinfektionsmitteln gemischt oder anders als angegeben verdünnt oder angewendet werden. Keine Anwendung als Raumspray zum Einsprühen der Raumluft. Anwendung nur direkt auf die Geruchsfelder.

## **Haltbarkeit, Transport und Lagerung, Entsorgung:**

Die Haltbarkeit des Produkts ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Flächendesinfektionsmittel verwenden. Als Geruchsvernichter kann CWC 2000 auch nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums so lange eingesetzt werden wie der Anwender mit der Reduktion unangenehmer Gerüche zufrieden ist.

Flasche vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 10-35°C. Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf, stehend lagern und (wenn zutreffend) mit dem Sprühkopf in OFF-Stellung. Wir empfehlen, das Produkt weit weg von Produkten mit ähnlichen Verpackungen und Etiketten zu lagern; oder Produkte, die irgendwie mit CWC 2000 reagieren oder es verunreinigen können. Produkte in beschädigten Verpackungen nicht mehr zur Desinfektion verwenden, sondern als Geruchsvernichter aufbrauchen. Halten Sie dieses Produkt von Kindern und Menschen mit geistigen Einschränkungen fern. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Restentleerte Gebinde können über den Restmüll bzw. Gelben Sack entsorgt werden. Gebrauchte Einwegtücher können über den Restmüll entsorgt werden.

Toilettenstuhl-, Bettschüssel-, Urinflasche- und Urinbeutelinhalt stets über die Toilette entleeren und entsorgen.

## **Gefahrenhinweise:**

Gefahr. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. G

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.