


## SANOHRA *silicon* – formbare Silikon-Ohrstöpsel

Das hautfreundliche medizinische Silikon ist besonders weich und lässt sich optimal verformen. In die Ohrmuschel eingelegt, passt es sich sanft an und deckt den Gehörgang schützend ab, ohne störendes Druckgefühl.

SANOHRA *silicon* schützt vor unangenehmen Geräuschen und sorgt für einen angenehmen Schlaf oder konzentriertes Arbeiten. SANOHRA *silicon* verhindert das Eindringen von Wasser in den Gehörgang und schützt das empfindliche Ohr vor Zugluft.

### Gebrauchsanleitung

1. Kneten Sie das Siliconkissen mit **sauberen Händen** kräftig durch und formen Sie eine runde Kugel. Keine längliche Form.
2. Einzelne Kissen nicht teilen!
3. Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres während des Einsetzens leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet.
4. Platzieren Sie die Kugel in der Ohrmuschel über der Öffnung des Gehörganges.
5. Die Kugel leicht andrücken, so dass der Gehörgang gut abgedichtet wird und passgenau und sicher sitzt.
6. Die Ohrmuschel wieder loslassen.
7. Nach Gebrauch vorsichtig entfernen, ohne ruckartige Bewegungen.

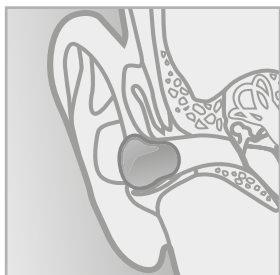

**Nicht zum Tauchen verwenden!** Der Wasserdruck in größerer Tiefe würde die Siliconkugel weiter in den Gehörgang drücken (Nicht mehr als 1 Meter Wassertiefe). Beim Springen ins Wasser oder durch heftige Bewegungen kann der Ohrenschutz verloren gehen!

**Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzen.** Bei Entzündungen des Ohres, Verletzungen des Trommelfells oder dem Einsatz eines Paukenröhrchen fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.

### Lagerung und Pflege

Die Ohrstöpsel sind wiederverwendbar, wenn sie sauber und in gutem Zustand bleiben. Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Ohrstöpsel mit neutraler Seife und warmem Wasser. Bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Ohrstöpsel in der Kunststoffbox an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Ohrstöpsel weiterhin verwendbar sind. Ersetzen Sie Ohrstöpsel, die Beschädigungen oder starke Verschmutzungen aufweisen.

### Warnhinweise

Beim Einsetzen, Positionieren und Tragen der Ohrstöpsel bitte Anleitung des Herstellers beachten. Diese Ohrstöpsel können in lauten Umgebungen ständig getragen werden. Verwenden Sie die Ohrstöpsel niemals zum Tauchen. Pressen Sie die Ohrstöpsel nicht zu tief in den Gehörgang. Entfernen Sie Ohrstöpsel langsam aus dem Ohr. Ohrstöpsel vor Hitze und direktem Sonnenlicht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie eine Erkrankung des Ohres (Infektionen oder perforiertes Trommelfell) haben oder hatten, fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie die Ohrstöpsel einsetzen dürfen. Das Produkt kann durch bestimmte chemische Stoffe angegriffen werden. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise kann der Lärmschutz durch diese Ohrstöpsel eingeschränkt sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller.

### Ohrstöpsel aus formbarem Silikon

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	23.4	22.1	21.1	26.1	33.4	38.4	33.9
Standardabweichung (dB)	6.7	5.2	5.9	5.3	4.3	4.6	8.9
Angenommene Schutzwirkung (dB)	16.7	16.9	15.2	20.8	29.1	33.8	25.0

SNR = 24 dB

H = 27 dB

M = 20 dB

L = 18 dB

UNE EN 352-2 (I.N.S.H.T.- 0159 -ES41007)

Model bio-PA-02

### Hersteller:

bioTAP S.L.  
c/Sant Galderic 13,  
08395, Sant Pol de Mar  
(Barcelona) - España

### Vertrieb:

Innosan GmbH  
D- 68723 Schwetzingen  
info@sanohra.com  
www.sanohra.com

