



Hinweise zur Anwendung:

Halten Sie das Instrument locker zwischen Ihren Fingern.

Drücken Sie den Knopf der Zange und die Greifarme öffnen sich. Setzen Sie nun die Zange an der Zecke an, so nahe wie möglich an der Hautoberfläche.

Lösen Sie nun den Druck auf den Knopf, so dass die Greifarme die Zecke umschließen. Ziehen Sie die Zecke langsam, unter leichtem Rütteln gerade heraus. (Einige Fachleute raten weiterhin, die Zecke herauszudrehen. Wir empfehlen so vorzugehen, wie der Anwender persönlich am Besten damit zurecht kommt. Hauptsache, die Zecke wird so schnell wie möglich fachgerecht entfernt.)

Nachdem die Zecke erfolgreich entfernt wurde, die Stichstelle mit dem Desinfektionstuch gründlich desinfizieren und dann mit einem Pflaster überkleben.

Nun können Sie die Zecken mit 1 Tropfen Wasser in den Zeckenbehälter geben. Der Behälter mit der Zecke kann in einem Labor auf Erreger untersucht werden. Adressen solcher Labore finden Sie im Internet, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Alternativ kann die Zecke auch vernichtet werden (verbrennen) um weiteren Schaden zu vermeiden.

Suchen Sie danach zur Sicherheit Ihren Arzt auf!

1. Hilfe Zecken-Set

8 teilig



Zur Zecken-Entfernung einfach · schnell · sicher

Inhalt:
 1 Zeckenzange
 3 Pflaster
 2 Desinfektionstücher
 2 Zeckenbehälter

Nähere Angaben: Siehe Anleitung

- ✦ die Zeckenzange greift sicher zwischen „Kopf“ und Körper der Zecke
- ✦ handlich klein, passt in jede Tasche
- ✦ 2-3 Umdrehungen - die Zecke lässt los
- ✦ oder: leicht rüttelnd, gerade herausziehen




Pharma Brutscher
 Naturprodukte
 Bruck 13
 78355 Hohenfels
 Telefon: 07557-9202-0
 Telefax: 07557-9202-10
 Internet: www.pharmabrutscher.de
 email: info@pharmabrutscher.de




PZN - 14221578


Anwendung:

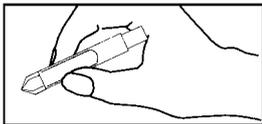

1. Halten Sie die Zeckenzange zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Druckknopf ruht in Ihrem Handballen.

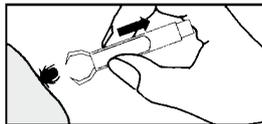


2. Betätigen Sie den Druckknopf der Zeckenzange und die präzisen Greifarme öffnen sich.

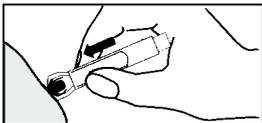

3. Setzen Sie die Zeckenzange zwischen Körper und „Kopf“ der Zecke an und lassen Sie nun den Druckknopf los.



4. Drehen Sie nun langsam 2-3 mal **bislang bewährte Methode**

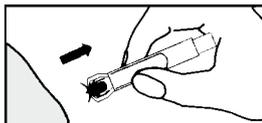


... oder ziehen Sie die Zecke vorsichtig, evtl. leicht rüttelnd, heraus.



5. Sie haben die Zecke nun völlig unversehrt in den Greifarmen.

neue Methode

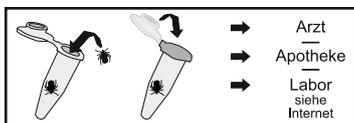

6. Bringen Sie die Zecke im mitgelieferten Behältnis zur Untersuchung* zum Arzt oder Apotheker. Im Internet finden Sie weitere Adressen entsprechender Labore. Andernfalls vernichten Sie die Zecke (z.B. verbrennen). Desinfizieren Sie die Stichstelle. Suchen Sie nach einem Zeckenstich vorsichtshalber einen Arzt auf.
 * Die Testkosten sind vom Labor abhängig.

Sicherheitshinweise



Nicht in Kinderhände!



Nicht im Bereich der Augen anwenden!



Bedienungsanweisung lesen!



Entsorgung über den Hausmüll

Info: Neuere Forschungen zeigen, dass das Herausziehen von Zecken besser ist, als sie herauszudrehen. Diese Spezial-Zeckenzange kann zum Drehen und zum Ziehen eingesetzt werden. Die Greifarme sind extra fein und können sowohl für große, als auch für kleinere Zecken benutzt werden. Zur Entfernung von sehr kleinen Zecken, so genannte Nymphen, benutzen Sie bitte unsere Zeckenpinzette!

1. Hilfe Zecken-Set

8 teilig

3x
Pflaster

2x
Desinfektionstuch

2x
Zeckenbehälter

1x
Zeckenzange

... und nicht vergessen: Nach jedem Aufenthalt in "Mutter Natur" - auf Zeckenbefall kontrollieren !