

## **ALLEVYN ADH 7.5X7.5 HAF**

### **ALLEVYN Adhesive 7,5x7,5 cm haftende Wundauflage**

PZN: 16222122

Inhalt: 10 St

Hersteller: Smith & Nephew GmbH - Woundmanagement

#### **Zweckbestimmung**

Indikationen Behandlung sekundär heilender Wunden bei oberflächlichen, granulierenden Wunden. Chronische und akute exsudative Wunden, tiefe und flache Wunden, wie zum Beispiel Druckgeschwüre, Ulcera cruris, infizierte Wunden, diabetische Fußulzeration, maligne Wunden, Operationswunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, exulzierende Geschwüre. Kann bei nekrotischen oder verschorften Wunden in Verbindung mit INTRASITE Gel verwendet werden. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Adhesive nicht mit Oxidationsmitteln wie etwa Hypochloritlösungen (z.B. Eusol) oder Wasserstoffperoxid verwenden, da diese den absorbierenden Polyurethanbestandteil des Verbandes zersetzen können. Wie bei allen haftenden Produkten wurden Fälle von Reizung und/oder Mazeration der Haut um die Wunde berichtet. Gelegentlich wurden Fälle einer Empfindlichkeit gegen den Verband berichtet. Es ist zu beachten, dass unsachgemäßer Gebrauch oder zu häufige Verbandwechsel, insbesondere bei Patienten mit brüchiger Haut, zu Hautabriss führen können. Bei Rötung oder Sensibilisierung Gebrauch einstellen. ALLEVYN Adhesive ist ein Produkt zur einmaligen Verwendung. Bei Verwendung an mehr als einem Patienten kann es zu Kreuzkontamination oder Infektion kommen. Das Öffnen der Verbandsverpackung beeinträchtigt die Sterilität, so dass unbenutztes Verbandmaterial nicht zur späteren Verwendung aufbewahrt werden sollte. Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

#### **Zusammensetzung**

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum Beschreibung ALLEVYN Adhesive besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der zwischen eine perforierte, haftende Wundkontaktschicht und eine wasserdichte Außenfolie eingebettet ist.