



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bezeichnung     | <b>Elefant, groß – welliebellies</b>  |
| Artikelnummer   | 11153468  |
| Beschreibung    | Wärmekuscheltier, die ideale Alternative zur Wärmflasche. Herausnehmbare, nachbestellbare Füllung. Außenhülle waschbar (30°C Schonwaschgang). Füllung erfolgt in sozialen Werkstätten in Deutschland. Geeignet für Mikrowelle und Backofen! Medizinprodukt. |
| Füllung         | Bio-Hirse mit Duftmischung aus Lavendel, Rosmarin, Eukalyptus und Pfefferminz   |
| Material        | Plüsch, 100% Polyester  |
| Sicherheitsnorm | EN 71-1/2/3/9, Spielzeugrichtlinie EU   |
| EAN             | 4260418740059   |
| Zolltarif-Nr.   | 95030041  |
| Verpackung      | 1 Stück   |
| Gewicht, Größe  | Ca. 465 Gramm, ca. 31 cm  |
| Hersteller      | Marvida GmbH & Co KG  |
| Ursprungsland   | Made in Germany   |
| Anwendung       |   |

**welliebellies**  
www.welliebellies.de

**WARNUNG:**

- Erhitzen Sie nur die Füllung und nicht die äußere Hülle
- Nicht Überhitzen
- Kann Verbrennungen verursachen, länger andauernden direkten Kontakt mit der Haut vermeiden
- Vorsicht beim Herausnehmen aus der Mikrowelle oder dem Backofen, Produkt kann heiß sein
- Inhalt nicht zum Verzehr geeignet
- In regelmäßigen Abständen kontrollieren und entsorgen falls das Produkt beschädigt ist
- Nur gemäß den Anweisungen des Herstellers reinigen
- In der Schwangerschaft vor Gebrauch bitte einen Arzt aufsuchen
- Die Erwärmung dieses Wärmekissens darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden
- Vor dem Wieder-Erhitzen auf Raumtemperatur abkühlen lassen

Bitte folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten:

1. Nehmen Sie die Füllung aus der äußeren Hülle und erwärmen Sie diese in der Mikrowelle oder im Backofen nach den folgenden Anweisungen (nicht die äußere Hülle erwärmen).
2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drehteller der Mikrowelle frei drehen kann, sauber und fettfrei ist und entfernen Sie auch sonst alles, was zum Anbrennen führen könnte. Oder vergewissern Sie sich, dass der Backofen sauber und die Grillfunktion ausgeschaltet ist.
3. Legen Sie die Füllung auf eine nichtmetallische Platte und legen Sie sie in die Mikrowelle oder legen Sie die Füllung in den Backofen auf Backpapier. Stellen Sie sicher, dass die Füllung im Inneren gleichmäßig verteilt ist (dies hilft, bei der Erwärmung auftretende Hitzeester zu vermeiden).
4. Vor dem Gebrauch 30 Sekunden abkühlen lassen.
5. Dann die Füllung wieder in die äußere Hülle stecken – wobei der Klettverschluss vor dem Gebrauch sicher befestigt werden muss.

| ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE       |                 | ERWÄRMUNG IM BACKOFEN             |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Watt                              | Maximale Zeiten | Grad                              | Maximale Zeiten |
| 500 - 750 Watt                    | 1 Minute        | 100 °C (Backofen vorheizen)       | 10 Minuten      |
| 800 - 1.000 Watt                  | 30 Sekunden     |                                   |                 |
| NUR VON ZIMMERTEMPORATUR ERWÄRMEN |                 | NUR VON ZIMMERTEMPORATUR ERWÄRMEN |                 |

~~☒~~ ~~☒~~ ~~☒~~ ~~☒~~ ~~☒~~ Nur mit feuchtem Schwamm oder trockener Bürste reinigen, nicht in Wasser eintauchen. 100% Baumwolle. Dieses Produkt ist biologisch abbaubar und kann im normalen Hausmüll entsorgt werden. In einer sauberen und trockenen Umgebung aufbewahren.

Marvida GmbH & Co. KG – Hammstr. 1 – 67227 Frankenthal – Deutschland



Unser Markenversprechen an Sie:



Zertifizierte Bio-Hirse mit  
Gesundheitskräutern und  
Wohlfühlduft



Erfüllen Sicherheitsnormen  
für Kinder der EU  
(Spielzeugrichtlinie  
EN 71-1/2/3/9)



Wir legen Wert auf Fair-  
ness & Nachhaltigkeit



Mit herausnehmbaren  
Füllungen & waschbaren  
Außenhüllen



Kuschelige Materialien,  
liebevolle Designs



Teilweise zertifiziert  
als ausgewiesene  
Medizinprodukte



In sozialen Werkstätten in  
der Pfalz gefüllt



Sowohl zum Wärmen als  
auch zum Kühlen geeignet

Marvida GmbH & Co. KG – Hammstr. 1 – 67227 Frankenthal – Deutschland