

# Traumasive® plus

Sterile Hydrokolloidwundauflage

# Traumasive® Sacrum

Hydrokolloidverband für Wunden im Sakralbereich

## Produktbeschreibung

Traumasive plus/Sacrum sind selbsthaftende, sterile Hydrokolloidwundverbände. Sie bestehen aus Partikeln der Carboxymethylcellulose, die in ein Netz aus Elastomeren eingebettet sind und auf einen Film aus einer semipermeablen Schutzfolie aus Polyurethan aufgebracht sind.

## Eigenschaften

In Kontakt mit dem Wundexsudat bildet Traumasive plus/Sacrum ein feuchtes, ausfüllendes Gel, welches günstige Bedingungen für den Wundheilungsprozess schafft. Aufgrund seiner guten Haftung in der Wundumgebung können die Verbände ohne Verminderung des Tragekomforts im Durchschnitt 3 bis 4 Tage auf der Wunde verbleiben.

Auf Grund seiner Flexibilität eignet er sich besonders für Wunden an schwierigen Lokalisationen. Traumasive plus/Sacrum sind transparent und ermöglichen die Beobachtung der Wunde.

## Indikationen

Traumasive plus ist für die lokale Behandlung von Unterschenkel- oder Druckgeschwüren geeignet. Traumasive Sacrum ist für die lokale Behandlung von Druckgeschwüren insbesondere im Sakralbereich geeignet.

## Anwendung

### Vorbereitung der Wunde

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen.
- Die Wundränder sorgfältig mit einer sterilen Kompresse trocknen.

### Anlegen der Wundauflage

- Die Schutzfolien vom Wundverband abziehen.
- Den Wundverband ohne Spannung auf die Wunde aufbringen, dabei sollte die Klebefläche nicht mit den Fingern berührt werden.

Den Wundverband über der Wunde vorsichtig glatt streichen und an den Wundrändern etwas fester andrücken.

Für Traumasive Sacrum den Wundverband zentral auf der Gesäßfalte aufbringen, mit der Spitze nach unten gerichtet.

### Verbandwechsel

- Die Häufigkeit des Verbandwechsels wird durch den behandelnden Arzt bestimmt und richtet sich nach dem Entwicklungsstadium des Geschwürs. Mit dem Ablösen des gesamten Haftandes beginnen und dann den kompletten Wundverband ablösen.

- Auf einer sauberen, komplett von nekrotisch-eitrigem Gewebe gereinigten Wunde kann Traumasive plus/Sacrum 3 bis 4 Tage ohne Wechsel verbleiben.
- Beim Ablösen des Wundverbandes können auf dem Grund des Druckgeschwürs Gelrückstände zurückbleiben, die sich durch einfaches Abwaschen entfernen lassen.
- Der Verbandwechsel von Traumasive plus/Sacrum sollte häufiger erfolgen, wenn die Wunde sich noch im Endstadium der Reinigung befindet oder noch einige Reste von schwer entfernbaren, fibrinösen Geweberückständen zurückbleiben.
- Bei einer stark nässenden Wunde muss der Verband gewechselt werden, sobald Gelmasse unter dem Rand des Wundverbandes austritt.

## Kontraindikationen

Infizierte Wunden.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Bei Unterschenkelgeschwüren venösen Ursprungs ersetzt Traumasive plus nicht die eventuell zusätzlich verordnete Kompressionstherapie (mit Strümpfen und Binden).
- Bei der Anwendung von Traumasive plus/Sacrum auf Druckgeschwüren müssen die üblichen Maßnahmen, gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll (wie z. B. Druckentlastung), beibehalten werden.
- Ist die sterile Einzelverpackung beschädigt, ist die Sterilität nicht mehr gewährleistet und der betroffene Wundverband darf nicht mehr verwendet werden.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionen hervorrufen.
- Liegend lagern.

## Hersteller gemäß Medizinprodukterecht



Laboratoires URGO  
42 rue de Longvic  
21300 CHENÔVE  
France

Made in France

### Vertrieb in Deutschland

Hexal AG  
Industriestraße 25  
83607 Holzkirchen  
Telefon: (08024) 908-0  
Telefax: (08024) 908-1290  
E-Mail: service@hexal.com



Datum der Zuteilung der CE-Kennzeichnung  
2001

### Stand der Information

Mai 2014

Traumasive plus gibt es in Packungen mit je 5 einzeln steril verpackten Verbänden mit den Abmessungen 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm und 20 cm x 20 cm und je 10 einzeln steril verpackten Verbänden mit den Abmessungen 10 cm x 10 cm.

Traumasive Sacrum gibt es in Packungen mit je 5 einzeln steril verpackten Verbänden mit den Abmessungen 14 cm x 16 cm.

**STERILE R**

**CE 0459**



50041278