



COMPRESSANA THERMO


ca. 12 mmHg

Stützklasse ||

medium

Kniestrümpfe mit weicher Wolle

Thermo-Kniestrümpfe kombinieren angenehmen Stützeffekt mit wohliger Wärme. Die hochwertige und anschiemig weiche Merinowolle ist besonders angenehm auf der Haut und kratzfrei zu tragen. Hochelastisches 3D-Lycra sorgt für eine optimale Passform und einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Ideal auch für sensible Haut und kälteempfindliche Füße und Beine.

Produkt	Größe	Farbe
 THERMO Kniestrümpfe mit Wolle	I-V 36-46	caramel nachtblau schwarz

Größentabelle THERMO	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Schuhgröße ca.	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11



- wärmender Stützeffekt gegen kalte Füße
- weich und angenehm auf der Haut
- extrem hoher Wollanteil

COMPRESSANA X-STATIC


ca. 18mmHg

Stützklasse |||


forte

Kniestrümpfe mit Coolmax / X-Static Silberfaser


- antimikrobiell – Bakterien-, pilz- und geruchshemmende Faser
- juckreizlindernd
- feuchtigkeitsableitend
- temperaturregulierend
- antistatisch

Produkt	Größe	Farbe
 X-STATIC Kniestrümpfe mit Silberfasern & Coolmax	I-V 36-46	silbergrau schwarz

Größentabelle X-STATIC	XS / I	S / II	M / III	L / IV	XL / V
Schuhgröße ca.	36-38 3½-5	38-40 5-6½	40-42 6½-8	42-44 8-9½	44-46 9½-11

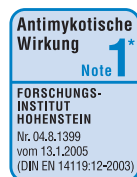

* Notenspiegel 0 - 5. Note 0: kein Wachstum. Note 1: ohne Vergrößerungsgerät kein Wachstum sichtbar, aber deutlich sichtbar unter dem Mikroskop. Zum Vergleich unbehandelte Baumwolle Note 5: massives Wachstum, das die gesamte Prüfoberfläche bedeckt.

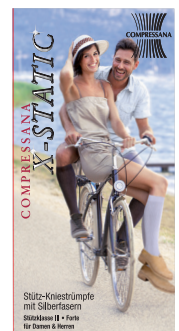

Anzieh- und Pflegehinweise

COMPRESSANA Funktionsstützstrümpfe ziehen Sie an wie normale Socken. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Stülpen Sie die Strümpfe nicht um, so vermeiden Sie Einschnürungen. Regelmäßiges Tragen wird empfohlen.

Auch nach vielen Wäschen behalten **COMPRESSANA FUNKTIONSSÜTZSTRÜMPFE** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

Vor dem Tragen waschen • auf links waschen • keine Weichspüler verwenden

