

Gebrauchsanweisung

BLUpa[®] lipid plus OSD

BESCHREIBUNG

BLUpa[®] lipid plus OSD Augentropfen sind speziell für die intensive symptomatische Behandlung sehr trockener und chronisch trockener, gereizter Augen geeignet. Sie pflegen, befeuchten die Augenoberfläche und lindern die Symptome des trockenen Auges (Sicca-Syndrom, wie z. B. gereizte, gerötete, juckende, tränende und/oder sehr empfindliche Augen bzw. Augenoberfläche) durch die Bildung eines viskoelastischen und klaren Schutzfilms auf der empfindlichen Hornhaut, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen. Dies wird erreicht durch die hohe Wasserbindungsfähigkeit des enthaltenen Natriumhyaluronats, dem Natriumsalz der Hyaluronsäure, das auch von Natur aus u.a. im Glaskörper des Auges vorkommt. Darüber hinaus enthalten **BLUpa[®] lipid plus OSD** Augentropfen das Provitamin B5 (Dexpanthenol), das aufgrund der hohen Wasserbindungskapazität die Fähigkeit hat, das Auge zu befeuchten und zusätzlich zu pflegen. Dadurch werden die feuchthaltenden Eigenschaften des Natriumhyaluronats sinnvoll unterstützt.

Zusätzlich beinhalten **BLUpa[®] lipid plus OSD** Augentropfen Vitamin A, Vitamin E, Phospholipide, Carbomer und Glycerin. Die Antioxidantien Vitamin A und Vitamin E verhindern die Bildung freier Radikale und fungieren so als Schutzkomplex für die Zellen der Augenoberfläche. Phospholipide, gewonnen aus natürlichem Sojaöl, unterstützen die Regeneration der natürlichen Lipidschicht der Tränenflüssigkeit. Carbomer und Glycerin führen zu einer höheren Viskosität der Augentropfen und sorgen damit für eine längere Verweildauer der Tropfen auf der Augenoberfläche.

Diese besondere Zusammensetzung der Augentropfen mit den oben genannten Inhaltsstoffen schützt und befeuchtet somit die Augenoberfläche und mildert dadurch die Symptome trockener und chronisch trockener Augen spürbar und langanhaltend.

BLUpa[®] lipid plus OSD Augentropfen helfen effektiv bei Beschwerden in Zusammenhang mit:


- einer mechanischen Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung beispielsweise durch Zigarettenrauch
- strapazierten Augen, z. B. durch Arbeit am Computer, mit Mikroskopen sowie bei/nach langen Autofahrten
- einem Fremdkörpergefühl im Auge
- der Einnahme bestimmter Arzneimittel
- einer nachlassenden Tränenproduktion mit zunehmendem Alter
- Allergenen wie Pollen, Tierhaare, Staub etc.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind **BLUpa[®] lipid plus OSD** Augentropfen auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich. **BLUpa[®] lipid plus OSD** Augentropfen sind auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Die Kontaktlinsen müssen bei der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden.

ANWENDUNG

Zum Öffnen des Fläschchens entfernen Sie den Originalitätsverschluss durch Ziehen an der vorgefertigten Lasche, bis dieser komplett entfernt ist (1). Danach heben Sie die Kappe durch Ziehen nach oben ab (2). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab. Halten Sie das Fläschchen mit der Tropföffnung senkrecht nach unten und geben Sie durch gleichmäßig kräftigen, länger anhaltenden Druck 3-5mal täglich 1-2 Tropfen in den Bindehautsack des Auges (3 + 4). Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Das spezielle sterile Luftfiltersystem des Fläschchens bedingt allerdings auch, dass nach jeder Entnahme einige Sekunden Wartezeit ohne Druck auf das Fläschchen verstreichen müssen, damit wieder genügend Luft einströmen kann. Ohne diese Wartezeit ist die weitere Entnahme nur erschwert möglich. Vermeiden

Art.-Nr. 22.0822.01

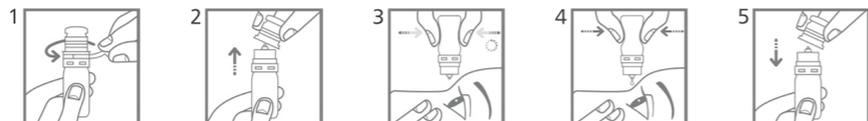

Sie jegliche Berührung der Tropföffnung mit dem Auge oder den Händen. Ein sich eventuell an der Tropföffnung noch befindlicher Tropfen sollte durch leichtes Klopfen auf den Fläschchenboden entfernt werden. Setzen Sie nun die Kappe durch leichten Druck wieder auf das Fläschchen (5). Mit zunehmender Entleerung des Fläschchens erfordert die Tropfentnahme, physikalisch bedingt, etwas mehr Druckaufwand. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat, Dexpanthenol, Phospholipide, Sojaöl, Vitamin E, Vitamin A, Ölsäure, Glycerin, Carbomer, Citronensäure, Wasser für Injektionszwecke.

PACKUNGSGRÖSSEN

Verkaufseinheiten: Mehrfach-Dosis-Behältnis (Fläschchen): 1 x 10 ml

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigtem Fläschchen oder beschädigtem Originalverschluss oder bei beschädigter Folienverpackung.
- Das Auge mit der Tropföffnung des Fläschchens nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- In sehr seltenen Fällen kann die Anwendung der Augentropfen bei sehr empfindlichen Augen bzw. Augenlidern zu Reizungen führen. Folgende Befindlichkeitsstörungen am Auge können eventuell auftreten: Rötung, Schmerzen, Brennen, Stechen, Juckreiz, Schwellung, Fremdkörpergefühl.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/ Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **BLUpa[®] lipid plus OSD** Augentropfen sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett sowie der Faltschachtel eingepreßt.
- Nach dem ersten Öffnen der Folienverpackung die Augentropfen nicht länger als 3 Monate anwenden.
- Aufgrund des speziellen innovativen Sterilfilter-Systems des Tropfeinsatzes bleibt stets eine geringe Menge in der Flasche zurück. Zur Sicherstellung einer

uneingeschränkter Tropffähigkeit wird eine regelmäßige Entnahme empfohlen.

- Bitte bewahren Sie das Produkt unzugänglich für Kinder auf.
- Sollte bei Ihnen eine schwerwiegende unerwünschte Reaktion während der Anwendung oder in Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinproduktes auftreten, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

LAGERUNG

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Fläschchen in der Folienverpackung vor Licht geschützt in der Originalfaltschachtel aufbewahren.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

- Chargenbezeichnung
- Verwendbar bis
- Herstellungsdatum
- Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
- Einfaches Sterilbarriere-System
- Einfaches Sterilbarriere-System mit äußerer Schutzverpackung
- Gebrauchsanweisung beachten
- Temperaturgrenzwerte und Lagerungstemperatur
- Vor Sonnenlicht schützen. Fläschchen vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.
- Nach dem erstmaligen Öffnen der Folienverpackung die Augentropfen nicht länger als 3 Monate anwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung (Fläschchen/Originalitätsverschluss/Folienverpackung) beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten.
- Medizinprodukt
- Eindeutige Produkt-Identifizierung
- Hersteller
- Vertriebspartner
- CE-Kennzeichnung=Symbol der Freiverkehrsfähigkeit in der EU mit Angabe der eingebundenen Benannten Stelle

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3, 92551 Stulln
Deutschland

Pharma Stulln GmbH
Werksstraße 3, 92551 Stulln
Deutschland

CE 0483

STAND DER INFORMATION: 03/2024