

## Otovent® System für die Behandlung von negativem Mittelohrdruck

### Inhalt:

- 1 Nasenstück (Polypropylen).
- 5 (Originalpackung) oder 15 (Großpackung) geprüfte Latex-Membranen.
- 1 zweiteiliger Einsatz für unbenutzte und benutzte Latex-Membranen.

### Anwendungsgebiet:

Bei allen Beschwerden mit negativem Druck im Mittelohr, z.B. chronischer Tuben-Mittelohr-Katarrh (Sero-Mukotympanon).

### Gegenanzeigen:

Während der Zeit eines eitrigen Ausflusses blockieren die Nasenpassagen; von da ab sollte die Autoinflation unterbrochen werden.  
Bei akuter Otitis media.

### Nebenwirkungen:

Es sind keine bekannt.

### Art der Anwendung:

OTOVENT® soll 2-3 mal täglich angewendet werden. Um einen Druckausgleich im Mittelohr zu erreichen, soll jede elastische Latex-Membrane nicht mehr als 9-mal oder 3-4 Tage verwendet werden.

Das Nasenstück kann mit Seifenlösung gereinigt und mit Wasser ausgespült werden.  
OTOVENT® ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahre geeignet.

### Hinweise:

Um die besten Ergebnisse für eine erfolgreiche Behandlung mit OTOVENT® zu erzielen, soll der Arzt die erste Anwendung an den Eltern demonstrieren.

Die Behandlung bei Kindern muß immer von einem Erwachsenen überwacht werden. Nur Original-OTOVENT® Latex-Membranen sollen mit dem Nasenstück verwendet werden, um eine optimale Behandlung zu sichern.

Selten klagen die Patienten während der Inflation über Schmerzen im Ohr. Der Anfangsschmerz vermindert sich während konsequenten Gebrauchs. Das ist das Zeichen einer erfolgreichen Behandlung.

OTOVENT® soll an einem trockenen, sonnenlicht-geschützten Ort aufbewahrt werden.  
Alle Materialien sind recyclingfähig (Hausmüll).

### OTOVENT® soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

### Eigenschaften:

Das OTOVENT® System ist eine Weiterentwicklung von dem Valsalva- und Politzer- Verfahren.

Es wurde entwickelt, um Kinder wirksam behandeln zu können. Sogar die Kinder sind motiviert, weil dieses System fast spielerisch eingesetzt werden kann.

Die klinischen Veröffentlichungen zeigen, daß bei mehr als der Hälfte der Kinder mit chronischem Tuben-Mittelohr-Katarrh der Druck verbessert und Komplikationen vermieden werden.

(2007.6.6)

## Wichtige Informationen für den Patienten:

### Warum sollte ich OTOVENT® benutzen?

Ihr Arzt hat Ihnen OTOVENT® empfohlen. Der Grund hierfür ist, dass Ihr Arzt in Ihrem Mittelohr einen Unterdruck festgestellt hat. Bei Nichtbehandlung kann es zu einem zeitweiligen Gefühl von Schwere und zur Beeinträchtigung des Hörvermögens führen. Nach wenigen Wochen kann sich Flüssigkeit im Mittelohr ansammeln. OTOVENT® gleicht den Druck aus und erleichtert die Beschwerden. Die im Paket vorhandenen Nasenmembranen werden aus natürlichem Latex hergestellt und geprüft. Sie haben genau das für eine erfolgreiche Behandlung notwendige Druckverhalten beim Aufblasen.

### Wie benutze ich OTOVENT®?

1. Verbinden Sie das Nasenstück mit der Latex-Membrane.
2. Drücken Sie das runde Teil des Nasenstücks mit Ihrer rechten Hand gegen Ihr rechtes Nasenloch. Drücken Sie Ihr linkes Nasenloch mit Ihrem linken Zeigefinger zu. Jetzt atmen Sie tief ein und halten den Mund geschlossen. Blasen Sie die Membrane bis zu eine Größe einer Grapefruit auf (Durchmesser ca. 10 - 12 cm).
3. Ein Klick oder eine Veränderung sollte jetzt im Ohrdruck spürbar sein.
4. Wiederholen Sie denselben Vorgang mit dem linken Nasenloch.
5. Sollte keine Veränderung im Ohr zu spüren sein, wiederholen Sie den Vorgang indem Sie den Kopf nach vorne bewegen und das Kinn nach rechts drehen.
6. Wenn die Membrane aufgeblasen ist, versuchen Sie zu schlucken während Sie das Nasenstück gegen das rechte Nasenloch pressen.
7. Wiederholen Sie denselben Vorgang mit dem linken Nasenloch.

### Wie oft und wie lange sollte ich OTOVENT® benutzen?

OTOVENT® sollte mindestens 2 x täglich angewendet werden (morgens und abends), besser 3 x täglich (morgens, mittags, abends). Die normale Behandlungsdauer beträgt 2 - 3 Wochen. Danach sollte der Arzt über eine Weiterbehandlung entscheiden.

Die OTOVENT® Originalpackung reicht für eine 2 - 3 wöchige Behandlung und die Großpackung für sechs bis acht Wochen. Jede Latex-Membrane sollte nur 3 - 4 Tage benutzt werden, da die Elastizität nach 9-maligem Gebrauch nicht mehr gewährleistet ist.

### Wer kann OTOVENT® benutzen?

Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren. Kinder selbstverständlich unter Anleitung Erwachsener.

### Wann sollte OTOVENT® nicht benutzt werden?

Während der Zeit eines eitriges Ausflusses blockieren die Nasenpassagen; Nasenbluten.

### Anmerkungen

Wichtig: Die Behandlung bei Kindern sollte immer von einem Erwachsenen überwacht werden. Bewahren Sie die im Gebrauch befindliche Latex-Membrane im rechten Teil der Packung auf. Reinigen Sie das Nasenstück nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel, wie z.B. Seifenlösung. Spülen Sie danach mit klarem Wasser. Werfen Sie gebrauchte Latex-Membranen weg. Alle Teile sind recyclingfähig (Hausmüll).

### Warnung!

Dieses Produkt enthält Latex, was in ganz seltenen Fällen zu einer Kontaktallergie führen kann. Sollten Sie allergisch zu Latex oder Latex-Produkten sein, fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie dieses Produkt benutzen. Sollten Sie allergische Symptome bemerken, setzen Sie dieses Produkt ab und konsultieren Sie einen Arzt.

### OTOVENT® SOLL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHRT WERDEN!

Optima Pharmazeutische GmbH  
Schäfflerstr. 7  
85368 Moosburg

