

Cutimed® Hydro

Gezieltes Wundmanagement – reguliert das feuchte Wundklima.

Produkt

Cutimed® Hydro ist ein Sortiment steriler, latexfreier, selbstklebender Hydrokolloidverbände, die ein feuchtes Wundmilieu schaffen, erhalten und so die Heilung fördern. Hydrokolloide absorbieren das Exsudat und bilden dabei ein stabiles Gel, das sich der Wunde anpasst. Durch die vertikale Absorption des Exsudates werden die Wundränder trocken gehalten und Mazerationsrisiken gesenkt. Die Gefahr von Verunreinigungen durch Flüssigkeiten oder Bakterien werden durch die optimale Versiegelung der Wunde mit dem Verband minimiert. Cutimed® Hydro ist wasserfest, hat einen optimalen Halt und lässt sich in einem Stück entfernen.

Cutimed® Hydro L besteht aus einer Wundkontaktschicht aus Hydrokolloiden mit einer Oberseite aus einem semipermeablen Polyurethanfilm.

Cutimed® Hydro B besteht aus einer Wundkontaktschicht aus Hydrokolloiden, die auf der Außenseite mit einem folienbeschichteten Polyurethanschaum abgedeckt ist.



Anwendung

Cutimed® Hydro L eignet sich für trockene bis schwach exsudierende Wunden, wie z.B.:

- Lazerationen
 - leichte Abschürfungen
 - Verbrennungen 1. und 2. Grades
 - Riss- oder Schnittwunden
 - als postoperativer Schutz von verschlossenen chirurgischen Wunden
- Cutimed® Hydro B ist für schwach bis mäßig exsudierende Wunden geeignet, wie z.B.:
- Ulcus cruris venosum und arteriosum
 - Diabetisches Ulkus
 - Dekubitus
 - postoperative Wunden
 - Spalthautentnahmestellen

Beide Hydrokolloidverbände eignen sich auch als semi-okklusive Sekundärverbände.

Anwendungsdauer: in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge)

Lieferformen

| Best.-Nr. | Abmessung | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN |
|--|-------------------|--------|---------------|----------|
| Cutimed® Hydro L – Dünner Hydrokolloidverband | | | | |
| 7263600 | 25,0 cm x 5,0 cm | 12 | 1/5 | 02784129 |
| 7263601 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 | 1/20 | 02784158 |
| 7263602 | 10,0 cm x 10,0 cm | 10 | 1/20 | 02786571 |
| 7263603 | 15,0 cm x 15,0 cm | 5 | 1/16 | 02793192 |
| Cutimed® Hydro B – Hydrokolloidverband mit Hafttrand | | | | |
| 7263500 | 7,5 cm x 7,5 cm | 5 | 1/20 | 01021398 |
| 7263501 | 10,0 cm x 10,0 cm | 5 | 1/20 | 01021406 |
| 7263502 | 15,0 cm x 15,0 cm | 5 | 1/16 | 01021412 |
| 7263503 | 18,0 cm x 15,0 cm | 3 | 1/16 | 02762576 |

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur




Cuticell®

Die verklebungsarme Wundauflage mit Salbenimprägnierung auf Eucerit®-Basis.

Produkt

Cuticell® ist eine sterile Primäraufgabe für oberflächliche, exsudierende Wunden. Die aus Acetatfäden bestehende Komresse ist mit einer wirkstofffreien Salbe auf Eucerit®-Basis beschichtet, die das Verkleben mit der Wunde weitestgehend verhindert. Gleichzeitig sorgt die engmaschige Struktur des Produktes dafür, dass Granulationsgewebe nicht einwachsen kann. Cuticell® ist latexfrei, belastet Wunden nicht mit überschüssigen Salbenmengen und ist luft- und sekretdurchlässig. Das Ergebnis: schmerzarme Verbandwechsel und gesicherte Wundruhe.

Cuticell® besteht aus einer Wundaufgabe mit Acetatträger und einer Salbenbeschichtung auf Eucerit®-Basis.

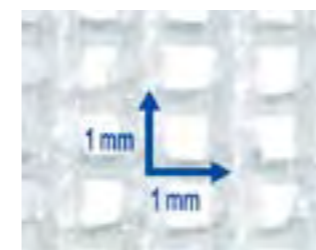

Die definierte Maschenweite von 1 x 1 mm verhindert das Einwachsen von Granulationsgewebe.



Anwendung

Cuticell® eignet sich zur klassischen Behandlung oberflächiger, exsudierender Wunden, wie z.B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Platzwunden
- Strahlenschäden
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer: kurzfristig, einen bis mehrere Tage

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

| Best.-Nr. | Abmessung | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|
| 7253901 | 7,5 cm x 7,5 cm | 50 | 1/12 | 04979038 |
| 7253900 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 | 1/60 | 04979021 |
| 7253903 | 20,0 cm x 7,5 cm | 50 | 1/6 | 04979050 |
| 7253902 | 20,0 cm x 7,5 cm | 10 | 1/30 | 04979044 |