

# B. Braun ContineceCare

## So einfach. So sicher.



B. Braun ContineceCare

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# B. Braun ContineenceCare. So einfach. So sicher.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Einmalkathetersversorgung</b>                | <b>4</b>  |
| Gebrauchsfertige Einmalkatheter mit Gleitmittel | 6         |
| Einmalkatheter mit Gleitmittel                  | 12        |
| PVC-Einmalkatheter                              | 13        |
| <b>Dauerkathetersversorgung</b>                 | <b>14</b> |
| Transurethrale Dauerkatheter                    | 16        |
| Suprapubische Blasendrainage                    | 17        |
| Geschlossene Urindrainagesysteme                | 19        |
| Katheter-Sets                                   | 20        |
| <b>Kondom-Urinalversorgung</b>                  | <b>22</b> |
| Kondom-Urinale                                  | 24        |
| Beinbeutel                                      | 25        |
| Beinbeutel-Fixierungen                          | 26        |
| <b>Urinbeutel</b>                               | <b>28</b> |
| Bettbeutel                                      | 28        |
| Sekretbeutel                                    | 29        |
| Kinder-Urinbeutel                               | 30        |
| <b>Absorbierende Systeme</b>                    | <b>32</b> |
| Krankenpflege-Unterlagen                        | 32        |
| <b>Stuhlinkontinenz</b>                         | <b>34</b> |
| Rektale Irrigation                              | 34        |
| Fäkalkollektor                                  | 35        |
| <b>Urostomieversorgung</b>                      | <b>36</b> |
| Einteilige Systeme                              | 36        |
| Zweiteilige Systeme                             | 38        |
| <b>Zubehör   Hygiene</b>                        |           |
| Zubehör für Urinbeutel und Katheter             | 40        |
| Antimikrobielle Reinigung                       | 44        |
| Händereinigung   Händedesinfektion              | 45        |
| Urologische Spüllösungen                        | 46        |
| <b>Ergänzende Therapiefelder</b>                | <b>48</b> |



**(0 800) 22 720 22**

Beratungs-Hotline für Patienten und Angehörige:  
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr (gebührenfrei)

[www.inkontinenz.bbraun.de](http://www.inkontinenz.bbraun.de)



## Was bleibt, ist Kontinenz.

Zwei Buchstaben können ein Leben verändern! Inkontinenz belastet das Selbstwertgefühl und führt häufig zu Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Aus Schamgefühl werden die Beschwerden verschwiegen und es findet oft ein Rückzug aus dem sozialen Umfeld statt.

Mit dem umfassenden Hilfsmittelprogramm von B. Braun kann aus einer Inkontinenz eine steuerbare Kontinenz werden. Für einen unbeschwernten, sicheren Alltag.

[www.inkontinenz.bbraun.de](http://www.inkontinenz.bbraun.de)

Unser Internetangebot [www.inkontinenz.bbraun.de](http://www.inkontinenz.bbraun.de) soll helfen, Unsicherheit und Isolation zu überwinden und Betroffenen und deren Angehörigen, Ärzten sowie Pflegekräften eine Plattform bieten, um sich mit dem Thema Inkontinenz auseinanderzusetzen.

In unserem Service-Bereich finden Sie Informationsbroschüren, Bestellformulare für kostenfreie Produktmuster, ein umfangreiches Schulungsangebot für Professionals und vieles mehr.

# Einmalkatheterversorgung

Für mehr Mobilität, Freiheit und Unabhängigkeit



Der intermittierende Katheterismus (IK) gilt als eine effektive und sichere Methode, die Betroffenen ein hohes Maß an Kontrolle und Unabhängigkeit bietet. Beim IK wird die Blase in regelmäßigen Abständen unter Zuhilfenahme eines Einmalkatheters entleert. Zwischen den einzelnen Blasenentleerungen besteht eine Kontinenz, die Sicherheit und Freiräume für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gewährt. Insbesondere bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen, wie z. B. Querschnittlähmung, Spina bifida oder Multiple Sklerose, hat sich der IK in den vergangenen Jahren zur Therapie der ersten Wahl entwickelt.

- Um Harnwegsinfekte zu vermeiden, ist vor der Katheterisierung eine Reinigung und anschließende Desinfektion der Hände erforderlich.
- Kathetereintrittspforten können mit der gebrauchsfertigen antimikrobiellen Lösung Prontosan® C gereinigt werden.



| Kostenfreie Informationen  | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Ratgeber Intermitt. Selbstkatheterismus  | 9991259     |
| CD-ROM Actreen®  | 9993795     |
| Anleitung Selbst Katheterisieren   | 9991260     |
| Patienten-Ausweis  | 9991261     |
| Handlungsanleitung   | 9995573     |
| Fachwissen Website: <a href="http://www.inkontinenz.bbraun.de">www.inkontinenz.bbraun.de</a> |             |




## Einfache Handhabung

- Steril und gebrauchsfertig verpackt
- Leichtes Zurückschieben der flexiblen Schutzhülle
- Berührungsfreies Einführen – Kontaminationsrisiko wird auf ein Minimum gesenkt
- Problemlose Anwendung, auch bei eingeschränkter Feinmotorik, z. B. Tetraplegie



## Actreen® Einmalkatheter

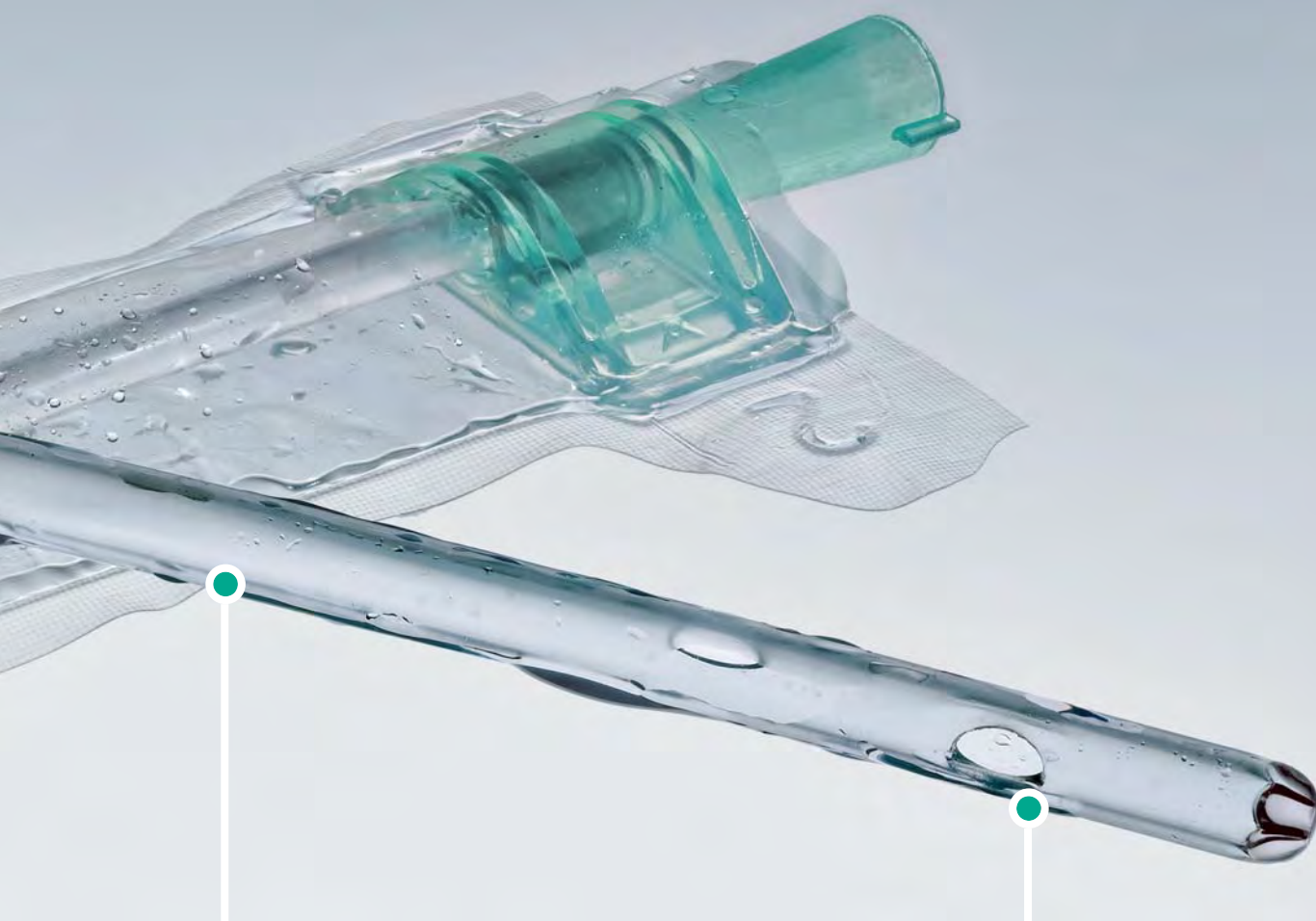

### Schonender Rundum-Gleitfilm

- Innovatives Gleitmittel auf Basis von Wasser und Glycerin
- Rundum-Beschichtung mit anhaltender Gleitfähigkeit
- Einfaches Einführen und müheloses Entfernen - egal wie viel Zeit für die Katheterisierung benötigt wird

### Besonders sanft und sicher


- Atraumatisch abgerundete Katheteraugen
- Die empfindliche Harnröhrenschleimhaut wird geschont
- Minimales Verletzungs- und Infektionsrisiko
- Alle Actreen® Katheter sind Latex- und DEHP-frei



# Actreen® Lite Cath


So einfach. So sicher. Mit zwei Handgriffen ist alles schnell erledigt.


Um umständliches Auspacken und Abfall zu vermeiden, wurde bei Actreen® Lite Cath auf zusätzliche Verpackungen verzichtet. Die Katheter sind bereits mit Gleitmittel beschichtet, liegen einfach verpackt im Karton und können direkt entnommen werden.

Die Katheterverpackung selbst bietet zwei Öffnungsmöglichkeiten. So wird auch Menschen mit eingeschränkter Handfunktion eine sterile Benutzung des Katheters ermöglicht.

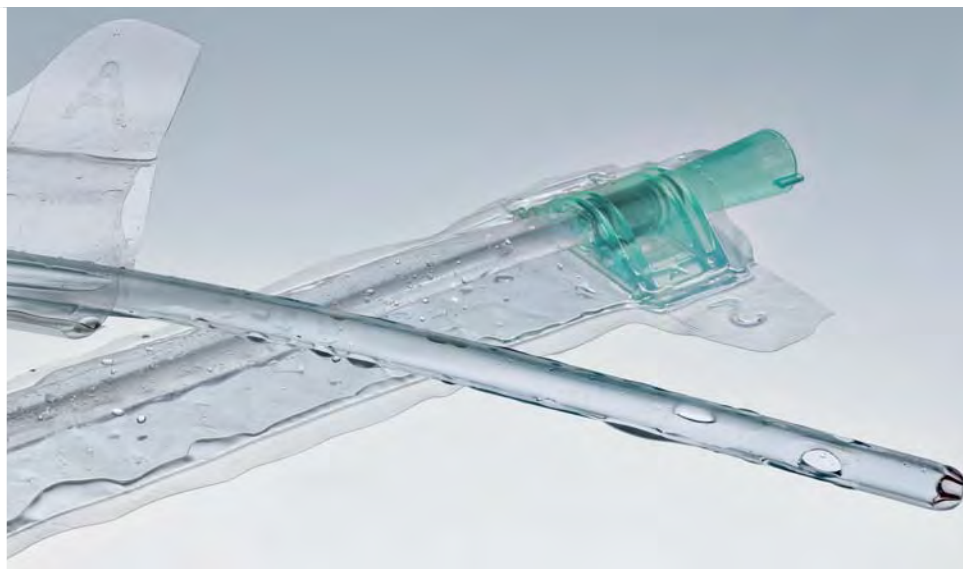

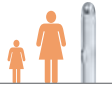
| Actreen® Lite Cath  | Ch.   | Katheter | Länge | REF      | PZN     | VE (St.) |
|---|---|----------|-------|----------|---------|----------|
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.5064   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|  | ● 06  | ø 2,0 mm | 20 cm | 228306DE | 1678796 | 30       |
|  | ● 08  | ø 2,7 mm | 20 cm | 228308DE | 1678856 | 30       |
|   | ● 10  | ø 3,3 mm | 20 cm | 228310DE | 1678862 | 30       |
|   | ○ 12  | ø 4,0 mm | 20 cm | 228312DE | 1678879 | 30       |
|   | ● 14  | ø 4,7 mm | 20 cm | 228314DE | 1678885 | 30       |
|   | ● 16  | ø 5,3 mm | 20 cm | 228316DE | 1678891 | 30       |

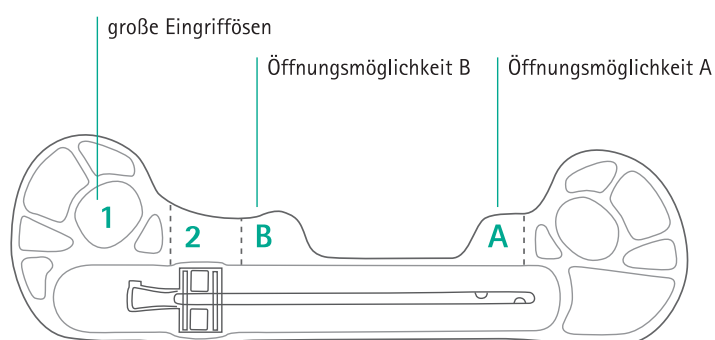

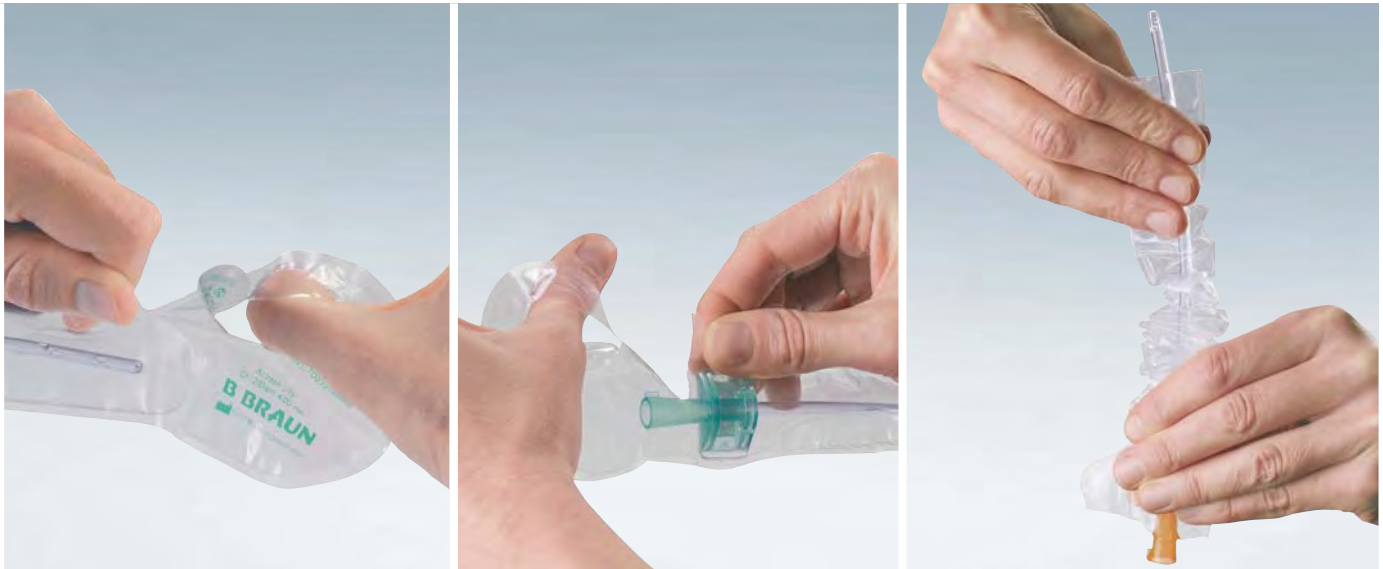

| Actreen® Lite Cath | Ch.   | Katheter | Länge | REF      | PZN     | VE (St.) |
|--------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|
| Nelaton            | HiMiV: 15.25.14.5065   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|                    | ● 08  | ø 2,7 mm | 45 cm | 228208DE | 1677791 | 30       |
|                    | ● 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 228210DE | 1677816 | 30       |
|                    | ○ 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 228212DE | 1677851 | 30       |
|                    | ● 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 228214DE | 1677928 | 30       |
|                    | ● 16  | ø 5,3 mm | 45 cm | 228216DE | 1678750 | 30       |
|                    | ● 18  | ø 6,0 mm | 45 cm | 228218DE | 1678767 | 30       |
| Tiemann            | HiMiV: 15.25.14.5066   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|                    | ● 08  | ø 2,7 mm | 45 cm | 228108DE | 1677650 | 30       |
|                    | ● 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 228110DE | 1677667 | 30       |
|                    | ○ 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 228112DE | 1677673 | 30       |
|                    | ● 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 228114DE | 1677696 | 30       |
|                    | ● 16  | ø 5,3 mm | 45 cm | 228116DE | 1677756 | 30       |
|                    | ● 18  | ø 6,0 mm | 45 cm | 228118DE | 1677785 | 30       |

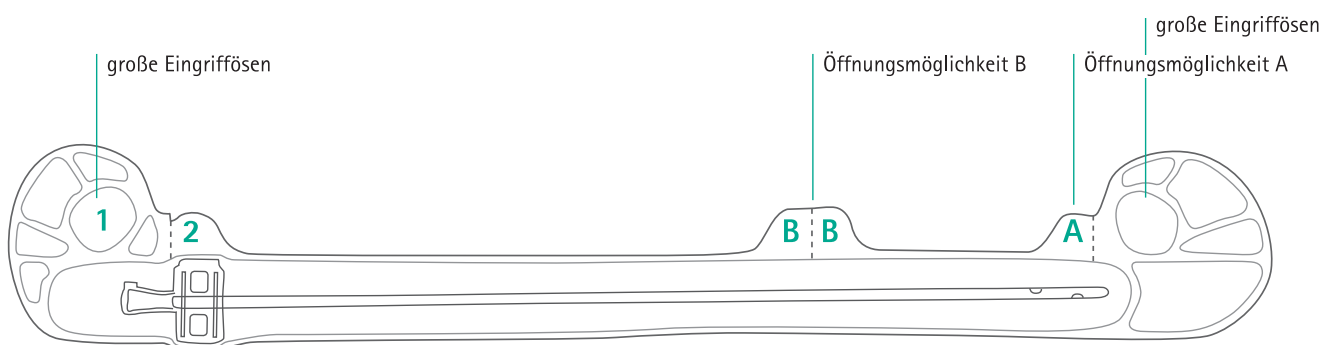



# Actreen® Lite Mini


So einfach. So sicher. Mini-Format für ein Maximum an Freiheit.

Sein handliches Format macht Actreen® Lite Mini zu einem unsichtbaren Begleiter, der bequem in jede Hosentasche passt.

- Transparente Verpackung für eine optimale Sichtkontrolle
- Berührungsfreie Entnahme
- Universal-Konnektor
- Durch die kompakte Größe des Konnektors entsteht kein Kontakt zur Toilette
- Nur 9 cm lang – ideal für die weibliche Harnröhre
- Für eine vollständige Entleerung der Blase sind die Katheterraugen besonders hoch platziert



| Actreen® Lite Mini  | Ch.  | Katheter | Länge | REF      | PZN     | VE (St.) |
|---|--|----------|-------|----------|---------|----------|
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.5071   Latex-frei   PVC-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|  | ● 10   | ø 3,3 mm | 9 cm  | 228010DE | 7241793 | 30       |
|  | ○ 12   | ø 4,0 mm | 9 cm  | 228012DE | 7241801 | 30       |
|   | ● 14   | ø 4,7 mm | 9 cm  | 228014DE | 7242025 | 30       |

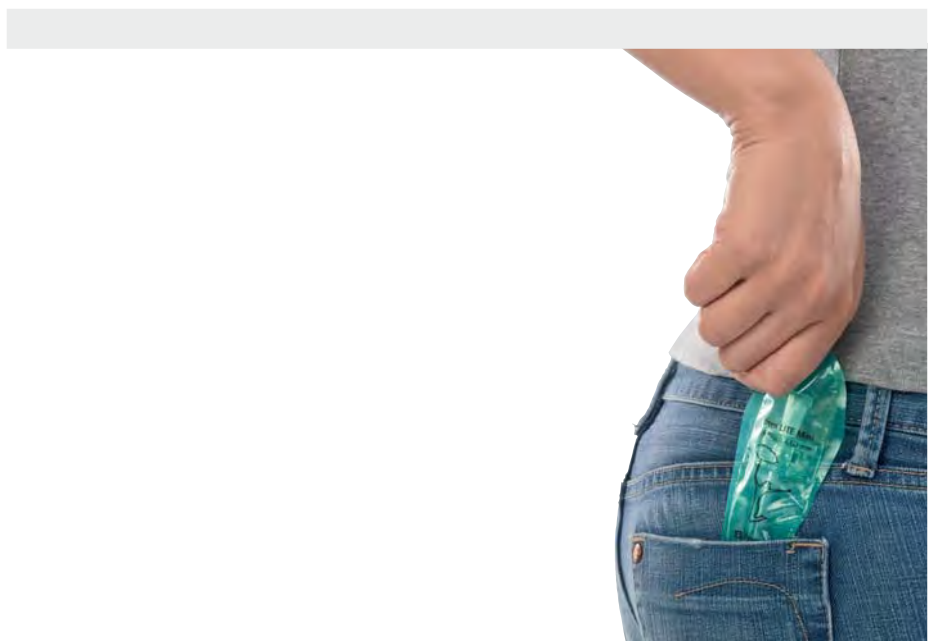










# Actreen® Glys Set

So einfach. So sicher. Katheterisierung mit integriertem Auffangbeutel.

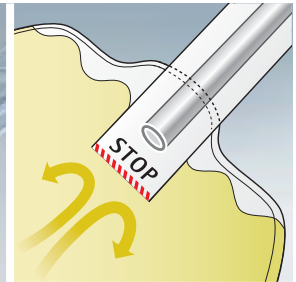Das kompakte Set besteht aus einem mit Gleitmittel beschichteten Katheter und fest verbundenem Auffangbeutel. Das Anti-Reflex-Ventil verhindert den Rückfluss von Urin in den Katheter und ermöglicht eine sichere Anwendung in jeder Position. Durch das Aufreißen der perforierten Lasche kann der Auffangbeutel problemlos entleert werden.

- Transparenter, graduierter Auffangbeutel
- Hohes Füllvolumen, max. 1.000 ml
- Einfache Kontrolle der Menge und Beschaffenheit des Urins
- Ermöglicht eine sterile Anwendung

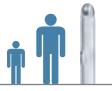


| Actreen® Glys Set   | Ch.   | Katheter | Länge | REF      | PZN     | VE (St.) |
|---|---|----------|-------|----------|---------|----------|
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.8021   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|  | 06  | ø 2,0 mm | 25 cm | 226306DE | 0582309 | 30       |
|  | 08  | ø 2,7 mm | 25 cm | 226308DE | 0582315 | 30       |
|   | 10  | ø 3,3 mm | 25 cm | 226310DE | 0582462 | 30       |
|   | 12  | ø 4,0 mm | 25 cm | 226312DE | 0584254 | 30       |
|   | 14  | ø 4,7 mm | 25 cm | 226314DE | 0585176 | 30       |
|   | 16  | ø 5,3 mm | 25 cm | 226316DE | 0585182 | 30       |
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.8022   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|  | 08  | ø 2,7 mm | 50 cm | 226208DE | 0578644 | 30       |
|  | 10  | ø 3,3 mm | 50 cm | 226210DE | 0578791 | 30       |
|   | 12  | ø 4,0 mm | 50 cm | 226212DE | 0578911 | 30       |
|   | 14  | ø 4,7 mm | 50 cm | 226214DE | 0580138 | 30       |
|   | 16  | ø 5,3 mm | 50 cm | 226216DE | 0581221 | 30       |
|   | 18  | ø 6,0 mm | 50 cm | 226218DE | 0582031 | 30       |
| Tiemann   | HiMiV: 15.25.14.8023   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |          |         |          |
|  | 08  | ø 2,7 mm | 45 cm | 226108DE | 0588393 | 30       |
|  | 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 226110DE | 0588418 | 30       |
|   | 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 226112DE | 0588424 | 30       |
|   | 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 226114DE | 0588453 | 30       |
|   | 16  | ø 5,3 mm | 45 cm | 226116DE | 0588476 | 30       |

# Actreen® Glys Cath

So einfach. So sicher. Wenn ein Urinbeutel nicht erforderlich ist.

Ob im stationären Bereich oder zu Hause: Actreen® Glys Cath ist optimal für den schonenden und sanften Katheterismus, bei dem ein Urinbeutel nicht unbedingt erforderlich ist.

Bei Bedarf kann jeder herkömmliche Urinbeutel an den Trichteransatz angeschlossen werden. Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung des Trichters leicht zu erkennen.

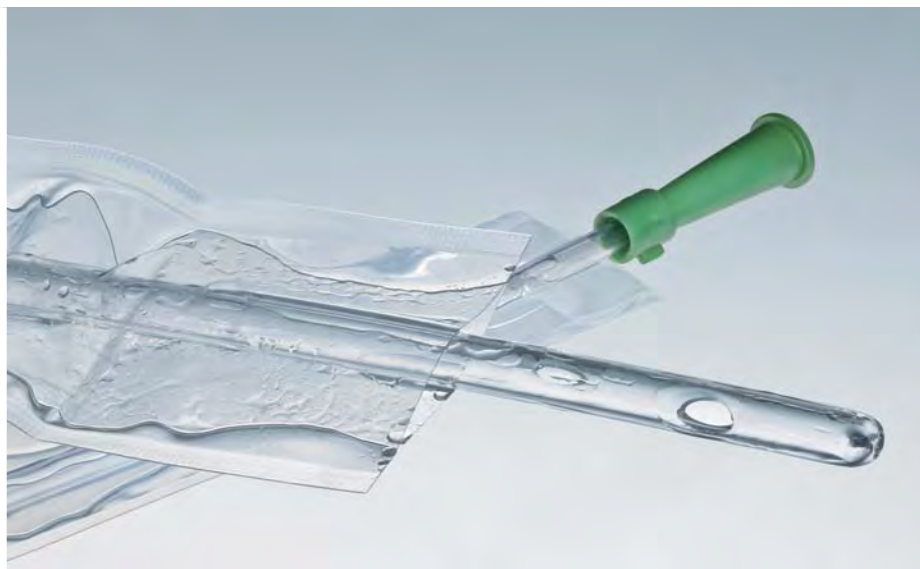


| Actreen® Glys Cath  | Ch.   | Katheter | Länge | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---|---|----------|-------|--------|---------|----------|
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.5052   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |        |         |          |
|  | ● 06  | ø 2,0 mm | 20 cm | 225306 | 0577165 | 30       |
|  | ● 08  | ø 2,7 mm | 20 cm | 225308 | 0577171 | 30       |
|   | ● 10  | ø 3,3 mm | 20 cm | 225310 | 0577231 | 30       |
|   | ○ 12  | ø 4,0 mm | 20 cm | 225312 | 0577248 | 30       |
|   | ● 14  | ø 4,7 mm | 20 cm | 225314 | 0577283 | 30       |
|   | ● 16  | ø 5,3 mm | 20 cm | 225316 | 0577449 | 30       |
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.5046   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |        |         |          |
|  | ● 08  | ø 2,7 mm | 45 cm | 225208 | 0588246 | 30       |
|  | ● 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 225210 | 0588281 | 30       |
|   | ○ 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 225212 | 0588306 | 30       |
|   | ● 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 225214 | 0588329 | 30       |
|   | ● 16  | ø 5,3 mm | 45 cm | 225216 | 0588358 | 30       |
|   | ● 18  | ø 6,0 mm | 45 cm | 225218 | 0588364 | 30       |
| Tiemann   | HiMiV: 15.25.14.5047   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |        |         |          |
|  | ● 08  | ø 2,7 mm | 45 cm | 225108 | 0585420 | 30       |
|  | ● 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 225110 | 0585437 | 30       |
|   | ○ 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 225112 | 0587873 | 30       |
|   | ● 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 225114 | 0587904 | 30       |
|   | ● 16  | ø 5,3 mm | 45 cm | 225116 | 0588192 | 30       |
|   | ● 18  | ø 6,0 mm | 45 cm | 225118 | 0588200 | 30       |



# Actreen® Glys Luer Lock



So einfach. So sicher. Zur Verabreichung von medizinischen Substanzen.

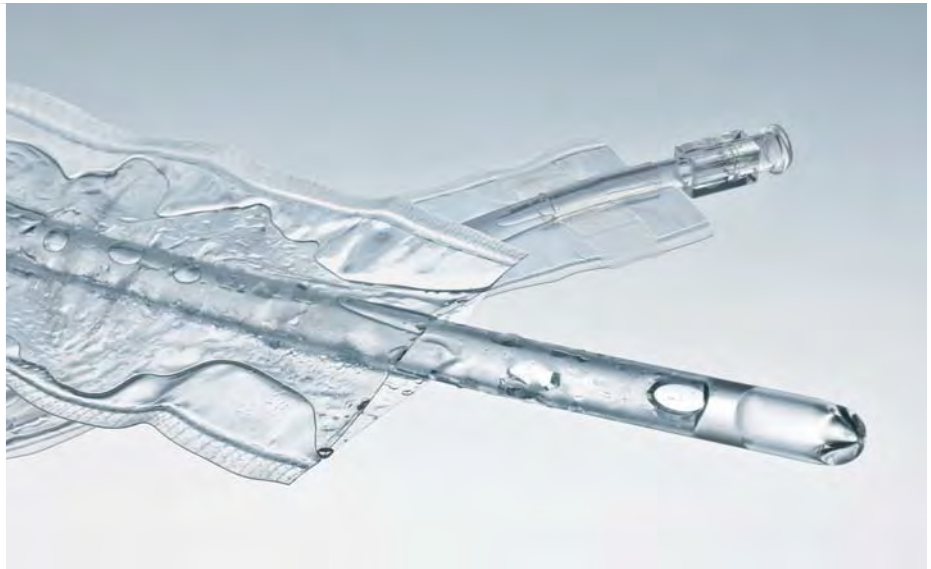

Mit Actreen® Glys Luer Lock können einfach und sicher intravesikale Instillationen zeit- und materialsparend durchgeführt werden.

Der Luer Lock-Anschluss ist leicht zu bedienen und geht eine zuverlässige Verbindung mit der Applikationshilfe des Medikaments ein. Actreen® Glys Luer Lock bietet die Zuverlässigkeit und Sicherheit eines geschlossenen Systems, so dass ein vollständiges Instillationsvolumen garantiert und der direkte Kontakt mit der Lösung effektiv vermieden werden kann.



| Actreen® Glys Luer Lock   | Ch.   | Katheter | Länge | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---|---|----------|-------|--------|---------|----------|
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.22.0006   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |        |         |          |
|  | 10  | ø 3,3 mm | 20 cm | 227310 | 4400050 | 10       |
|  | 12  | ø 4,0 mm | 20 cm | 227312 | 4400067 | 10       |
|   | 14  | ø 4,7 mm | 20 cm | 227314 | 4400073 | 10       |

| Nelaton   | Ch.   | Katheter | Länge | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---|---|----------|-------|--------|---------|----------|
|   | HiMiV: 15.25.22.0005   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |        |         |          |
|  | 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 227210 | 4400009 | 10       |
|  | 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 227212 | 4400015 | 10       |
|   | 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 227214 | 4400021 | 10       |

| Tiemann   | Ch.   | Katheter | Länge | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---|---|----------|-------|--------|---------|----------|
|   | HiMiV: 15.25.22.0005   Latex-frei   DEHP-frei |          |       |        |         |          |
|  | 10  | ø 3,3 mm | 45 cm | 227410 | 4400469 | 10       |
|  | 12  | ø 4,0 mm | 45 cm | 227412 | 4400475 | 10       |
|   | 14  | ø 4,7 mm | 45 cm | 227414 | 4400914 | 10       |

Einmalkatheter mit Gleitmittel



# Tiemann Einmalkatheter

Einfache Katheterisierung durch weiche, gebogene und flexible Spitze

Der Tiemann Einmalkatheter mit Gleitmittel hat eine besonders weiche, gebogene und flexible Spitze. Diese gewährleistet eine sehr angenehme und einfache Katheterisierung.

- Silikonisierte Tiemannspitze
- Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung der Katheterspitze leicht zu erkennen
- 2 seitliche Augen
- Mit Trichteransatz
- Einzeln steril verpackt – zum sofortigen Einsatz
- 6 ml Gleitmittel Endosgel inklusive



| Tiemann Einmalkatheter  | Ch.                               | Katheter | Länge | REF      | PZN     | VE (St.) |
|---|-----------------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|
| Tiemann   | HiMiV: 15.25.14.5057   Latex-frei |          |       |          |         |          |
|  | ○ 12                              | ø 4,0 mm | 40 cm | 4562127G | 1888507 | 50       |
|  | ● 14                              | ø 4,7 mm | 40 cm | 4562143G | 1888513 | 50       |
|   | ● 16                              | ø 5,3 mm | 40 cm | 4562160G | 1888536 | 50       |
|   | ● 18                              | ø 6,0 mm | 40 cm | 4562186G | 1888542 | 50       |
|   | ● 20                              | ø 6,7 mm | 40 cm | 4562208G | 1888559 | 50       |

Jedem Katheter liegt eine 6 ml Endosgel-Spritze bei









# PVC-Einmalkatheter

Bewährte Qualität für die Einmalkatheterversorgung ohne Gleitmittel

Die bewährten Produkte aus dem B. Braun-Sortiment stehen seit vielen Jahren für beständige Qualität im Bereich der Katheterversorgung.

- Mit geschlossener Nelatonspitze oder Tiemannspitze
- 2 seitliche Augen
- Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung des Trichteransatzes leicht zu erkennen
- Einzeln steril verpackt



| PVC-Einmalkatheter  | Ch.                               | Katheter | Länge | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|-----------------------------------|----------|-------|---------|---------|----------|
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.4016   Latex-frei |          |       |         |         |          |
|  | ● 08                              | ø 2,7 mm | 18 cm | 4340086 | 4476030 | 100      |
|  | ● 10                              | ø 3,3 mm | 18 cm | 4340108 | 4476047 | 100      |
|   | ○ 12                              | ø 4,0 mm | 18 cm | 4340124 | 4476053 | 100      |
|   | ● 14                              | ø 4,7 mm | 18 cm | 4340140 | 4476076 | 100      |
|   | ● 16                              | ø 5,3 mm | 18 cm | 4340167 | 4476082 | 100      |
|   | ● 18                              | ø 6,0 mm | 18 cm | 4340183 | 4476099 | 100      |
| Nelaton   | HiMiV: 15.25.14.4017   Latex-frei |          |       |         |         |          |
|  | ● 08                              | ø 2,7 mm | 40 cm | 4320085 | 4475964 | 100      |
|  | ● 10                              | ø 3,3 mm | 40 cm | 4320107 | 4475970 | 100      |
|   | ○ 12                              | ø 4,0 mm | 40 cm | 4320123 | 4475987 | 100      |
|   | ● 14                              | ø 4,7 mm | 40 cm | 4320140 | 4475993 | 100      |
|   | ● 16                              | ø 5,3 mm | 40 cm | 4320166 | 4476001 | 100      |
|   | ● 18                              | ø 6,0 mm | 40 cm | 4320182 | 4476018 | 100      |
|   | ● 20                              | ø 6,7 mm | 40 cm | 4320204 | 4476024 | 100      |
| Tiemann   | HiMiV: 15.25.14.4018   Latex-frei |          |       |         |         |          |
|  | ● 08                              | ø 2,7 mm | 40 cm | 4311086 | 4476107 | 100      |
|  | ● 10                              | ø 3,3 mm | 40 cm | 4311108 | 4476113 | 100      |
|   | ○ 12                              | ø 4,0 mm | 40 cm | 4311124 | 4476136 | 100      |
|   | ● 14                              | ø 4,7 mm | 40 cm | 4311140 | 4476142 | 100      |
|   | ● 16                              | ø 5,3 mm | 40 cm | 4311167 | 4476159 | 100      |
|   | ● 18                              | ø 6,0 mm | 40 cm | 4311183 | 4476165 | 100      |
|   | ● 20                              | ø 6,7 mm | 40 cm | 4311205 | 4476171 | 100      |

# Dauerkatheterversorgung

## Urinableitung mit System



Die Versorgung von Patienten mittels Dauerkatheter nimmt neben anderen Formen der Harnableitung (Einmalkatheter, Kondom-Urinalversorgung) auch heute noch einen großen Stellenwert ein. Bei richtiger Technik und sachkundiger Ausführung besteht eine limitierte Verletzungsmöglichkeit.

- Die Liegedauer eines Dauerkatheters ist abhängig vom eingesetzten Kathetermaterial.
- Bei der Dauerkatheterableitung sollten die Richtlinien des Robert Koch-Institutes (RKI) eingehalten werden. Diese legen die hygienischen Anforderungen bei Anlage und Wechsel des Dauerkatheters fest.

Unsachgemäße Urinableitung kann zu Verunreinigungen, Urinkontakt und damit zu Keimverschleppung führen. Dadurch besteht erhöhte Infektionsgefahr, die durch den Einsatz von geschlossenen Urindrainagesystemen deutlich verringert werden kann. Die B. Braun Ureofix®-Systeme kombinieren Sicherheit mit dem Faktor Wirtschaftlichkeit und werden somit den Anforderungen einer Langzeitversorgung sowohl in der Klinik als auch im häuslichen Umfeld vollends gerecht.



| Kostenfreie Informationen  | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Inkontinenz – Ratgeber für Betroffene  | 9991258     |
| Patienten-Ausweis  | 9991261     |
| Fachwissen Website: <a href="http://www.inkontinenz.bbraun.de">www.inkontinenz.bbraun.de</a> |             |



### Bakteriendichte Tropfkammer

- Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr
- Sehr guter Druckausgleich und sicheres Ablaufverhalten, selbst unter hoher Belastung
- Optimiertes Antirefluxsystem – Membranventil in Tropfkammer und Folienflatterventil im Beutel



## Ureofix® 112 Plus

### Nadelfreie Probenentnahme

- Stufenkonus mit integriertem, wiederabdichtendem Silikonport zur nadelfreien Probenentnahme
- Auch mit Kanüle möglich

### Latex-freie Handschuhe inklusive

- 1 Paar sterile, Latex-freie Schutzhandschuhe (puderfrei) zum hygienischen Wechsel des Systems im Set enthalten

# Transurethrale Silikon-Ballonkatheter

Blasenverweilkatheter zur Urinableitung durch die Harnröhre

Aufgrund der guten Verträglichkeit ist Silikon das ideale Kathetermaterial, insbesondere für Langzeitanwendungen. Silikon überzeugt durch seine Biokompatibilität und Biostabilität.

- 100% Silikon, auch für Dauerableitung > 5 Tage geeignet
- Nelaton Katheterspitze
- Katheterlänge ca. 40 cm
- Hohe Gleitfähigkeit und Biegsamkeit
- Einfaches, sicheres Einführen
- Angenehmer Tragekomfort
- Sichere Fixierung
- Steril – zum sofortigen Einsatz



## Transurethrale Silikon-Ballonkatheter



| Ch.                               | Katheter | Ballonkapazität | REF     | PZN     | VE (St.) |
|-----------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|----------|
| HiMiV: 15.25.15.6076   Latex-frei |          |                 |         |         |          |
| ○ 12                              | ø 4,0 mm | 5–10 ml         | 4563123 | 3978232 | 10       |
| ● 14                              | ø 4,7 mm | 5–10 ml         | 4563140 | 3978249 | 10       |
| ● 16                              | ø 5,3 mm | 5–15 ml         | 4563166 | 3978255 | 10       |
| ● 18                              | ø 6,0 mm | 5–15 ml         | 4563182 | 3978261 | 10       |
| ● 20                              | ø 6,7 mm | 5–15 ml         | 4563204 | 3978278 | 10       |
| ● 22                              | ø 7,3 mm | 5–15 ml         | 4563220 | 3978284 | 10       |
| ● 24                              | ø 8,0 mm | 5–15 ml         | 4563247 | 3978290 | 10       |



# Cystofix®

## Indikationsgerechtes Sortiment für die Suprapubische Blasendrainage


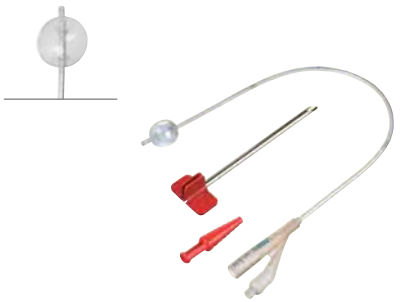
### Pigtailkatheter

- Aus Polyurethan (Certon®)
- Schiebeklemme
- Farbige Längenmarkierungen
- Seitliche Katheteröffnungen
- Eingerollte Spitze

### Ballonkatheter

- Aus Silikon
- Ballonkapazität 5 ml
- Farbige Längenmarkierungen
- Zentrale Öffnung
- Mit gerader oder eingerollter Spitze (Pigtail)



| Cystofix® Basisbestecke   | Katheter  | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|---|---------|---------|----------|
| mit Pigtailkatheter, steril   |   |         |         |          |
|  | Ch.: 10   ø 2,9 mm   65 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 8 cm   | 4440056 | 2133219 | 25       |
|   | Ch.: 10   ø 2,9 mm   65 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 12 cm  | 4440129 | 2133225 | 25       |
|   | Ch.: 15   ø 4,8 mm   65 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 12 cm  | 4440153 | 2416868 | 25       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certon® Katheter</li> <li>▪ Spaltbare Punktionskanüle</li> <li>▪ Sekretbeutel 1,5 l</li> <li>▪ Schiebeklemme</li> <li>▪ Fixierplatte (nur für Ch. 10)</li> </ul> |         |         |          |
| mit Ballonkatheter, steril  | PVC-frei  |         |         |          |
|  | Ch.: 12   ø 4 mm   40 cm, gerade<br>Kanülenstichlänge: 12 cm  | 4440250 | 3284469 | 25       |
|   | Ch.: 12   ø 4 mm   53 cm, eingerollt<br>Kanülenstichlänge: 12 cm  | 4440455 | 4847532 | 10       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ballonkatheter</li> <li>▪ Spaltbare Punktionskanüle</li> <li>▪ Katheterstopfen</li> </ul>  |         |         |          |



# Cystofix®

## Indikationsgerechtes Sortiment für die Suprapubische Blasendrainage

Der erforderliche Wechsel des Katheters nach längerer Liegezeit erfolgt über einen Führungsdraht, dessen weiche und elastische Spitze Verletzungen vorbeugt.

Der Wechsel auf einen größerlumigen Katheter erfolgt mit dem Cystofix® Dilatations-Wechselbesteck, durch einen Dilatator mit spaltbarer Hülse. Der Einsatz bietet sich vor allem bei Patienten an, die für längere Zeit eine Blasendrainage benötigen.

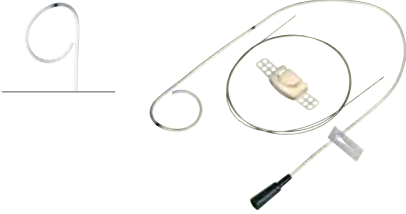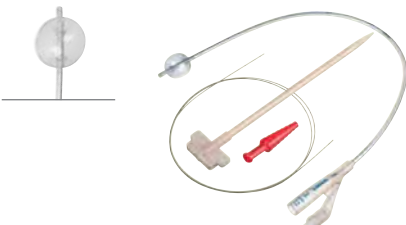

| Cystofix® Wechselbestecke   | Katheter  | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|---|---------|---------|----------|
| mit Pigtailkatheter, steril   |   |         |         |          |
|  | Ch.: 10   ø 2,9 mm   65 cm, eingerollt  | 4441001 | 2416874 | 25       |
|   | Ch.: 15   ø 4,8 mm   65 cm, eingerollt  | 4441150 | 2559970 | 25       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certon® Katheter</li> <li>▪ Führungssonde 1,1 x 1.000 mm</li> <li>▪ Schiebeklemme</li> <li>▪ Fixierplatte (nur für Ch. 10)</li> </ul>  |         |         |          |
| mit Ballonkatheter, steril  | PVC-frei  |         |         |          |
|  | Ch.: 12   ø 4 mm   40 cm, gerade  | 4441257 | 3284475 | 25       |
|   | Ch.: 12   ø 4 mm   53 cm, eingerollt  | 4441451 | 4847549 | 10       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ballonkatheter</li> <li>▪ Führungssonde 1,1 x 1.000 mm</li> <li>▪ Katheterstopfen</li> </ul>   |         |         |          |
| Dilatations-Wechselbestecke   | Katheter  | REF     | PZN     | VE (St.) |
| mit Ballonkatheter, steril  | PVC-frei  |         |         |          |
|  | von Ch. 10 > 12   ø 4 mm   40 cm, gerade  | 4441117 | 3318719 | 25       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ballonkatheter</li> <li>▪ Führungssonde 0,9 x 1.000 mm</li> <li>▪ Katheterstopfen</li> <li>▪ Dilatator mit spaltbarer Hülse</li> </ul> |         |         |          |

# Ureofix® 112 Plus | Ureofix® Day and Night

Geschlossenes Urindrainagesystem | Kombiniertes Bett- und Beinbeutel

Ureofix® 112 Plus – das geschlossene Urindrainagesystem mit dem 3fach-Sicherheitskonzept

- 1) Transparente, bakteriendichte Tropfkammer mit Membranventil
- 2) Einstecklasche zur Vermeidung von Kontaminationen
- 3) 1 Paar Handschuhe inklusive



## Ureofix® 112 Plus



### Beschreibung

HiMiV: 15.25.07.0043

Belüfteter Urinbeutel 2 l, steril

mit Überleitungsschlauch 110 cm

28431S

5016448

25

- Silikonport am Stufenkegel zur nadelfreien Probenentnahme
- Überleitungsschlauch mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme
- Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran
- Bodenablassventil mit belüfteter Einstecklasche
- Aufhängung mit Haken, Kordel
- 1 Paar sterile, Latex-freie Handschuhe (puderfrei) inklusive

## Ureofix® Day and Night



### Beschreibung

HiMiV: 15.25.07.1002

Belüfteter Urinbeutel 800 ml, steril

mit Überleitungsschlauch 60 cm

28440

5016477

25

mit Überleitungsschlauch 90 cm

28441

0853122

25

- Bakteriendichte transparente Tropfkammer mit Schutzmembran
- Antirefluxventil
- Nachtropfsicheres Bodenablassventil mit weicher Einstecklasche „Soft“
- Weiche Vliesrückseite
- Probeentnahmestelle am Stufenkegel
- Verbindungsschlauch aus Silikon zur Konnektion eines zusätzlichen Bettbeutels
- Aufhängung des Systems mit Kordel

# Katheter-Sets

## Sterile Sets zur Katheterisierung

Sorgfältiges und steriles Arbeiten bei der Katheterisierung schränkt Risiken so weit wie möglich ein. Die Verwendung eines Katheter-Sets kann das Infektionsrisiko vermindern und aufwändige Folgebehandlungen mit entsprechenden Kosten vermeiden helfen.

Die sterilen Katheter-Sets gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Klein in der Abpackung aber umfassend im Inhalt, damit alles sofort griffbereit ist.



### Katheter-Set Basis



### Beschreibung

### REF

### PZN

### VE (St.)

9745033

4471558

10

**Inhalt:** 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 3 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Urinbeutel 1.500 ml, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer pflaumengroß DIN 61630 - VM 20, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm DIN 61630 - VM 17, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter

### Katheter-Set



### Beschreibung

### REF

### PZN

### VE (St.)

mit Instillagel (eWz Farco Pharma, Köln)

9745017

3915272

10

ohne Instillagel

9745025

3915289

10

**Inhalt:** 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm, 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml zur Ballonentblockung, 1 x 20 ml Braunol®, 1 Spritze mit 10 ml sterilem Wasser, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter

Das Katheter-Set mit Instillagel enthält zusätzlich 1 x 6 ml Instillagel

**Braunol®** | Wirkstoff: Povidon-Iod


**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 7,5 g Povidon-Iod, mittleres Molekulargewicht 40 000, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod. **Sonstige Bestandteile:** Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumiodat, Macrogollaurylether 9 EO (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** *Zur einmaligen Anwendung:* Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptik der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkateterisierungen. *Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung:* Antiseptische Wundbehandlung (z. B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre), Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Hauterkrankungen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Iod oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels, Hyperthyreose oder andere manifeste Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung). **Nebenwirkungen:** Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. Sehr selten: Akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Eine nennenswerte Iodaufnahme kann bei längerfristiger Anwendung von Braunol® auf ausgedehnten Wund- und Verbrennungsflächen erfolgen. Sehr selten können Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen in der Vorgeschichte eine Schilddrüsenüberfunktion (iodinduzierte Hyperthyreose), zum Teil mit Symptomen wie z. B. Pulsbeschleunigung oder innere Unruhe, entwickeln. Nach Anwendung größerer Mengen von Povidon-Iod-haltigen Arzneimitteln (z. B. bei der Verbrennungsbehandlung) ist das Auftreten von (zusätzlichen) Elektrolyt- und Serumsmolaritäts-Störungen, einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion sowie Übersäuerung des Blutes (metabolische Azidose) beschrieben worden. **Stand der Information:** 06/2011. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.



Das Katheter-Set Ureofix® Set 30 A beinhaltet alle Komponenten, die zur Versorgung von Dauerkatheterpatienten (transurethral) notwendig sind.



### Katheter-Set Ureofix® Set 30 A

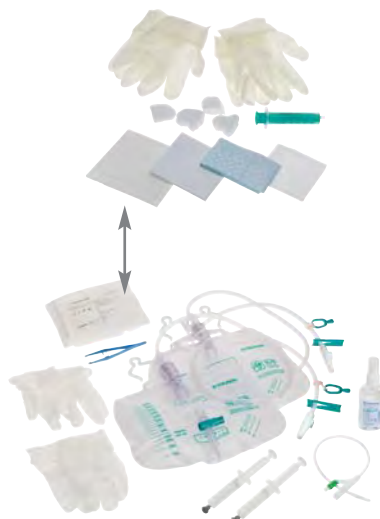

| Ch.  | Silikonkatheter | REF   | PZN     | VE (St.) |
|------|-----------------|-------|---------|----------|
| ● 14 | ø 4,7 mm        | 28450 | 0082400 | 1        |
| ● 16 | ø 5,3 mm        | 28451 | 0084876 | 1        |
| ● 18 | ø 6,0 mm        | 28452 | 0094538 | 1        |
| ● 20 | ø 6,7 mm        | 28453 | 0104946 | 1        |
| ● 22 | ø 7,3 mm        | 28454 | 7120546 | 1        |

#### Inhalt:

- 2 Ureofix® 112 Plus
- 1 Silikonballonkatheter, 40 cm Länge
- 1 Katheter-Set\*
- 1 Prontoan® C 75 ml
- 1 steriles Gleitmittel in 10 ml Spritze
- 1 steriles Wasser mit 10% Glycerin in 10 ml Spritze zur Blockung
- 1 steril verpackte Einmalpinzette

#### \* Inhalt Katheter-Set:

- 1 Ablagetuch
- 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe
- 1 Unterlagetuch
- 1 Entsorgungsbeutel
- 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml
- 4 Tupfer pflaumengroß
- 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm

- Bei Ureofix® Set 30 A können der Dauerkatheter und 2 Ureofix® 112 Plus rezeptiert werden.
- Je nach Bundesland und/oder Krankenkasse werden bis zu 5 Ureofix® Urindrainagesysteme pro Monat erstattet. Die entsprechende Menge sollte auf dem Rezept erscheinen.

| ADK  | LAK | BKX | BKX | VWAK | ADY | Knappschalt | DP1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|--|-----|-----|-----|------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Name, Vorname, Nachname  |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Geburtsdatum   |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Geburtsort   |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Krankenkasse   |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Versicherungskategorie   |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Versicherungsnr.   |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Merkmal  |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rt. (Bitte Leerläufe durchschreiben)                                     |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1 Stück Transurethraler Silikon-Ballonkatheter CH ... HiMi 15.25.15.6076 |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2 Stück Ureofix 112 Plus Urindrainagesystem HiMi 15.25.07.0043           |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ärztliche Diagnose nach ICD-10 .....                                     |     |     |     |      |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Muster  
Monatsversorgung  
Rezept

# Kondom-Urinalversorgung

Die sinnvolle Alternative für die Versorgung der männlichen Harninkontinenz



Kondom-Urinale bieten klare Vorteile: Sie vermeiden Infektionen sowie daraus resultierende Komplikationen und wahren die Intimsphäre durch eine einfache, diskrete Selbstversorgung.

- Kondom-Urinale sollten aus hygienischen Gründen mindestens alle 24 Stunden gewechselt werden.
- Jedes Kondom-Urinal ist einzeln verpackt und sollte erst kurz vor der Anwendung aus der Verpackung genommen werden.
- Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, empfehlen wir, die Kondom-Urinale zusammen mit Urimed® Tribag Plus und Beinbeutelbefestigungen zu verwenden.
- Der Anwender sollte das richtige Produkt sowie die richtige Größe ermitteln. Hierbei ist die Kondom-Urinal-Messschablone hilfreich.
- Pflegerische Grundsätze wie Kürzung des Schamhaars, Hautpflege, Tragedauer sind zu berücksichtigen.



| Kostenfreie Informationen  | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Kondom-Urinal-Messschablone  | 9998160     |
| Inkontinenz – Ratgeber für Betroffene  | 9991258     |
| Patienten-Ausweis  | 9991261     |
| Handlungsanleitung   | 9995573     |
| Fachwissen Website: <a href="http://www.inkontinenz.bbraun.de">www.inkontinenz.bbraun.de</a> |             |



## Urimed® Vision

- Hautfreundlicher Kleber – es verbleiben keine Rückstände
- Knickschutz am Schaft verhindert Urinstau
- Universeller Ablaufstutzen zum Anschluss von Bettbeuteln für die Nachtversorgung sowie von Beinbeuteln für eine größtmögliche Mobilität



## Urimed® Tribag Plus


- Optimiertes Ablassventil für hygienisches Entleeren mit nur einer Hand
- Weiche Vliesrückseite bietet angenehmen Tragekomfort und Schutz der Haut
- 3-Kammer-System für gleichmäßiges Verteilen des Urins
- Der Beutel formt sich der Beinkontur an
- Kein Schwappen bei Bewegung, unangenehme Geräuscheffekte werden vermieden


# Urimed® Vision

## Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon

- 100% Silikon verhindert Hautreizungen durch Latexallergien – sowohl beim Patienten, als auch beim Pflegepersonal
- Transparentes Material sorgt für eine optimale Kontrolle der Haut
- Hautfreundlicher Kleber ermöglicht eine lange Tragedauer
- Knickschutz am Schaft verhindert, dass sich der Urin staut
- 5 Größen gewährleisten optimalen Halt und verbessern den Tragekomfort
- Die Version Short verbessert durch einen modifizierten Klebeansatz die Anwendung des Produkts bei Patienten mit retrahiertem Penis



| Urimed® Vision  | Größe  | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---|--|-------|---------|----------|
| Standard  | HiMiV: 15.25.04.7016   Latex-frei   PVC-frei |       |         |          |
|  | ø 25 mm                                      | 28625 | 0500079 | 30       |
|   | ø 29 mm                                      | 28629 | 0500116 | 30       |
|   | ø 32 mm                                      | 28632 | 0500122 | 30       |
|   | ø 36 mm                                      | 28636 | 0500139 | 30       |
|   | ø 41 mm                                      | 28641 | 0500145 | 30       |

| Short   | Größe  | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---|--|-------|---------|----------|
|   | HiMiV: 15.25.04.7015   Latex-frei   PVC-frei |       |         |          |
|  | ø 25 mm                                      | 28825 | 0500151 | 30       |
|   | ø 29 mm                                      | 28829 | 0500168 | 30       |
|   | ø 32 mm                                      | 28832 | 0500174 | 30       |
|   | ø 36 mm                                      | 28836 | 0500180 | 30       |
|   | ø 41 mm                                      | 28841 | 0500197 | 30       |



# Urimed® Tribag Plus | Urin-Beinbeutel

## 3-Kammer Beinbeutel | Urin-Beinbeutel


Urimed® Tribag Plus-Beinbeutel sind bestens geeignet für mobile Menschen, die eine zuverlässige und unauffällige Versorgung benötigen.

- 3-Kammer Beutel 500 und 800 ml
- Rückflusssperre
- Sicherheitsventil
- Weiche Vliesrückseite
- Sterile Version in 4 Schlauchlängen
- Unsterile Version auf gewünschtes Maß kürzbar

Die wirtschaftliche Alternative:  
Urin-Beinbeutel mit Rücklaufsperre  
und verschließbarem Ablaufschlauch.



| Urimed® Tribag Plus   | Fassungsvermögen                  | Schlauchlänge | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---|-----------------------------------|---------------|-------|---------|----------|
|  | HiMiV: 15.25.05.3058   Latex-frei |               |       |         |          |
|   | steril 500 ml                     | 2 cm          | 28201 | 0853139 | 10       |
|   | steril 500 ml                     | 20 cm         | 28203 | 5015874 | 10       |
|   | steril 500 ml                     | 40 cm         | 28204 | 5015911 | 10       |
|   | steril 500 ml                     | 60 cm         | 28205 | 5015934 | 10       |
|   | steril 800 ml                     | 2 cm          | 28301 | 0853211 | 10       |
|   | steril 800 ml                     | 20 cm         | 28303 | 5015986 | 10       |
|   | steril 800 ml                     | 40 cm         | 28304 | 5015992 | 10       |
|   | steril 800 ml                     | 60 cm         | 28305 | 5016000 | 10       |
|   | HiMiV: 15.25.05.1086   Latex-frei |               |       |         |          |
|   | unsteril 500 ml                   | 60 cm         | 28206 | 5015940 | 10       |
|   | unsteril 800 ml                   | 60 cm         | 28306 | 5016017 | 10       |

| Urin-Beinbeutel   | Fassungsvermögen                  | Schlauchlänge | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|-----------------------------------|---------------|---------|---------|----------|
|  | HiMiV: 15.25.05.1009   Latex-frei |               |         |         |          |
|   | Schlauchansatz schräg             |               |         |         |          |
|   | unsteril 500 ml                   | 7 cm          | 4423500 | 4796800 | 100      |
|   | HiMiV: 15.25.05.1010   Latex-frei |               |         |         |          |
| Schlauchansatz gerade   |                                   |               |         |         |          |
| unsteril 500 ml   | 7 cm                              | 4423526       | 4476254 | 100     |          |

# Urimed® Fix | Urimed® Fix spezial

Die zuverlässige und bequeme Fixierung für Urin-Beinbeutel am Ober- und Unterschenkel

- Besonders leichte Handhabung
- Zuverlässiger Sitz durch integrierte Elasthanfäden
- Waschbar bei 60° C

Urimed® Fix hat eine speziell eingearbeitete Tasche für den Beinbeutel. Da der direkte Kontakt zwischen Beinbeutel und Haut vermieden wird, ist das System besonders hautfreundlich.



## Urimed® Fix



| Beschreibung                      | Beinumfang | REF   | PZN     | VE (St.) |
|-----------------------------------|------------|-------|---------|----------|
| HiMiV: 15.99.99.0008   Latex-frei |            |       |         |          |
| ● klein                           | bis 50 cm  | 28090 | 7614662 | 5        |
| ● medium                          | bis 80 cm  | 28091 | 7614679 | 5        |

## Urimed® Fix spezial



| Beschreibung                      | Beinumfang    | REF   | PZN     | VE (St.) |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------|----------|
| HiMiV: 15.99.99.0009   Latex-frei |               |       |         |          |
| ● klein                           | 30 bis 50 cm  | 28092 | 0853228 | 5        |
| ● mittel                          | 45 bis 65 cm  | 28093 | 0853234 | 5        |
| ● groß                            | 55 bis 85 cm  | 28094 | 0853240 | 5        |
| ● extra groß                      | 75 bis 105 cm | 28097 | 0853257 | 5        |

Urimed® Fix spezial auch für 800 ml Beinbeutel

# Urimed® Strap

Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln

- Einfache Fixierung am Ober- bzw. Unterschenkel
- Ermöglicht ein bequemes und unauffälliges Tragen des Beinbeutels



| Urimed® Strap | Beschreibung  | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---------------|---|-------|---------|----------|
|               | HiMiV: 15.99.99.0008   Latex-frei   PVC-frei                        |       |         |          |
|               | Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel | 68551 | 4642557 | 2        |



# Medicare® Bettbeutel | Urinbeutel

Mit Rücklaufsperrre und Ablassventil

- Zur Vermeidung eines Urin-Rückflusses sind alle Bettbeutel mit einem Antirefluxventil versehen
- Das Ablassventil ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung



| Medicare® Bettbeutel  | Beschreibung   | Fassungsvermögen                  | REF              | PZN     | VE (St.) |          |
|---|--|-----------------------------------|------------------|---------|----------|----------|
| ContineceCare<br>Schiebehahn<br> | HiMiV: 15.25.06.1004   Latex-frei  |                                   |                  |         |          |          |
|   | unsteril   |                                   |                  |         |          |          |
|   | 90 cm  | 2.000 ml                          | 28114            | 0728658 | 10       |          |
|   | 120 cm   | 2.000 ml                          | 28216            | 0853263 | 10       |          |
|                                  | HiMiV: 15.25.06.3000   Latex-frei  |                                   |                  |         |          |          |
|   | einzel steril verpackt   |                                   |                  |         |          |          |
|   | 90 cm  | 2.000 ml                          | 28115            | 0732223 | 10       |          |
| Urinbeutel  | Beschreibung   | Fassungsvermögen                  | REF              | PZN     | VE (St.) |          |
| Uromedical<br>Schiebehahn<br>    | Latex-frei   |                                   |                  |         |          |          |
|   | steril./mit EO behandelt   |                                   |                  |         |          |          |
|   | 90 cm  | 2.000 ml                          | 4425219          | 4847503 | 150      |          |
|   | einzel steril verpackt   |                                   |                  |         |          |          |
|                                  | 90 cm  | 2.000 ml                          | 4425251          | 4847526 | 75       |          |
|   | Urinbeutel   | Beschreibung                      | Fassungsvermögen | REF     | PZN      | VE (St.) |
|   | Uromedical<br>Push-Pull<br> | HiMiV: 15.25.06.1009   Latex-frei |                  |         |          |          |
| unsteril  |  |                                   |                  |         |          |          |
| 90 cm   |  | 1.500 ml                          | 4423259          | 3063194 | 200      |          |
| HiMiV: 15.25.06.1010   Latex-frei   |  |                                   |                  |         |          |          |
| steril./mit EO behandelt  |  |                                   |                  |         |          |          |
| 90 cm   | 2.000 ml   | 4425022                           | 2751957          | 200     |          |          |



# Sekretbeutel

Ohne Rücklaufsperrung und Ablassventil

- Schlauchlänge 90 cm
- Ohne Ablauf



## Sekretbeutel



| Beschreibung   | Fassungsvermögen | REF     | PZN     | VE (St.) |
|--|------------------|---------|---------|----------|
| HiMiV: 15.25.06.0004   Latex-frei<br>unsteril                | 1.500 ml         | 4421167 | 4476248 | 250      |
| HiMiV: 15.25.06.0008   Latex-frei<br>unsteril                | 2.000 ml         | 4425103 | 4796792 | 250      |
| HiMiV: 15.25.06.2000   Latex-frei<br>einzeln steril verpackt | 1.500 ml         | 4423151 | 2733267 | 100      |
| HiMiV: 15.25.06.2001   Latex-frei<br>einzeln steril verpackt | 2.000 ml         | 4423208 | 2711550 | 100      |
| Latex-frei<br>steril./mit EO behandelt                       | 1.500 ml         | 4425154 | 2733244 | 250      |
| steril./mit EO behandelt                                     | 2.000 ml         | 4425200 | 2733250 | 250      |

## mit Lock-Ansatz (männlich)



|                                       |          |         |         |     |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|-----|
| Latex-frei<br>einzeln steril verpackt | 2.000 ml | 4462009 | 4847495 | 100 |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|-----|

# Urinocol® für Kinder

Urinauffangbeutel mit und ohne Ablauf

## Der Beutel


Die PVC-freie Beutelfolie ermöglicht die ständige Kontrolle des Urins

## Die Schutzfolie

Besseres Abziehen und Anbringen des Beutels durch Zweiteilung der Schutzfolie

## Die Klebefläche


- Ohne Latex
- Geringere Hautirritationen
- Bessere Klebeeigenschaft

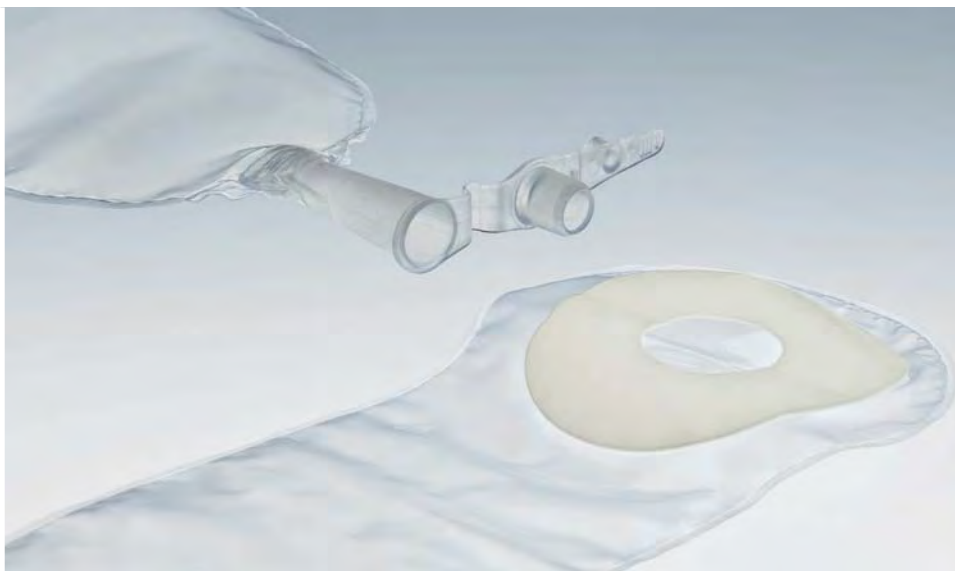


| Urinocol® für Kinder  | Beschreibung                                     | Fassungsvermögen   | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---|--|--------------------|--------|---------|----------|
| Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf<br>  | HiMiV: 15.25.04.3009  <br>einzel steril verpackt | PVC-frei<br>100 ml | 227550 | 4647230 | 100      |
| Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf<br>  | HiMiV: 15.25.04.3010  <br>einzel steril verpackt | PVC-frei<br>100 ml | 227560 | 4648175 | 100      |
| Urin-Auffangbeutel mit Ablauf<br>   | HiMiV: 15.25.04.3009<br>einzel steril verpackt   | 100 ml             | 227546 | 4648181 | 50       |
| Urin-Auffangbeutel mit Ablauf<br>   | HiMiV: 15.25.04.3010<br>einzel steril verpackt   | 100 ml             | 227566 | 4648212 | 50       |

## Das Auslassventil

- Verbindung mit allen handelsüblichen Beuteln
- Leichter und sicherer Verschluss
- Probenentnahme mit Spritze durch speziellen Aufsatz

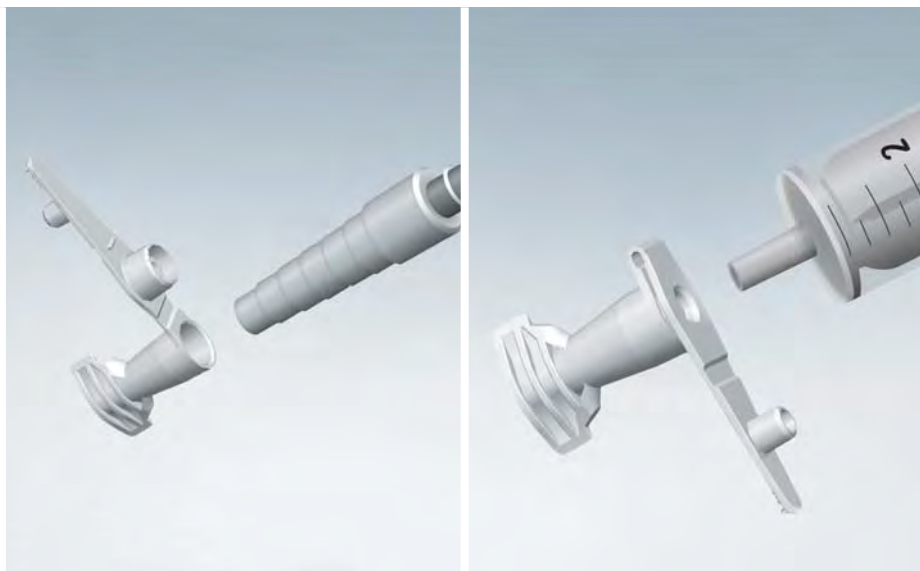

| Urinocol® für Frühgeborene    | Beschreibung            | Fassungsvermögen | REF    | PZN     | VE (St.) |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------|---------|----------|
| Urin-Auffangbeutel mit Ablauf |                         |                  |        |         |          |
|                               | einzeln steril verpackt | 100 ml           | 227571 | 4648229 | 50       |

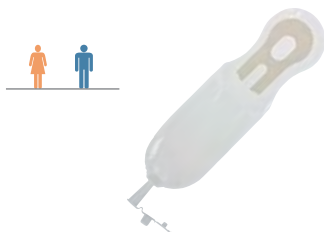

| Urinbeutel für Kinder          | Beschreibung   | Fassungsvermögen | REF     | PZN     | VE (St.) |
|--------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf | HiMiV: 15.25.04.3007   Latex-frei   PVC-frei<br>unsteril | 100 ml           | 4423038 | 4476277 | 10       |



|   |        |         |         |    |
|---|--------|---------|---------|----|
| HiMiV: 15.25.04.3008   Latex-frei   PVC-frei<br>einzeln steril verpackt | 100 ml | 4425030 | 3201354 | 10 |
|---|--------|---------|---------|----|

|  |        |         |         |    |
|--|--------|---------|---------|----|
| HiMiV: 15.25.04.3003   Latex-frei   PVC-frei<br>mit Antirefluxventil<br>unsteril | 100 ml | 4423135 | 2711567 | 10 |
|--|--------|---------|---------|----|

# Uriplus®

## Hautsympathische, waschbare Krankenpflege-Unterlagen

Um auch im Liegen einen optimalen Hautschutz zu gewährleisten, sollten Krankenpflegeunterlagen wie Uriplus® verwendet werden. Der eingearbeitete Saugkern unterstützt durch seine hohe Saugfähigkeit eine Dekubitusprophylaxe. Auf herkömmliche Bettschutzauflagen wie Gummituch oder Stecklaken kann verzichtet werden. Da die Unterlagen je nach Beanspruchung 200–300 mal waschbar sind, werden Müllaufkommen und dadurch entstehende Kosten minimiert.

Waschtemperatur: 60°– 90° C

Trocknertemperatur: bis 75° C



### Uriplus®



| Größe   | Saugkapazität | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---|---------------|-------|---------|----------|
| HiMiV: 19.40.05.2043   Pfl. HiMiV: 51.40.01.4072   Latex-frei |               |       |         |          |
| groß 85 x 90 cm   | 1 Liter       | 28230 | 3417835 | 1        |

|   |           |       |         |   |
|---|-----------|-------|---------|---|
| HiMiV: 19.40.05.1022   Pfl. HiMiV: 51.40.01.4073   Latex-frei |           |       |         |   |
| mittel 60 x 85 cm   | 0,7 Liter | 28231 | 3417841 | 1 |

### mit Stoffstreifen zum Einstecken



|   |         |       |         |   |
|---|---------|-------|---------|---|
| HiMiV: 19.40.05.2042   Pfl. HiMiV: 51.40.01.4071   Latex-frei |         |       |         |   |
| groß 85 x 90 cm   | 1 Liter | 28030 | 3878619 | 1 |

| Materialien          | Uriplus®                          |
|----------------------|-----------------------------------|
| Obermaterial (weiß)  | 100% gebürstetes Polyester-Gewebe |
| Saugkern             | 95% Polyester, 5% Viskose         |
| Untermaterial (grün) | rutschfest                        |





## Uriplus® light



| Größe   | Saugkapazität | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---|---------------|-------|---------|----------|
| HiMiV: 19.40.05.2044   Pfl. HiMiV: 51.40.01.4074   Latex-frei |               |       |         |          |
| groß 85 x 90 cm   | 0,8 Liter     | 28060 | 0777533 | 20       |

| Materialien          | Uriplus® light                    |
|----------------------|-----------------------------------|
| Obermaterial (weiß)  | 100% gebürstetes Polyester-Gewebe |
| Saugkern             | 95% Polyester, 5% Viskose         |
| Untermaterial (grün) | rutschfest                        |

# Irrimatic R

Elektrische Irrigationspumpe im Set zur rektalen Darmspülung

Unwillkürlicher Stuhlgang ist eine weit verbreitete Form der Inkontinenz und für die Betroffenen mit einer nicht unerheblichen Minderung der Lebensqualität verbunden. Die rektale Irrigation mit der Irrimatic R stellt eine einfache sowie gleichermaßen überzeugende Möglichkeit der gezielt gesteuerten Darmentleerung dar. Der Darm wird mit individuell einstellbarem und konstantem Druck gespült, so dass anschließend eine ausscheidungsfreie Zeit von bis zu 48 Stunden erreicht werden kann. Dies ermöglicht den Betroffenen wieder die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.



## Irrimatic R



### Beschreibung

HiMiV: 03.36.01.2001

Irrigationspumpe inkl. Zubehör

- Netzadapter, Akku
- Überleitungsschlauch mit Konus
- Rektalkatheter Ch. 20 mit Konus
- ViaGel Gleithilfe, 3 ml
- Handschuhe (Latex-frei)

REF

PZN

VE (St.)

25075

1215866

1

### Zubehör/Ersatzteile

Schlauchsystem mit Konus

25057

0059766

1

Netzadapter

25056

0060054

1

Ratgeber W91058

Unseren Ratgeber über die Möglichkeiten der Darmspülung bei Stuhlinkontinenz können Sie kostenfrei unter der Artikel-Nummer W91058 bei uns anfordern.



# Biotrol® Collector I.F.

## Fäkalkollektor mit Ablass

Der Biotrol® Collector I.F. vereinfacht die Pflege bei immobilen und bettlägerigen Patienten, die von einer Stuhlinkontinenz betroffen sind. Das Produkt kann 24 Stunden auf der Haut verbleiben, wobei ein spezielles Beutelmateriale Gerüche vermeidet. Es entstehen somit keine Hautreizungen durch Stuhl. Der Biotrol® Collector I.F. ist mit Sekretbeuteln kombinierbar.



### Biotrol® Collector I.F.

#### Beschreibung

#### REF

#### PZN

#### VE (St.)

HiMiV: 15.25.10.0003 | Latex-frei | PVC-frei

Volumen 950 ml (inkl. 10 Adapter)

H04001

8768545

10



# Softima® Uro Silk

## Versorgungsbeutel für die Urostomieversorgung

Bei einteiligen Versorgungssystemen sind Hautschutzplatte und Urostomiebeutel fest miteinander verbunden. Der Beutel ist mit einer Rückflusssperre und einem Auslasssystem ausgestattet. Urostomiebeutel werden bei entsprechender Füllmenge (max. die Hälfte des Beutelvolumens) entleert.

- Komplette urinresistenter Hautschutz im Flower-Design für optimale Anpassung
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Innovatives Auslasssystem
- Kein Schlauchabknicken durch 360° Drehung des Konnektors
- Enthält einen Konnektor pro Beutel



| Softima® Uro Silk | Farbe   | Lochgröße  | REF   | PZN     | VE (St.) |
|-------------------|---|------------|-------|---------|----------|
| Softima® Uro Silk | HiMiV: 29.26.03.2036   FB: 26.26.03.2   Latex-frei   PVC-frei |            |       |         |          |
|                   | hautfarben  | ≈ 12–55 mm | 43914 | 0607185 | 20       |
|                   | transparent   | ≈ 12–55 mm | 43913 | 0607179 | 20       |



Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln

| Softima® Uro Silk konvex | HiMiV: 29.26.03.3010   FB: 29.26.03.3   Latex-frei   PVC-frei |
|--------------------------|---|
| hautfarben               | ≈ 12–25 mm   43916   2922755   10                             |
| hautfarben               | ≈ 12–35 mm   43919   2927095   10                             |
| hautfarben               | 25 mm   43921   2946187   10                                  |
| hautfarben               | 30 mm   43923   2946193   10                                  |
| transparent              | ≈ 12–25 mm   43915   2924955   10                             |
| transparent              | ≈ 12–35 mm   43917   2946023   10                             |
| transparent              | 25 mm   43920   2946247   10                                  |
| transparent              | 30 mm   43922   2946253   10                                  |




Inkl. 10 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



# Softima® Uro

## Einteilige Urostomiebeutel

- Versorgungsbeutel mit harnresistentem, flexiblem Hautschutzing und mikroporöser Klebefläche
- Rückflusssperre
- Innovatives Auslasssystem
- Rückseite mit weichem Schutzvlies
- Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln

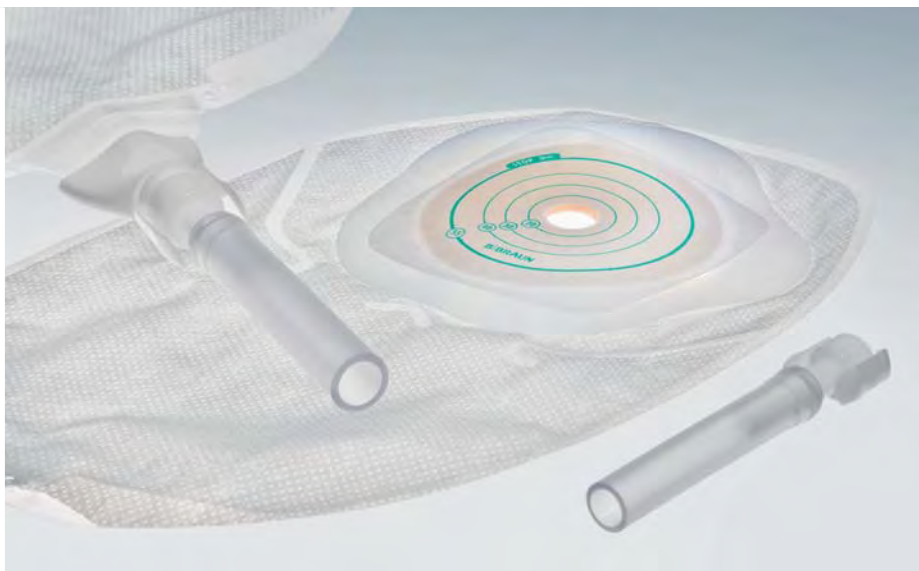

| Softima® Uro | Farbe                | Lochgröße      | REF                   | PZN     | VE (St.) |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------|----------|
| Softima® Uro | HiMiV: 29.26.03.2024 | FB: 29.26.03.2 | Latex-frei   PVC-frei |         |          |
|              | transparent          | ∅ 12–55 mm     | 43912                 | 4128406 | 20       |

Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln




# Almarys® Twin+ Basisplatten | Gürtel

## Zweiteilige Systeme




Zweiteilige Systeme bestehen aus einer separaten Basisplatte und dazu passenden Versorgungsbeuteln. Die Beutel werden mithilfe eines Rastring- oder Klebesystems mit den Platten verbunden. Die Basisplatte kann mehrere Tage auf der Haut verbleiben, gewechselt wird nur der Beutel. Dies schont die Haut und ist einfach in der Handhabung.

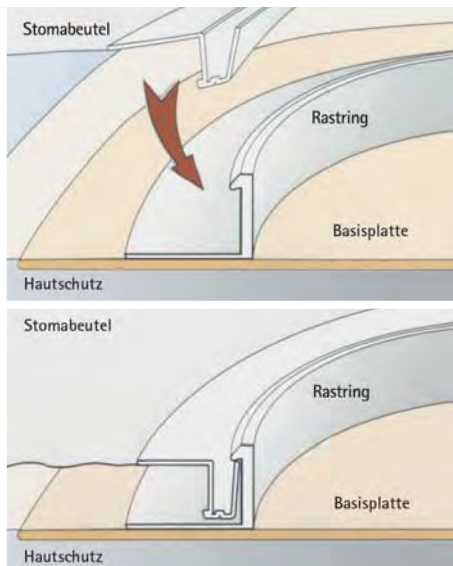- Maximale Sicherheit, Tragekomfort und Diskretion
- Einfache und zuverlässige Handhabung
- Optimale Anpassung durch Flower-Design



Die innovative Lockring 2-Sicherheitsverriegelung bietet doppelte Sicherheit:


- Der Versorgungsbeutel rastet hörbar durch ein „Klick“ auf der Basisplatte ein.
- Durch den Sicherheitsriegel der Basisplatte wird der Versorgungsbeutel mit einem zweiten „Klick“ zusätzlich gesichert.

| Almarys® Twin+  | Lochgröße bzw. Farbe   | Ringgröße             | REF   | PZN     | VE (St.) |
|---|--|-----------------------|-------|---------|----------|
| Almarys® Twin+ Basis plan   | HiMiV: 29.26.05.0101   FB: 29.26.05.0  | Latex-frei   PVC-frei |       |         |          |
|  | ∅ < 15–35 mm   | 40 mm                 | 36240 | 2297211 | 10       |
|   | ∅ < 15–45 mm   | 50 mm                 | 36250 | 2297228 | 10       |
|   | HiMiV: 29.26.05.1054   FB: 29.26.05.1  | Latex-frei   PVC-frei |       |         |          |
|   | ∅ < 15–55 mm   | 60 mm                 | 36260 | 2297234 | 10       |
| Almarys® Twin+ Basis konvex   | HiMiV: 29.26.06.0042   FB: 29.26.06.0  | Latex-frei   PVC-frei |       |         |          |
|  | 17 mm  | 40 mm                 | 36342 | 2297004 | 5        |
|   | 20 mm  | 40 mm                 | 36343 | 2297091 | 5        |
|   | 24 mm  | 50 mm                 | 36351 | 2297116 | 5        |
|   | 27 mm  | 50 mm                 | 36352 | 2297122 | 5        |
|   | 30 mm  | 50 mm                 | 36353 | 2296789 | 5        |
|   | ∅ < 17–30 mm   | 50 mm                 | 36355 | 2296795 | 5        |
| Almarys® Twin+ Gürtel   | HiMiV: 29.26.11.0021   FB: 29.26.11.0  |                       |       |         |          |
|  | weiß   | –                     | 5028  | 0433331 | 1        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elastisches Material</li> <li>▪ In der Länge verstellbar 60-110 cm (ungedehnt)</li> <li>▪ Passend für plane und konvexe Basisplatten</li> </ul> |                       |       |         |          |

# Almarys® Twin+ Uro

Zweiteilige Versorgungsbeutel für Tag und Nacht

- Versorgungsbeutel mit Rückflusssperre
- Innovatives Auslasssystem
- Rückseite mit weichem Schutzvlies
- Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln

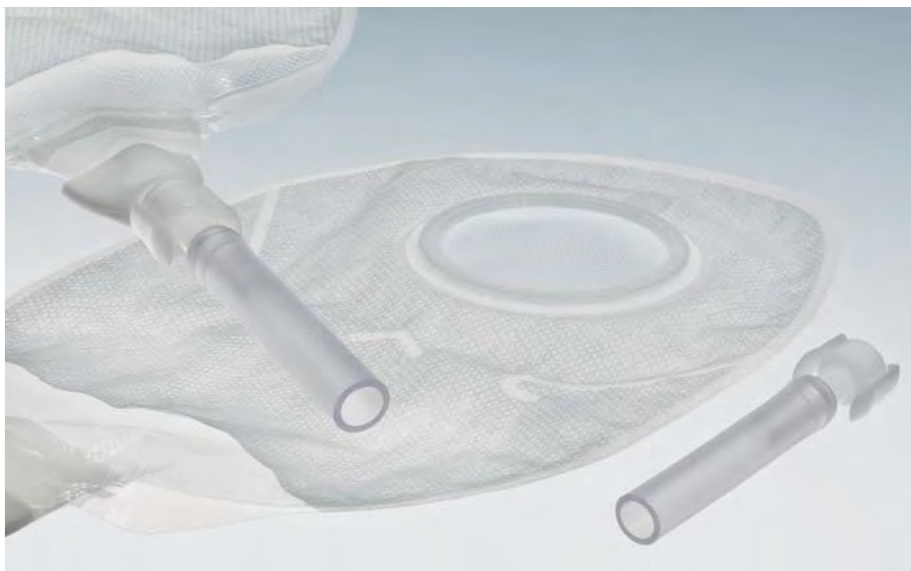

| Almarys® Twin+ Uro | Farbe   | Ringgröße | REF   | PZN     | VE (St.) |
|--------------------|---|-----------|-------|---------|----------|
| Almarys® Twin+ Uro | HiMiV: 29.26.03.0029   FB: 29.26.03.0   Latex-frei   PVC-frei |           |       |         |          |
|                    | transparent   | 40 mm     | 37940 | 4128197 | 20       |
|                    | transparent   | 50 mm     | 37950 | 4128205 | 20       |
|                    | transparent   | 60 mm     | 37960 | 4128211 | 20       |

Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



offen


geschlossen



# Urimed® Klett

Die sichere Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen

- Das atmungsaktive Pflaster haftet sicher, ohne die Haut zu reizen, und hinterlässt auch bei Langzeit-Fixierung und starker Transpiration keine Kleberückstände
- Eine Lagekorrektur ist durch Lösen der Klettverbindung mehrfach möglich

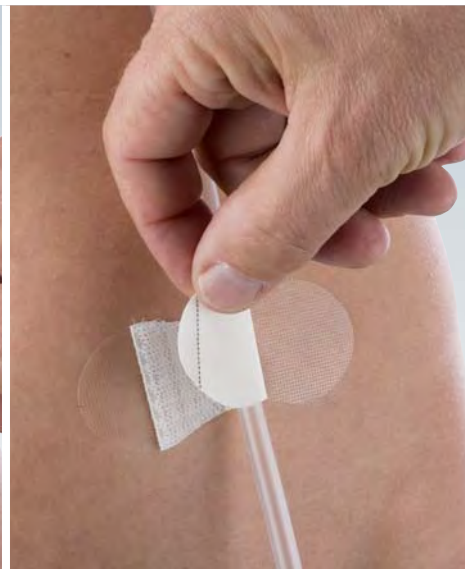

| Urimed® Klett | Beschreibung                                 | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---------------|--|--------|---------|----------|
| klein         | HiMiV: 15.99.99.0001   Latex-frei   PVC-frei |        |         |          |
|               | klein  | 28260  | 3501814 | 10       |
|               | klein   Vorratspackung                       | 282600 | 1466893 | 50       |




| Urimed® Klett | Beschreibung                                 | REF    | PZN     | VE (St.) |
|---------------|--|--------|---------|----------|
| groß          | HiMiV: 15.99.99.0001   Latex-frei   PVC-frei |        |         |          |
|               | groß   | 28261  | 3501820 | 10       |
|               | groß   Vorratspackung                        | 282610 | 1466901 | 50       |






# Urologisches Zubehör

Einfach und unersetzlich

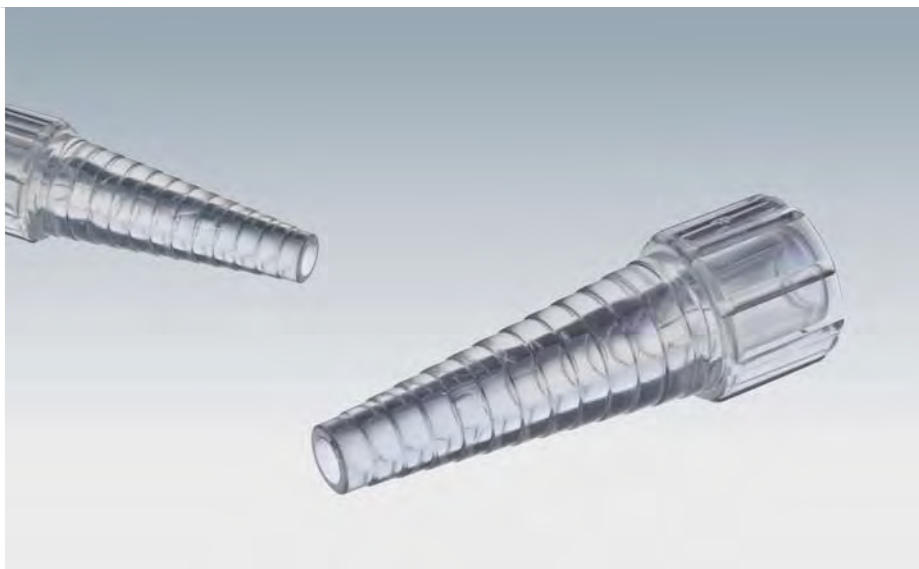Als Komplettanbieter für Urologie und Inkontinenzversorgung hat B. Braun alle relevanten Produkte im Programm, die für die tägliche Anwendung notwendig sind. So ist beispielsweise eine umfangreiche Auswahl an Adaptern und Verbindungsstücken erforderlich, um sichere Konnektionen zwischen unterschiedlichen Ansatzsystemen herzustellen und somit schnell und unkompliziert arbeiten zu können.




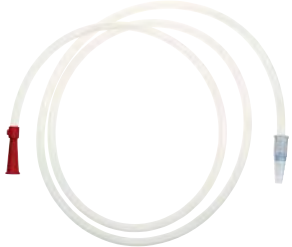
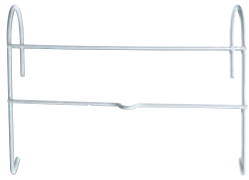
| Stufenkegel   | Beschreibung   | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|--|---------|---------|----------|
| mit Luer-Innenkegel   | steril   | 4896610 | 3200490 | 100      |
|  |  |         |         |          |
| mit Lock-Ansatz   | steril   weiblich  | 4896629 | 3400065 | 100      |
|  |  |         |         |          |
|   | steril   männlich  | 4896637 | 3400071 | 100      |
|  |  |         |         |          |
| Verbindungsstück  | Beschreibung   | REF     | PZN     | VE (St.) |
| Stufenkegel/Lock-Ansatz   | steril   weiblich<br>Schlauch innen $\varnothing$ 5 mm<br>Schlauchlänge 4 cm     | 4438450 | 3201242 | 100      |
|  |  |         |         |          |
| Trichteransatz, Ch. 15/Lock-Ansatz  | steril   männlich<br>Schlauch innen $\varnothing$ 3,5 mm<br>Schlauchlänge 1,5 cm | 4896645 | 7275390 | 50       |
|  |  |         |         |          |




# Urologisches Zubehör

Einfach und unersetzlich



| Verlängerungsleitung  | Beschreibung  | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|---|---------|---------|----------|
| Lock-Ansatz/Trichteransatz, Ch. 16  | steril   männlich<br>Schlauch innen $\varnothing$ 3,5 mm<br>Schlauchlänge 15 cm | 4438523 | 3390964 | 50       |
|  |   |         |         |          |
| Stufenkegel/Trichteransatz, Ch. 18  | steril<br>Schlauch innen $\varnothing$ 5 mm<br>Schlauchlänge 140 cm             | 4892496 | 3390970 | 50       |
|  |   |         |         |          |
| Aufhängevorrichtung für Urinbeutel  | Beschreibung  | REF     | PZN     | VE (St.) |
|   | HiMIV: 15.99.99.0009  | 4490029 | 1932987 | 100      |
|  |   |         |         |          |

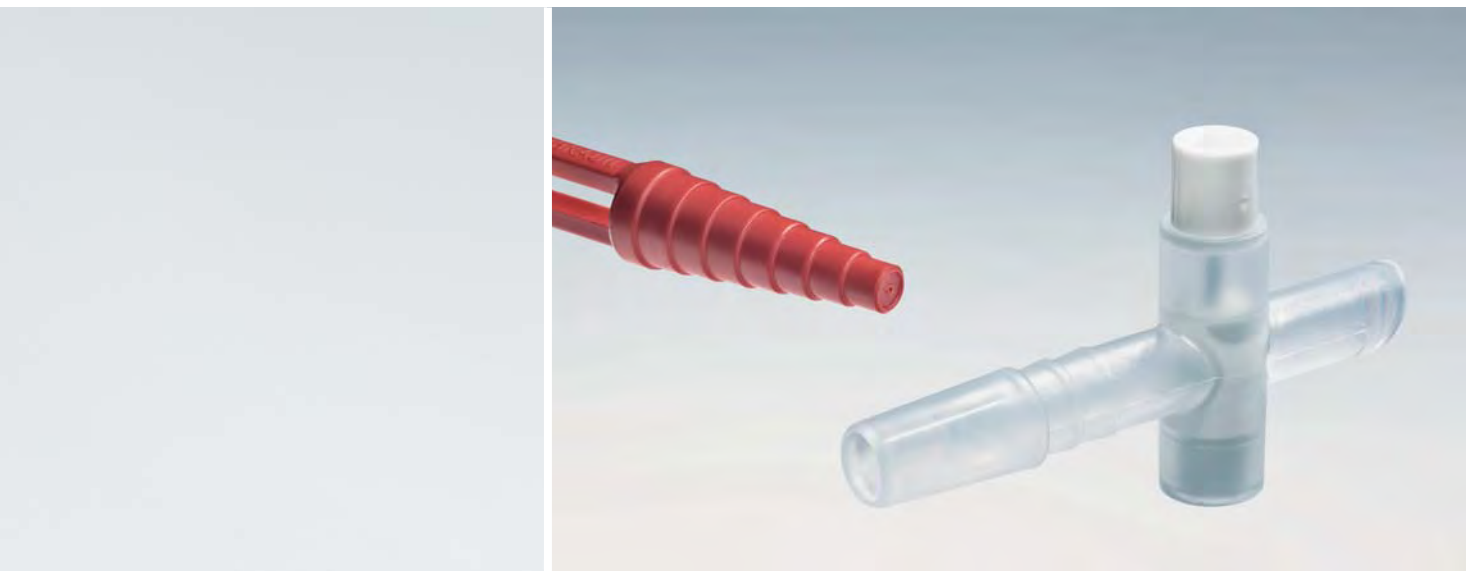

## Standardkegel

## Beschreibung

REF

PZN

VE (St.)

HiMiV: 15.99.99.0001 | Latex-frei | PVC-frei  
 einzeln steril verpackt

4438477

4847578

25

- Mit Ablassventil und Silikonschlauch
- Problemloser Abfluss
- Einfache Einhandbedienung



## Katheterstopfen

## Beschreibung

REF

PZN

VE (St.)

HiMiV: 15.99.99.0001  
 einzeln steril verpackt

4435001

3143898

50

Passend für alle gängigen Kathetergrößen



# Prontosan® C

## Lösung zur antimikrobiellen Reinigung von Kathetereintrittspforten

Prontosan® C kann bei Verwendung von allen handelsüblichen, transurethralen Kathetern eingesetzt werden:

- Dauerkatheter
  - Hydrophile Einmalkatheter
  - Einmalkatheter mit Gleitmittel
  - Standardkatheter ohne Beschichtung
- Gebrauchsfertig, praktisch und schnell zur Hand
  - Hervorragende Hautverträglichkeit
  - Schleimhäute trocknen nicht aus
  - Keine Irritationen, kein Brennen
  - Für den wiederholten und langfristigen Gebrauch



### Prontosan® C

#### Beschreibung

Sprühflasche

#### Größe

75 ml

#### REF

400420

#### PZN

1038542

#### VE (St.)

1

Vorratsflasche

500 ml

400425

3556614

1



#### Zusammensetzung:

Aqua, Undecylenamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide).  
8 Wochen nach Anbruch aufbrauchen.



Kompressen gut besprühen.



Mindestens 1 Minute einwirken lassen.  
Anschließend kann der Katheter eingeführt werden.  
Es muss nicht mit Wasser nachgespült werden.



### Askina® Mullkompressen

#### Beschreibung

8fach gelegt, steril

#### Größe

7,5 x 7,5 cm

#### REF

9031111

#### PZN

6874438

#### VE (St.)

5 x 2

8fach gelegt, steril

7,5 x 7,5 cm

9031219

6874473

25 x 2



Aus Verbandsmull mit eingeschlagenen Schnittkanten

100% Baumwolle | 100% chlorfrei gebleicht

DIN 61630 - VM 17, Ph.Eur.

# Softaskin® | Softa-Man® ViscoRub

Waschlotion | Händedesinfektionsmittel

Die tägliche Beanspruchung der Hände strapaziert die Haut, macht sie trocken und empfindlich.

B. Braun hat im Laufe der Jahre ein einfaches wie überzeugendes Konzept für die professionelle Händereinigung, Desinfektion und Pflege entwickelt und umgesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte gewährleisten so auch im Dauergebrauch ein besonders hohes Maß an Hautverträglichkeit.



## Softaskin®



### Beschreibung

Besonders milde, allergiegetestete Waschlotion

|                         | REF   | PZN     | VE (St.) |
|-------------------------|-------|---------|----------|
| 100 ml-Flasche          | 18611 | 8505610 | 1        |
| 500 ml-Spenderflasche   | 18613 | 8505627 | 1        |
| 1.000 ml-Spenderflasche | 18615 | 8505633 | 1        |
| 5 Liter-Kanister        | 18617 | 7377848 | 1        |

### Inhaltsstoffe:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Polyglyceryl-3-Caprate, Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen, Phenoxyethanol, Urea, Lauramine Oxide, Allantoin, Citric Acid, Parfüm.

## Softa-Man® ViscoRub



### Beschreibung

Allergenarmes Händedesinfektionsmittel mit einzigartiger, gelähnlicher Konsistenz

|                         | REF   | PZN     | VE (St.) |
|-------------------------|-------|---------|----------|
| 100 ml-Flasche          | 19158 | 1980466 | 1        |
| 500 ml-Spenderflasche   | 19159 | 1980561 | 1        |
| 1.000 ml-Spenderflasche | 19160 | 1981075 | 1        |
| 5 Liter-Kanister        | 19161 | 1981158 | 1        |

**Zusammensetzung:** 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g; **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-) alpha-Bisabolol. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile von Softa-Man® ViscoRub. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol; 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. **Stand der Information:** 05/2007. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

# Uro-Tainer®

## Gebrauchsfertige urologische Spüllösung

Uro-Tainer® – mit oder ohne Medikamentenzugang – besteht aus einem Beutel mit 100 ml steriler Lösung, einem biegsamen Schlauch mit einer Klemme sowie einem Universal-Verbinder. Das geschlossene System ermöglicht ein hygienisches Einführen und Auffangen der Lösung ohne zu öffnen bzw. Luftzufuhr.

- Hygienisch, da kein Kontakt mit der Lösung oder dem Harn erfolgt
- Unkomplizierte Handhabung, daher auch vom Patienten durchführbar
- Umbeutel ermöglicht eine problemlose Erwärmung der Lösung vor der Anwendung



### Uro-Tainer® M



| Beschreibung   | Inhalt | REF      | PZN     | VE (St.) |
|--|--------|----------|---------|----------|
| Uro-Tainer® M   mit Medikamentenzugabestutzen   nicht apothekenpflichtig |        |          |         |          |
| NaCl 0,9 % B. Braun  | 100 ml | FB 99853 | 3330028 | 10       |

Uro-Tainer® „M“ mit separatem Port für die sichere Zugabe von Arzneimitteln

#### Indikation:

Trägerlösung für Medikamente (Zytostatika, Antibiotika), die mittels Blaseninstillation verabreicht werden



**Uro-Tainer® Chlorhexidin****Wirkstoff:** Chlorhexidindiacetat**Zusammensetzung:** 100 ml Lösung  
Blasenspüllösung enthalten: *Arzneilich wirksame Bestandteile:* Chlorhexidindiacetat 0,02 g, *Sonstige Bestandteile:* Sorbitol 5,00 g, Eisessig 98%, Natriumacetat-Trihydrat, Wasser für Injektionszwecke**Anwendungsgebiete:** Uro-Tainer® Chlorhexidin ist geeignet zur Durchspülungstherapie der Blase bei Patienten mit Dauerkatheter zur unterstützenden Behandlung und Prophylaxe von Infekten

mit Chlorhexidin-empfindlichen Erregern.

**Gegenanzeigen:** Infektionen durch *Pseudomonas*, *Alcaligenes faecalis*, *Mycobacterium tuberculosis* und *Proteus mirabilis*, die auf Chlorhexidin nicht ansprechen. Bekannte Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile.**Nebenwirkungen:** Leichte und vorübergehende Schmerzen oder Reizungen sowie das Gefühl von Strangurie oder Harnbrennen können gelegentlich auftreten. Gelegentlich können lokale

Nebenwirkungen, vor allem Schmerzen an der Harnblase auftreten. Es gibt vereinzelt Berichte über systemische Überempfindlichkeitsreaktionen auf Chlorhexidin bis hin zum Schweregrad III mit den Symptomen: Juckreiz, Hautreaktionen (Erythem, Urticaria, Quaddeln im Gesicht) Flush, Schweißausbrüche, Atemnot, Zyanose, Blutdruckabfall, Schock, Krämpfe.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**B. Braun Melsungen AG,  
34209 Melsungen**Stand der Information:** Oktober 2010**Uro-Tainer®**

| Beschreibung  | Inhalt | REF     | PZN     | VE (St.) |
|---|--------|---------|---------|----------|
| Uro-Tainer® Chlorhexidin   mit Katheteranschluss   apothekenpflichtig |        |         |         |          |
| Chlorhexidin Lösung 0,02 %  | 100 ml | 9746200 | 3330034 | 10       |

**Indikation:**Verminderung von Bakterienwachstum in der Harnblase.  
Insbesondere bei Kontaminationen von *E. Coli* und *Klebsiella*

| Uro-Tainer®   mit Katheteranschluss   nicht apothekenpflichtig |        |          |         |    |
|--|--------|----------|---------|----|
| NaCl 0,9 % B. Braun  | 100 ml | FB 99833 | 3330011 | 10 |

**Indikation:**Die Lösung wird für die mechanische Spülwirkung gebraucht:  
Beseitigung von Geweberesten und Blutgerinnsel

## B. Braun StomaCare

Immer an Ihrer Seite

Die Diagnose Stoma ist ein Schicksalsschlag und meist mit einem langen Leidensweg oder einer schweren Erkrankung verbunden. In Deutschland geht man von rund 100 000 Menschen aus, die mit einem künstlichen Darmausgang leben.

Dennoch:

sanftere Operationsmethoden, eine kompetente Betreuung durch Ärzte und Stomatherapeuten und vor allem verlässliche, sichere Produkte ermöglichen es, mit einem künstlichen Darmausgang ein fast normales Leben zu führen.



### Sicherheit – ein wichtiger Aspekt

Sowohl der sichere Halt wie auch die diskrete Form der Versorgung geben den Betroffenen ein Gefühl der Sicherheit und ermöglichen so die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. B. Braun bietet hierfür eine große Auswahl an Produkten, um die optimale Lösung zu finden.

### Einfaches Handling – mehr Eigenständigkeit

Die Versorgung eines Stomas stellt für die Betroffenen eine große Herausforderung dar. Daher ist es wichtig, dass die Betroffenen die Versorgung ohne Schwierigkeiten erlernen können. B. Braun hat, basierend auf langer Erfahrung, die Systeme Softima®, Softima® Key und Almarys® Twin+ optimal auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt.

### Weitere Informationen

Gesamtkatalog StomaCare  
Nr. 9998631  
Anleitung Versorgungswechsel  
Nr. 9991304  
Ratgeber für Betroffene  
Kolostomie Nr. 9991221  
Ileostomie Nr. 9991203  
Urostomie Nr. 9991205  
Irrigation Nr. 9991202  
CD Irrigation Nr. W91042

### Fachwissen Website

[www.stomacare.bbraun.de](http://www.stomacare.bbraun.de)

## Versorgung chronischer Wunden

Befreit von Wunden – B. Braun WoundCare

Wundheilungsstörungen stellen ein erhebliches medizinisches und wirtschaftliches Problem dar. Wenn normale Wundheilungsmechanismen durch verschiedenste Grunderkrankungen behindert werden, kann sich bereits nach einem Bagateltrauma eine schlecht heilende Wunde entwickeln.

Es gilt der Grundsatz: Diagnostik vor Therapie.

### Feuchte Wundbehandlung

- Lindert Schmerzen
- Beschleunigt die Wundheilung



### Nur eine saubere Wunde heilt!

Voraussetzung jeder Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche, des Wundrandes, sowie der Wundumgebung. Wundbeläge und Biofilm stören die Mikrozirkulation. B. Braun bietet mit der Prontosan® Reihe eine Wundspüllösung und ein Wundgel für eine effektive und schonende Wundreinigung.

### Hydroaktive Wundauflagen

Hydroaktive Wundauflagen erzeugen ein physiologisches Wundmilieu, schaffen eine Keimbarriere, sind sanft und schmerzlos zu entfernen und sind verordnungsfähig. B. Braun bietet mit der Askina® Reihe hydroaktive Wundauflagen, individuell, phasengerecht, einfach und sicher.

### Weitere Informationen

Gesamtkatalog WoundCare  
Nr. 9993415

Erfolgreich therapieren –  
Fallbeispiele aus der Wundversorgung  
Nr. 9995783

Patientenratgeber Wundheilung  
Hilfe für Betroffene und Angehörige  
Nr. 9996817

### Fachwissen Website

[www.wundheilung.bbraun.de](http://www.wundheilung.bbraun.de)

## Desinfektion & Hygiene

### Grundlage Ihres Therapieerfolgs

Richtig eingesetzte Hygienemaßnahmen und ein sorgfältiges Hygieneregime tragen in hohem Maße zum Therapieerfolg bei. Insbesondere beim Umgang mit Kathetern ist ein funktionierendes Hygienemanagement von elementarer Bedeutung, das vor allen Dingen die korrekt durchgeführte Händehygiene berücksichtigen muss, aber auch die Bereiche Schleimhautantiseptik und Desinfektion von Konnektionsstellen umfasst.

B. Braun entwickelt, produziert und vertreibt seit Jahrzehnten hochwertige Produkte zur Umsetzung einer fachgerechten und professionellen Hygiene. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte gewährleisten auch im Dauergebrauch ein besonders hohes Maß an Haut- und Materialverträglichkeit.



Die Hände sind das wichtigste „Werkzeug“ ... zugleich aber auch Infektionsquelle Nummer eins. Eine korrekt durchgeführte Händedesinfektion und medizinische Einmalhandschuhe schützen wirksam vor der Übertragung von Mikroorganismen und bilden eine sichere Barriere vor Krankheitserregern.



#### Fachwissen Website

[www.hygiene.bbraun.de](http://www.hygiene.bbraun.de)



Wir machen mit!  
„AKTION Saubere Hände“

## Ernährung

### Gut ernährt bei Inkontinenz

Mehr als 5 Mio. Menschen in Deutschland leiden an einer behandlungs- oder versorgungsbedürftigen Inkontinenz. Inkontinenz tritt in allen Altersstufen auf, nimmt jedoch im Alter stark zu: Etwa 15% der Frauen und 8% der Männer, die das fünfundsiebzigste Lebensjahr überschritten haben, können davon betroffen sein.

Wenn Betroffene versuchen, durch Einschränkungen beim Essen oder Trinken die Inkontinenz zu beeinflussen, können sie leicht in einen Flüssigkeits- oder Nährstoffmangel geraten. Fehlende Flüssigkeit kann beispielsweise zu Hauttrockenheit und damit zu Wundheilungsstörungen führen. Fehlende Nährstoffe können unter anderem Obstipation, Organproblematiken oder allgemeine Antriebslosigkeit bewirken. Durch Multimorbiditäten sind ältere Personen hiervon häufiger betroffen als jüngere.



Für alle, die nicht mehr in der Lage sind, sich ausreichend zu ernähren, stehen heute verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Enterales oder parenterales Ernährung kann individuell auf die vorliegenden Bedürfnisse abgestimmt werden. Damit können der Ernährungszustand positiv beeinflusst, Schäden vermindert, die Lebensqualität erhöht und Behandlungskosten reduziert werden.

B. Braun unterstützt Sie bei der kompetenten und effektiven Ernährungstherapie. Wir bieten Ihnen mit Nutricomp®, ReNutrititioner® und Nutriflex® das gesamte Spektrum der oralen, enteralen und parenteralen Ernährungsprodukte. Darüber hinaus teilen wir gerne unser Wissen mit Ihnen und stellen Ihnen ein praxisnahes Servicepaket zur Verfügung.

#### Services

Vorschläge zur Erstellung von Ernährungsregimen, Erhebungsbögen, Handlungsanleitungen, BIA-Messung, wissenschaftliche Unterstützung u.v.m.

#### Seminare und Fortbildungsangebote

Expertenstandard Ernährungsmanagement, Ernährungsbeauftragter in der Pflege, Praxiskurse für enterale und parenterale Ernährung

#### Fachwissen Website

[www.ernaehrung.bbraun.de](http://www.ernaehrung.bbraun.de)



**Hotline (0 56 61) 71-33 99**

[www.inkontinenz.bbraun.de](http://www.inkontinenz.bbraun.de)

[www.training.bbraun.de](http://www.training.bbraun.de)

B. Braun Melsungen AG | OPM | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

B. 05.10.11/2 Nr. 9998594 Stand: 11/2011