

## **URGOSTART TUEL 15X20CM**

### **URGOSTART Tül 15x20 cm**

PZN: 09722806

Inhalt: 5 St

Hersteller: Urgo GmbH

### **Zweckbestimmung**

UrgoStart Tül wird angewendet zur Abdeckung und Behandlung folgender Hautwunden: - Unterschenkelulzera. - Diabetische Fußulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung, wiederkehrende Wunden oder Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung. UrgoStart Tül ist auch zur Anwendung bei Wunden an schwierigen Lokalisationen (z.B. im Bereich von Zehen und Fingern einschließlich Zwischenräumen und Gelenken) oder bei Hohlraumwunden, Wundhöhlen oder tiefen Wunden geeignet. UrgoStart Tül kann auch zum Tamponieren tiefer Wunden eingesetzt werden. UrgoStart Tül ist zur Anwendung bei Wunden bestimmt, die größtenteils von Granulationsgewebe (rötliches Gewebe im Wundbett) bedeckt sind.

### **Zusammensetzung**

UrgoStart Tül besteht aus einem Polyesterfasergitter, das mit der TLC-NOSF-Technologie (Lipidokolloid-Technologie - Nano-Oligo-Saccharid-Faktor) beschichtet ist. Die TLC-NOSF-Technologie besteht aus flüssigem Paraffin, Natriumcarboxymethylcellulose (CMC), Kalium-Sucrose-Octasulfat (Nano-Oligosaccharidfactor) und Polymeren.