



Manuelle Desinfektion & Reinigung

ORANGE SOLVENT

Spezialreiniger für die Flächenreinigung von Medizinprodukten

- Aus natürlichem Orangenöl
- Mit besonderer Reinigungskraft
- Entfernt mühelos Rückstände aller Art

Produktbeschreibung

ORANGE SOLVENT ist eine gebrauchsfertige Reinigungslösung zur gründlichen Entfernung von hartnäckigen Rückständen auf medizinischen und dentalmedizinischen Instrumenten und Inventar. Auch zur Entfernung von Kleberesten, Permanentmarkern, sowie Streifen auf Fußböden. Sparsam in der Anwendung.

Anwendungsgebiete

Leichtes Ablösen von lästigen Aufklebern und alten Etiketten nach kurzer Einwirkzeit und leichte Entfernung der Klebereste.

- Für die weitgehende Entfernung von Jodflecken und anderen Farbsignalflecken.
- Zum Entfernen von lästigen Streifen und Striemen auf PVC- und Linoleum-Böden wie sie z.B. von Bettenrollen verursacht werden.
- Zur Reinigung von Zinkleim- und Gipsverbänden.
- Zur Entfernung von Alginat- und Zementresten sowie Zink-Eugenolflecken.
- Löst ölige Flecken aus Kleidung, Teppichen und Polstern.

Anwendung

ORANGE SOLVENT auf ein Wischtuch oder Einwegtuch geben und die zu behandelnden Flächen einreiben.

Anwendungshinweise:

Nicht bei allen Kunststoffen, insbesondere bei amorphen Thermoplasten wie Acrylglas oder Polycarbonaten, ist die Materialverträglichkeit garantiert. Unbedingt vor Erstanwendung an nicht einsehbaren Stellen die Verträglichkeit überprüfen.

Zusammensetzung

Citrus Sinensis Peel Extract, Limonene, Decyl Oleate.

Materialverträglichkeit:

Achtung: Nicht bei allen Kunststoffen, insbesondere bei amorphen Thermoplasten wie Acrylglas oder Polycarbonaten, ist die Materialverträglichkeit garantiert. Unbedingt vor Erstanwendung an nicht einsehbaren Stellen die Verträglichkeit überprüfen.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.** **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.



| Produkt | Gebinde | Inhalt | VE | Art. Nr. | PZN |
|----------------|---------|--------|----|-------------|----------|
| ORANGE SOLVENT | Flasche | 250ml | 9 | 00-805-0025 | 00792320 |
| | Flasche | 500ml | 6 | 00-805-005 | 00792337 |

