


kliniderm® **debride**

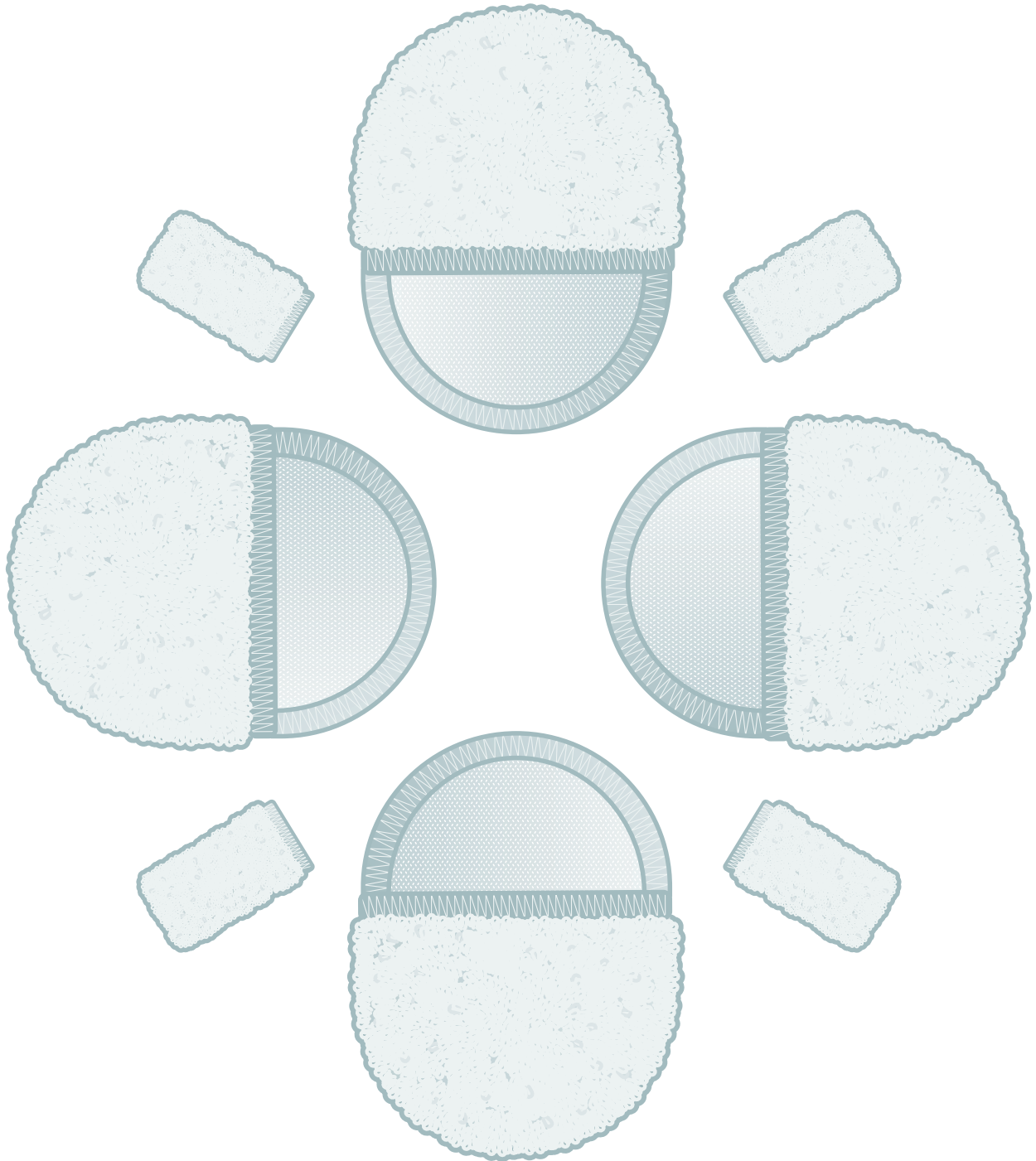

Sanft • Effektiv • Sicher

kliniderm® debride

Kliniderm® umfasst fortschrittliche Produkte von Klinion - einer bekannten Marke für Wundversorgung. Die Marke kliniderm® steht für qualitativ hochwertige und innovative Produkte mit hohem Anwendungskomfort.

Kliniderm® debride-Produkte eignen sich für die schnelle, sichere mechanische Wundreinigung, entfernen Exsudat, Zelltrümmer und Keratosen aus der Wunde und schonen dabei intaktes Gewebe. Kliniderm® debride pocket in Fingerlingform eignet sich für kleinere, oberflächliche Wunden, schwer zugängliche Stellen oder wenn eine besonders feinfühlig, kontrollierte Druckausübung bei der Anwendung erforderlich ist.

Indikationen

Kliniderm® debride eignet sich zur Behandlung von oberflächlichen, akuten und chronischen Wunden und der umgebenden Haut folgender Wunden:

- Diabetische Fußgeschwüre
- Arterielle und venöse Geschwüre
- Druckgeschwüre
- Post-operative Wunden
- Risswunden und Abschürfungen
- Verbrennungen und Verbrühungen
- Lymphödeme
- Devitalisiertes Gewebe

Kliniderm® debride reinigt starkt, bindet effektiv Bakterien und entfernt in hohem Maß Biofilme. Es ermöglicht eine schonende Wundreinigung ohne Gewebeerirritation bei sanfter und feinfühlig Anwendung.


Anwendungshinweise

Kliniderm® debride (pad) und kliniderm® debride pocket können in Abhängigkeit von der Wundgröße gleichartig verwendet werden. Das Taschenformat (Pocket) wird zur Reinigung kleiner oberflächlicher Wunden empfohlen, oder wenn eine feinfühlig, kontrollierte Druckausübung bei der Anwendung erforderlich ist. Das Pad eignet sich dagegen für die Behandlung großer oberflächlicher Wunden. Kliniderm® Debride lässt sich am besten wie folgt auftragen:

1. Kliniderm® mit ca. 50-60 ml Wundreinigungslösung tränken.
 2. Mit leichtem Druck mit der angefeuchteten Seite in kreisenden Bewegungen über die Wunde wischen.
-

Sanft, effizient reinigend

Die mechanische Wundreinigung ist eine effiziente Methode Zelltrümmer, devitalisiertes Gewebe und Keratose aus der Wunde zu entfernen. Das Kissen mit geschlungenen Monofilament-Polyester-Mikrofasern kann anstelle von herkömmlichen Kompressen verwendet werden, um die Wunde effektiv zu reinigen.

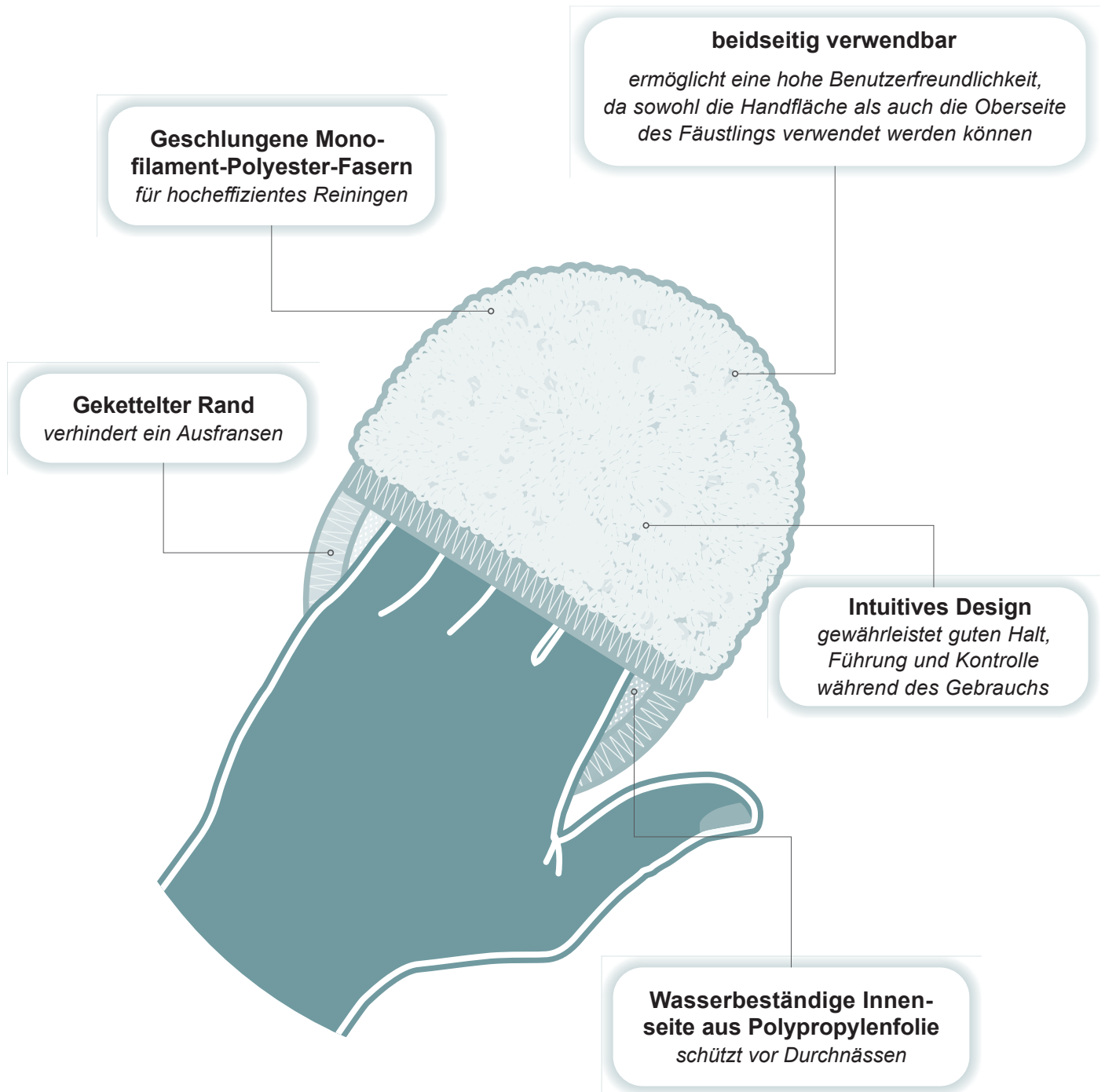

Sichere, hocheffektive und schnelle mechanische Wundreinigung



Sanfte Monofilamentschlingen
Helfen, Schmerzen zu minimieren und schont intaktes Gewebe



Haptisch sanfte Anwendung
Ermöglicht einen kontrolliert dosierten Druck



Exsudat absorbierend
Ermöglicht eine effektive mechanische Wundreinigung



In Fingergröße erhältlich
Wenn eine besonders feinfühlige, kontrollierte Druckausübung erforderlich ist



Reinigend
Zur Entfernung von Biofilm und Bakterien aus der Wunde



Intuitives Design
Ermöglicht die beidseitige Nutzung des Pads



| Produkt | Größe | Stück / Pkg | Pkg / Karton | REF | PZN |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| kliniderm® debride | 14 x 10 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 1800 | 18365558 |
| kliniderm® debride pocket | 8 x 4 cm | 5 x 1 | 12 | 4051 1801 | 18365564 |

Vertrieb | eu-medical GmbH
Bärensteiner Str. 27-29 | D-01277 Dresden
info@eu-medical.de | www.eu-medical.de
Tel. +49 (0) 351 470 25 60



Hersteller | Medeco B.V.
Brandpuntlaan Zuid 14
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands



www.medeco.org