

## Materialzusammensetzung

### Binamed® Shirt, Leggings:

43% Modal, 48% Silbergarn

2% Lycra, 7% Polyamid

100% Silber auf der hautzugewendeten Seite

### Binamed® Handschuhe, Socken, Stulpen:

79% Modal, 14% Silbergarn

7% Lycra

100% Silber auf der hautzugewendeten Seite

## Pflegehinweise Binamed® Spezialtextilien



Beim Waschen von Binamed® Spezialtextilien stets Feinwaschmittel verwenden, wenn möglich ohne Duft u. Parfümstoffe und auf eine maximale Temperatur von 60° C achten. Eine höhere Temperatur ist aufgrund der antibakteriellen Eigenschaften der Spezialtextilien nicht notwendig. Keinesfalls Desinfektionsmittel, chlorhaltige Reiniger oder Weichspüler verwenden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden/Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.



Binamed® Spezialtextilien dürfen nicht gebleicht werden und nicht mit Chlor in Verbindung gebracht werden. Die Silberbeschichtung wird durch Chlor beschädigt und verliert ihre Funktion.



Binamed® Spezialtextilien unter keinen Umständen im Wäschetrockner behandeln, da die empfindliche Oberfläche der Spezialtextilien im direkten Kontakt mit der Hitze zerstört werden kann.



Binamed® Spezialtextilien stets nur lauwarm und ohne Dampf bügeln, die empfindliche Oberfläche der Spezialtextilien wird durch direkten Kontakt mit Hitze zerstört.



Nicht chemisch reinigen.

## Wichtige Hinweise zum Produkt

- Binamed® Spezialtextilien vor dem ersten Tragen waschen.
- Die Etiketten von Binamed® Spezialtextilien sind zur Vermeidung von Scheuerstellen außen am Produkt angebracht.
- Binamed® Spezialtextilien dürfen nie in direkten Kontakt mit elektrischen Geräten, insbesondere elektrischen Wärmequellen (z. B. Heizdecke, Fön, Haartrockner etc.) gebracht werden, da Silber Wärme und Elektrizität sehr gut leitet.
- Binamed® Spezialtextilien dürfen im nassen Zustand nicht mit Metallgegenständen (z. B. Metallkleiderbügel) in Berührung gebracht werden.
- Achtung: Schattierungen, Farbunterschiede und Verfärbungen sind keine Herstellungsfehler und stellen keine Qualitätsmängel dar.
- **Achtung:** Es ist wichtig, die Haut mit einem guten Pflegeprodukt oder einer Creme zu befeuchten. Damit BINAMED-Textilien wirken, ist es wichtig, daß die auf der Haut aufgetragenen Produkte eingezogen sind.