



DER NASEN BALLON

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

die Ursache vieler Ohr-Erkrankungen ist eine nicht ausreichende Belüftung des Mittelohres. Besonders häufig tritt diese bei Kindern auf. Als Folge stellt sich meist eine leichte bis mittlere Schwerhörigkeit ein.


Ihr Arzt hat Ihnen, oder Ihrem Kind, deshalb den Otobar-Nasenballon® verordnet.

Mit diesem medizinischen Hilfsmittel kann man bei Belüftungsstörungen des Mittelohres leicht den Druckausgleich herstellen.



Aufziehen des Ballons

Halten Sie den grünen Adapter so in der Hand, dass Sie den Wulst des Ballons in die Randeinkerbung drücken können (Abb. 2). Führen Sie dann mit der anderen Hand den übrigen Rand faltenlos in die Rundung. Fertig!

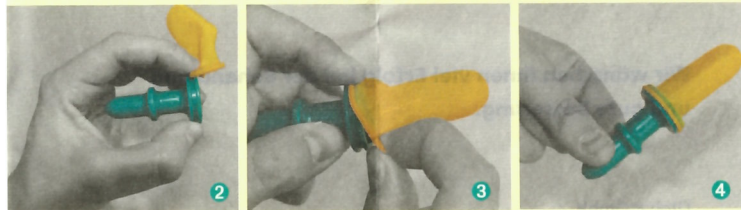

Anwendung

Jetzt kann der Ballon aufgeblasen werden. **Mit der Nase!**

Drücken Sie dazu den abgerundeten Nasenansatz an ein beliebiges Nasenloch, halten Sie das andere zu (Abb. 1) und blasen Sie den Ballon mit der Nase auf. Apfelsinengröße genügt.

Sie spüren wie es in den Ohren knackt oder drückt? Das ist der gewünschte Effekt! Wenden Sie Otobar-Nasenballon® mehrmals täglich an; z.B. 3-mal täglich 5-mal aufblasen. Sie brauchen dazu das Nasenloch nicht zu wechseln. Die Ballons sollten nach ca. 20 Anwendungen ersetzt werden.

Ersatzballons können in der Apotheke nachgekauft werden. Für hartnäckige Fälle stehen auch Otobar-Ersatzballons stark zur Verfügung. Diese erfordern einen höheren Aufblasdruck.



Wichtige Hinweise

Die Ballons haben spezielle Materialeigenschaften, die auf ihren Verwendungszweck hin abgestimmt sind. Sie sind dünner und damit empfindlicher als übliche Luftballons. Gehen Sie entsprechend vorsichtig mit ihnen um. Legen Sie sie vor allem nicht ins Sonnenlicht. Dessen UV-Anteil macht das Material schon nach kurzer Zeit spröde.

Ballons nur etwa bis Apfelsinengröße aufblasen. Bei größerem Volumen, das Kinder gerne testen, platzen sie leicht.



Die Ballons bestehen aus Natur-Latex, dem verarbeiteten Saft des Gummibaumes. Besteht der Verdacht auf Latex-Allergie, sollte der Rat eines Arztes eingeholt werden.

Um Verschlucken oder Aspiration (die gefährliche Einatmung) zu verhindern, sollten die Ballons nicht in den Mund genommen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Bei Kindern muss die Anwendung immer beaufsichtigt werden.

Reinigung des Adapters

Tägliche Reinigung unter fließendem Wasser und Durchspülen. Bei starker Verschmutzung darf das Kunststoffteil auch ca. 1 min. ausgekocht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Behandlung und gute Besserung.

Otobar GmbH
Dr. Dr. Siegfried Kaus
Bergwaldstraße 19, D-35398 Gießen

Otobar Nasenballon KPG	1+5 St.	PZN 3568534
Otobar Ersatzballons	5 St.	PZN 3568540
Otobar Ersatzballons stark	5 St.	PZN 4983028

