

# FRONTLINE PET CARE

**ENTFERNUNG  
VON ZECKEN  
BEI HAUSTIER  
UND MENSCH**

FRONTLINE PET CARE  
**Zeckenhaken**



# FRONTLINE PET CARE ZECKENHAKEN\*

Nach jedem Gassigang mit Ihrem Hund beziehungsweise Freigang Ihrer Katze kann Ihr Tier Zecken an sich tragen und mit nach Hause bringen. Daher empfiehlt es sich generell, Haustiere regelmäßig nach Zecken abzusuchen und diese zu entfernen.

## Zecken richtig entfernen: Hinweise zur Anwendung

Sie haben eine festgesaugte Zecke auf Ihrem Liebling festgestellt? Mit dem FRONTLINE PET CARE Zeckenhaken entfernen Sie Zecken jeder Größe einfach und mit wenigen Handgriffen.

1. Nehmen Sie den Zeckenhaken und klemmen Sie die Zecke dicht an der Hautoberfläche Ihres Tieres in den Spalt des Zeckenhakens ein.
2. Dann drehen sie den Haken sehr behutsam, bis sich die Zecke gelöst hat.
3. Entsorgen Sie dann die Zecke artgerecht und gleichwohl so, dass keine Gefahr mehr von ihr ausgehen kann.



**Immer dabei:**  
Passt dank  
Schleife an  
jeden Schlüsselbund



**Universeller Spalt:**  
für alle Zeckengrößen

**Universal einsetzbar • Einfach anzuwenden • Für Mensch und Tier**



Der Zeckenhaken zur Entfernung dieser Parasiten sollte in keinem Heimtierhaushalt und auch nicht auf Urlaubsreisen fehlen!

\* Kein Medizinprodukt

41190-V1-2017