

Stom Odor® DROPS

GERUCHSNEUTRALISIERENDE
TROPFEN



35 ml

NATURPRODUKT

Gebrauchsinformation

Indikation: StomOdor Drops wurden für Stoma-Patienten zur sicheren Neutralisierung der Gerüche entwickelt.

Zweckbestimmung: StomOdor Drops sind zur Anwendung direkt im Stomabeutel bestimmt. Die Wirkung basiert auf dem katalytischen Abbau und auf der Zersetzung von Geruchsmolekülen. Gleichzeitig vermischen sich die Inhaltsstoffe mit den Darmausscheidungen und bilden auf deren Oberfläche und an den Kontaktflächen des Stomabeutels einen Ölfilm, der eine wirksame Geruchskontrolle gewährleistet.

Anwendung: Geben Sie 6-15 Tropfen direkt in den Stomabeutel bevor Sie ihn anlegen. Diese Art der Anwendung hat sich in der Alltagspraxis von Stomapatienten bestens bewährt. Für die Verwendung ausserhalb des Stomabeutels ist das Produkt nicht geeignet. Vor Gebrauch schütteln.

Kontraindikation und Verwendung mit anderen Medizinprodukten: Nicht bei Allergie auf ein oder mehrere in der Zusammensetzung aufgeführten Inhaltsstoffe verwenden. StomOdor Drops lassen sich mit allen gängigen Medizinprodukten für Stomapatienten kombinieren.

Charakteristik und Zusammensetzung: Safranöl, Eukalyptusöl, Mostgummi-Eukalyptusöl, Mandelöl. Die Inhaltsstoffe haben keine karzinogene, erbgutschädigende Wirkung und verursachen keine Langzeitfolgen. Nicht steril.

Handhabung und Lagerung: StomOdor Drops sind nicht brennbar, nicht explosionsgefährlich und es müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Trocken, sonnengeschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. Vor Frost schützen. Leere Verpackung und Produktreste nach dem Haltbarkeitsdatum im Restmüll entsorgen.

Sicherheitshinweise: Nicht auf offenen Wunden anwenden. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort gründlich ausspülen und den Arzt aufsuchen. Nicht in Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums aufbrauchen.



StomOdor® Medizinprodukt



Hersteller: ALP ecology s.r.o., Zborovská 1910/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Tschechische Republik

Vertrieb: ORBAMED Dr. Gützlaff GmbH, Driescher Str. 32, 56826 Lutzerath, Deutschland

