

Calcavit 720/730



Artikel-Nr.: 608-720/730

Größe	Schuhgröße
1	Größe 33 - 40
2	Größe 40 - 47

Calcavit 720 Fersenkissen / Art.Nr.: 608-720

Auch als Längenausgleich,
Höhe 10 mm

Calcavit 730 Fersensporen - Entlastungskissen / Art.Nr.: 608-730

Der blaue Bereich ist zur Entlastung des Fersenspornes aus
einem weichen Silikon gefertigt,
Höhe 10 mm

Produktbeschreibung

Calcavit ist ein Fersenkissen aus Silikon, welches dank seiner speziellen Viscoelastik (Zusammensetzung des Silikons) in seiner Schlagabsorbierung einmalig ist. Daher werden durch Gehen/Laufen bedingte Stöße auf Sprunggelenk, Knie, Hüfte und Wirbelsäule auf ein Minimum reduziert.

Daraus resultieren erhebliche Entlastungen der Ferse, Gelenke, Bänder, Muskeln und Sehnen. Calcavit-Fersenkissen sind rutschfest und können in Straßen-, Sport- und Arbeitsschuhen getragen werden.

Indikation

- zur Vermeidung von Druckspitzen bei Fersensporn
- Verschleiß (Arthrose) der Sprung-, Knie- und Hüftgelenke
- Ileosakral- und Zwischenwirbelgelenksarthrose
- Schleimbeutelentzündung
- bei künstlichen Gelenken (Endoprothesen) zur Entlastung
- Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
- bei Beinlängendifferenzen 10 mm (Ausgleich)
- nach Fersenbeinbruch

Kontraindikation

Das Anlegen und Tragen des Fersenkissens ist bei nachfolgenden Krankheitsbildern nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt durchzuführen:

- Hauterkrankungen/Verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen
- aufgeworfene Narben
- Schwellungen
- Rötungen
- Überwärmungen

Gebrauchsanweisung

Legen Sie das Calcavit Fersenkissen so in den Schuh ein, dass es formschlüssig mit dem Fersenbereich des Schuhs abschließt. Achten Sie darauf, dass die Fersenkappe des verwendeten Schuhs hoch genug ist, da es sonst zu Schlapp-Effekten kommen kann. Bitte Baumwollstrümpfe tragen.

Nebenwirkungen

Es können Schweißfüße auftreten. Durch Tragen von Baumwollstrümpfen sowie tägliche, gründliche, mechanische Reinigung der Füße (Wurzelbürste etc.) - wenn möglich ohne Seife - kann die Hautflora der Füße wieder regenerieren. In der Regel geht die Schweißbildung schon nach wenigen Tagen zurück. Bitte fragen Sie Ihren Dermatologen (Hautarzt) oder Apotheker.

Pflegeanleitung

Unter 30° C warmen Wasser waschen und anschließend abtrocknen. Nicht wringen. Wärmequellen, scharfe Gegenstände o.ä. vermeiden.

Positionsnummer / Fersenkissen
08.03.06.1008

Positionsnummer / Fersensporen
08.03.06.0051

Für eine gesunde Generation die günstige Alternative

Orpedo[®]
ORTHOPEDICS COMPANY

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com