

Algivon®

Alginate dressing impregnated with Activon honey

Instructions for use

Advancis
Medical

Algivon®

Alginate-Wundauflage, getränkt in Activon-Honig

DEU

Produktbeschreibung

Nicht-klebende Alginate-Wundauflage, getränkt in Activon-Honig. Ein effektiver Schutz gegen ein breites Spektrum an Bakterien. Erhält ein feuchtes Milieu zur Wundheilung, verhindert effektiv eine Gewebemarkierung und sorgt für einen sauberen Wundrand. Reduziert oder eliminiert den Geruch überliegender Wunden, absorbiert Exsudat und ermöglicht eine längere Versorgung der Wunde mit Activon-Honig.

Indikation

Kann bei allen Wundarten verwendet werden, u.a. auch bei oberflächlichen Wunden, partiellen und Vollhautdefekten, Wunden mit Gewebemarkierung / belegten Wunden, nekrotischen Wunden wie Druckgeschwüren, Unterschenkelgeschwüren, Operationswunden, Verbrennungen, Hauttransplantaten und exulzierenden vaskulären Tumoren, Angesteckte Wunden.

Gebrauchsanleitung

Direkt auf der Wunde platzieren (egal mit welcher Seite nach unten). Kann mit einer scharfen Schere zugeschnitten werden. Mit einem sekundären Verband oder Pflaster fixieren.

Wie oft sollte man wechseln?

Abhängig von der Exsudatmenge, eventuell umliegender Gewebeflüssigkeit oder Ödemen und der Verbandsart könnte ein täglicher Wechsel nötig sein, die Auflage kann aber bis zu 7 Tage verbleiben. Verdünnt Wundexsudat den Honig, so verringert sich die Wirksamkeit. Deshalb Verband wechseln sobald sich die Farbe merklich ändert.

Gegenanzeigen

Enthält Glukose. Patienten mit Diabetes müssen ärztlich überwacht werden. Nicht bei Allergie gegen Bienengift verwenden. Manchmal wird von Schmerzen beim Anbringen berichtet, je nach Sensitivität der Wunde kann eine angebrachte Dosis Schmerzmittel erwogen werden. Sollte der Schmerz nicht nachlassen, Produkt entfernen und Wunde mit Kochsalzlösung spülen.

Aufbewahrung

Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

