

## **VACUTEX 10X10CM WUNDAUFL**

### **VACUTEX Wundaufl.m.Unterdruck+Kapillarwirk.10x10cm**

PZN: 19430186

Inhalt: 10 St

Hersteller: Protex Healthcare Nv

#### **Zweckbestimmung**

Wundauflagen mit Kapillarwirkung eignen sich besonders in Fällen von mässig oder stark sezernierenden Wunden, bei denen der Belag/Schorf dick und fettig ist. In diesen Fällen muss überschüssige Wundflüssigkeit aus der Wunde entfernt werden und gleichzeitig ausreichend Feuchtigkeit für den Wundheilungsprozess aufrechterhalten werden. Die Behandlung von Wunden, die unregelmässig geformt, tief, beschädigt sind oder sich an schwer zu behandelnden Körperstellen befinden, kann viel komplexer sein. VACUTEX kombiniert sowohl einen multidirektionalen Verband mit beschleunigter Kapillarwirkung als auch eine Drainagewirkung zur Behandlung schwer heilender Wunden mit einer mässigen oder starken Exsudatbildung und Schorfbildung. VACUTEX nicht verwenden bei arteriellen Blutungen, dynamischen vaskulären Wunden mit Pilzbefall oder stark blutenden Wunden. Wenn die Wunde stark infiziert ist, wenden Sie eine geeignete antibakterielle Behandlung an, bevor Sie VACUTEX aus der Wunde anwenden.

#### **Zusammensetzung**

Die Wundauflagen mit Kapillarwirkung von VACUTEX werden aus einer dreischichtigen Mischung aus Polyester- und Baumwollelementen hergestellt, die nach patentierten Spezifikationen miteinander verwoben sind.