




Coronavirus PCR Speicheltest

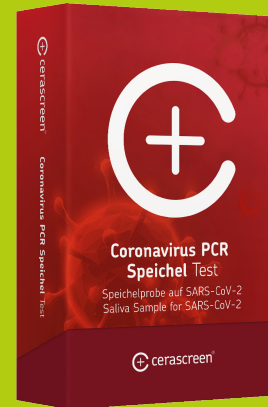

Speichelprobe auf SARS-CoV-2 (PCR)

Wir sind der Meinung, dass jeder einen Coronavirus Test zuhause haben sollte. So können auch Sie bei Verdacht auf Corona (z.B. bei Erkältungssymptomen oder nach einer Reise) direkt zuhause eine Probe entnehmen, ohne zum Arzt zu gehen.

Der cerascreen® Coronavirus Test ist ein Probenahme- und Einsende-Testkit für eine Speichel-Untersuchung auf respiratorische Erreger. Der Test dient dem Nachweis des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, das die Atemwegskrankheit COVID-19 auslöst – im medizinischen Fachlabor.

Fühlen Sie sich krank oder zeigen Symptome, die zu einer Corona-Infektion passen, sollten Sie sich in jedem Fall umgehend an die bundesweite Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Tel.: 116 117 oder direkt an Ihren Arzt wenden.

- + **ärztlich validiertes Testergebnis**
- + **zum Nachweis der Virus-RNA, wie sie bei einer akuten Infektion auftreten könnte**
- + **kein Infektionsrisiko durch den Arztbesuch oder für das medizinische Fachpersonal**
- + **mehr Sicherheit, ob es sich um eine Corona-Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus handelt**
- + **angemeldetes In-Vitro-Diagnostikum (IVD) für private Endanwender**

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.

Coronavirus PCR Speicheltest



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Speichelprobe brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Coronavirus PCR Speicheltest

Der Coronavirus PCR Speicheltest ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Coronavirus PCR Speicheltest nicht durchführen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Coronavirus PCR Speicheltest nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Coronavirus PCR Speicheltest eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Bei Symptomen wie starken Schmerzen oder hohem Fieber sollten Sie sich an die bundesweite Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Tel.: 116 117 oder direkt an Ihren Arzt wenden.
- + Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Coronavirus PCR Speicheltest:
<https://www.cerascreen.de/products/coronavirus-pcr-speicheltest>



PZN 17265228

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

