

PICO 14 15X15CM WUNDAUFLAG

PICO 14 15x15 cm Set 2 Wundauflagen

PZN: 15261551

Inhalt: 1 P

Hersteller: Smith & Nephew GmbH - Woundmanagement

Zweckbestimmung

PICO 14 für Patienten, die von einem Absauggerät (NPWT) profitieren würden, da es durch die Entfernung von niedrigen bis mäßigen Mengen von Exsudat und infektiösem Material eventuell die Wundheilung fördert. Geeignete Wundtypen sind chronisch, akut, traumatisch, subkutane und klaffende Wunden, Verbrennungen 2. Grades, Ulzera (z. B. diabetisches oder Druckulkus, Hautlappen und -transplantate, chirurgisch Verschluss Inzisionsstellen).

Zusammensetzung

PICO 14 besteht aus einer Pumpe (auch als Therapieeinheit bezeichnet), einem aufgerollten Verlängerungsschlauch, Batterien, sterilen Wundauflagen und Fixierstreifen. Die PICO 14 Therapieeinheit gibt eine Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) mit 80 mmHg (Nennwert) an die Wundfläche ab. Der Verband übernimmt das Exsudatmanagement durch eine Kombination aus Absorption und Abdampfen von Feuchtigkeit durch die Oberfolie. Das PICO 14 System ist für die Verwendung über eine Dauer von bis zu 14 Tagen bestimmt. Bei niedrig exsudierenden Wunden sind die PICO Verbände jeweils für die Verwendung über eine Dauer von bis zu 7 Tagen bestimmt. Bei mäßig exsudierenden Wunden sind die PICO Verbände jeweils für die Verwendung über eine Dauer von bis zu 4 Tagen bestimmt. Für die 14-tägige Verwendung bei mäßig exsudierenden Wunden sind zusätzliche Verbände erforderlich (separat zu erwerben). Der PICO Soft Port-Verband ist mit einem integrierten Filter ausgestattet, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in den Soft Port-Schlauch und in die PICO Therapieeinheit eindringt. Als niedrig exsudierend gelten Wunden mit bis zu 0,6 g Exsudatflüssigkeit/cm² Wundfläche/ 24 Stunden. Al