

Activon Tulle®

Gauze dressing impregnated
with Activon honey

Instructions for use

Ad **ancis**
Medical

Activon Tulle®

Wundauflage aus Mull, getränkt in Activon-Honig

DEU

Produktbeschreibung

Drei Schichten nicht klebender Mull, getränkt in Activon-Honig. Ein effektiver Schutz gegen ein breites Spektrum an Bakterien. Erhält ein feuchtes Milieu zur Wundheilung, reduziert oder eliminiert den Geruch überliegender Wunden, verhindert effektiv eine Gewebsdemarkierung und sorgt für einen sauberen Wundrand.

Indikation

Kann bei allen partiellen und Vollhautdefekten verwendet werden, u.a. auch bei Wunden mit Gewebsdemarkierung / belegten Wunden, Druckgeschwüren, Unterschenkelgeschwüren, Operationswunden, Verbrennungen, Angesteckte Wunden, Hautverpflanzungen & -transplantationen und überliehrenden Wunden.

Gebrauchsanleitung

Auf der Wunde platzieren (egal mit welcher Seite nach unten). Kann zugeschnitten werden. Mit einem sekundären Verband oder Pflaster fixieren. Kann bei größeren Wunden aufgeteilt werden, was aber die Honigkonzentration reduziert. Die Wirksamkeit hängt mit der Honigmenge zusammen.

Wie oft sollte man wechseln?

Abhängig von der Exsudatmenge, eventuell umliegender Gewebsflüssigkeit oder Ödemen und der Verbandsart könnte ein täglicher Wechsel nötig sein, die Auflage kann aber bis zu 7 Tage verbleiben. Bei Verdünnung durch Wundexsudat verringert sich die Wirksamkeit. Für eine stets effektive Honigschicht sollte die Auflage gewechselt werden, sobald sie sich merklich verfärbt.

Gegenanzeigen


Enthält Glukose. Patienten mit Diabetes müssen ärztlich überwacht werden. Nicht bei Allergie gegen Bienengift verwenden. Manchmal wird von Schmerzen beim Anbringen berichtet, je nach Sensitivität der Wunde kann eine angebrachte Dosis Schmerzmittel erwoogen werden. Sollte der Schmerz nicht nachlassen, Produkt entfernen und Wunde mit Kochsalzlösung spülen.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

Aufbewahrung

Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

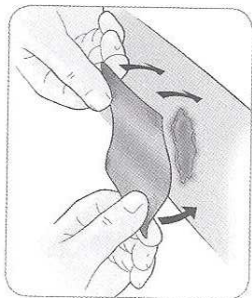

STERILE R

