

Abwurfbox mit Sicherheitsverschluss zu jeder Packung
KLINION® Soft Fine Plus Pen-Nadeln.



Bestellinformation

	Produkt	Packungsgröße	PZN
	KLINION® Soft Fine Plus 0,23 mm (32G) x 4 mm	100 + 10 Stück	10179649
	KLINION® Soft Fine Plus 0,23 mm (32G) x 5 mm	100 + 10 Stück	09076312
	KLINION® Soft Fine Plus 0,23 mm (32G) x 6 mm	100 + 10 Stück	11340242
	KLINION® Soft Fine Plus 0,25 mm (31G) x 6 mm	100 + 10 Stück	09166245
	KLINION® Soft Fine Plus 0,23 mm (32G) x 8 mm	100 + 10 Stück	11340259
	KLINION® Soft Fine Plus 0,25 mm (31G) x 8 mm	100 + 10 Stück	09166251
	KLINION® Soft Fine Plus 0,33 mm (29G) x 12 mm	100 + 10 Stück	09166274

12409264 - Stand: April 2016

Vertrieb | eu-medical GmbH

Bärensteiner Str. 27-29 | D-01277 Dresden
info@eu-medical.de | www.eu-medical.de
Gebührenfreie Rufnummer 0800-5 88 80 56

Hersteller:

Medeco BV | Alexander Flemingstraat 2 | NL-3261 MA Oud-Beijerland | www.medeco.nl



Soft Fine Plus



NEU

Pen-Nadeln

6 und 8 mm - jetzt in
2 Stärken erhältlich

Geprüftes
Qualitätsprodukt

... mit dem
"Plus" an Nadeln,
Komfort & Sicherheit

- 100 + 10
- 5 Nadellängen
- Sicherheitsabwurfbox



Erhältlich in 5 Nadellängen und 3 Nadelstärken:

Hier ist für jeden die passende Nadel dabei.

0,23 mm (32G) x 4 mm	0,23 mm (32G) x 8 mm
0,23 mm (32G) x 5 mm	0,25 mm (31G) x 8 mm
0,23 mm (32G) x 6 mm	0,33 mm (29G) x 12 mm
0,25 mm (31G) x 6 mm	


Durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik ist eine sichere Insulininjektion gewährleistet.

Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

Kinder und Jugendliche	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* mm
senkrecht, mit Hautfalte	5 + 6 mm
schräg, ohne Hautfalte	6 mm
schräg, mit Hautfalte	8 mm
Erwachsene	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* + 5* mm
senkrecht, mit Hautfalte	6 + 8 + 12 mm
schräg, ohne Hautfalte	6 + 8 + 12 mm
schräg, mit Hautfalte	12 mm

* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen auch im Bauchbereich kann die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte ②

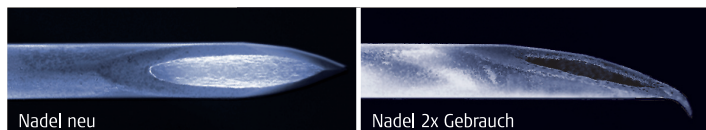

Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.

Passen auf alle gängigen Insulinpens:

BERLIPEN von Berlin-Chemie

BerliPen areo 3



BerliPen Precision



BerliPen Junior



HUMAPEN von Lilly

HumaPen Savvio



HumaPen Luxura HD



NOVOPEN von Novo Nordisk

NovoPen 5



NovoPen Echo



AUTOPEN 24 von Owen-Mumford

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1



Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2



INSULINPENS von sanofi-aventis

KlikStar



TactiPen



JuniorSTAR



AutoPen classic; BerliPen areo und areo 2, BerliPen 301 und 302; DiaPen; HumaPen Memoir und Luxura; NovoPen 4 und NovoPen Junior; OptiPen Pro 1 und 2; Pendiq; YpsoPen und auf alle Fertigpens.