

Protefix® Haft-Creme

PREMIUM
für Voll- und Teilprothesen

Protefix Haft-Creme Extra-Stark Premium

- 1. Nass-Haftkraft:** Direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 2. Extra-Stark:** Prothesenhaftung mit Langzeitwirkung
- 3. Pflegefaktor:** Vitamin E schützt die Zellen
- 4. Krümelschutz:** Effiziente Randabdichtung gegen Eindringen von Speiseresten unter die Prothese
- 5. Tragekomfort:** Dank elastischer Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese
- 6. Kräuterkraft:** Mit Myrrhe-/Salbei-/Kamille-Formel
- 7. Milde Frische:** Angenehm mild-frischer Minzgeschmack

Premium-Rezeptur: Ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.
Für Voll- und Teilprothesen geeignet.

Anwendung: Prothese reinigen und **Protefix Haft-Creme Premium** in Abständen auf die nasse Prothese auftragen. Die Prothese einsetzen und einige Sekunden fest andrücken. Nach Gebrauch bitte die Tube sorgfältig verschließen; die Öffnung dabei sauber und trocken halten.

Zusammensetzung: **Protefix Haft-Creme Premium** enthält:
Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

Bitte Gebrauchsanweisung beachten.



**Quaisser
PHARMA**

GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg