

Advazorb Heel®

Hydrophilic foam dressing with film backing

Instructions for use



Advazorb Heel®

DE

Wundauflage aus hydrophilem Schaumstoff mit Folienträger

Produktbeschreibung

Advazorb Heel® ist eine anschmiegsame, gering haltende, hydrophile Wundauflage aus Polyurethanschaumstoff mit atmungsaktivem Folienträger zur Anpassung an die Ferse. Eine nicht klebende Wundauflage aus Schaumstoff mit hervorragender Saugfähigkeit. Mit ihrer Flüssigkeitsretention, geringen Dicke und dem Folienträger mit geringer Reibung ist sie ideal für den Einsatz unter Kompressionsverbänden geeignet.

Anwendungsgebiete

Geeignet für akute und chronische Wunden, wie: Schnitt- und Schürfwunden, oberflächliche Verrennungen, Operationswunden, Beinschwürle, Druckgeschwürle und diabetische Geschwürle.

Gegenanzeigen

Arterienblutungen, stark blutende Wunden und exzudierende vaskuläre Tumore.

Gebrauchsanleitung


Mit der pinken Seite nach oben direkt auf der Wunde an der Ferse platzieren und mit Pflastern, geeigneter Bandage oder sekundärer Wundauflage fixieren.

Wie oft sollte man wechseln?

Kann bis zu 7 Tage verbleiben, sollte aber gewechselt werden, sobald die Wundauflage vollgesogen ist oder durchnässt. Am Rand der Wundauflage sichtbares Exsudat ist ein deutliches Anzeichen, dass sie ausgetauscht werden muss. Klinische Beobachtung ist nötig, um festzustellen, wie oft die Auflage gewechselt werden muss.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

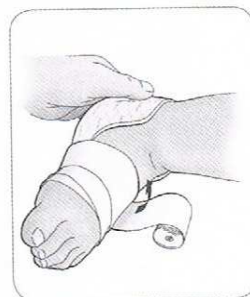

STERILE EO



0086



Do not use if package is damaged