

Hallux Valgus



Artikel-Nr.: 608-708-L/R

Produktbeschreibung

Die Spange der **Hallux Valgus Night** aus flexiblem thermoformbaren Kunststoff korrigiert Fehlstellungen der Großzehe und des Ballens. Die weiche Polsterung im Bereich der Großzehe sowie der gepolsterte Halteriemen sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Der Klettverschluss ermöglicht eine individuelle Korrektur und Anpassung.

Indikationen

- Hallux Valgus
- Ballenbildung
- Fehlstellung und Deformation der Großzehe
- konservative und postoperative Therapie

Gebrauchsanweisung

Die Nachtschiene wird an der betroffenen Zehe angelegt und mittels Klettverschluss geschlossen und der Korrekturdruck stufenlos eingestellt. Die **Hallux Valgus Night** ist zum Gehen nicht geeignet und kann nicht in Schuhen getragen werden. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Material

Nylon
Plastazote®-Schaumstoff
Kunstleder

Pflegeanleitung

Die Schiene kann einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden.

Farbe

hautfarben

Positionsnummer

23.01.01.0004

	Größe
	universal links und rechts erhältlich

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Nachtschiene zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Nachtschiene sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen.

Für eine gesunde Generation die günstige Alternative

Orpedo.
ORTHOPEDICS COMPANY

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com