



COMPRESSANA CALYPSO 70

ca. 12 – 14 mmHg **Stützklasse II** **medium 70 den**

Die unwiderstehliche Synthese aus Wirkung und modischem Chic. Luftig und transparent wie Feinstrümpfe, bietet CALYPSO 70 höchsten Tragekomfort und beste Verarbeitung. Das vielfältige und umfassende Sortiment lässt bestimmt keine Wünsche offen.

- **passgenaue anatomische Form**
- **weich, hautsympathisch und transparent (appearance 20 den)**
- **unsichtbar eingestrickte Ferse und Spitze**



Produkt	Größe	Farbe
Strumpfhose mit Komfort-Hosenteil	I-VI XS-XXL	sandel silk sepia perle romance nachtblau schwarz
Strumpfhose extraweit / Umstands-Strumpfhose	II-VI S-XXL	silk TIPP für Schwangere romance nachtblau schwarz
„Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos	I-V XS-XL	sandel silk sepia perle romance nachtblau schwarz
Schenkelstrümpfe zur Strapsbefestigung	I-V XS-XL	silk perle romance
Kniestrümpfe mit Softbündchen*	I-VI XS-XXL	sandel silk sepia perle romance nachtblau schwarz

Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

Vor dem Tragen waschen • auf links waschen
• keine Weichspüler verwenden

Größenübersicht Calypso 70

Gr.	Konfektion	Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp	
I	XS	34–36	36–38	ca. 43–52	schmal – klein
II	S	36–38	37–39	ca. 50–60	schmal – normal
III	M	40–42	39–40	ca. 57–66	normal
IV	L	42–44	40–42	ca. 63–75	normal – groß
V	XL	44–46	41–43	ca. 73–90	kräftig – normal
VI	XXL	48–50/52	41–43	> 80	extra

