


Oroben

- Aphthen • Zahnfleischentzündungen
- Kleine Verletzungen im Mundraum
- Tägliche Mundhygiene

Lindert den Schmerz, schützt
und fördert die Heilung

MUNDSPÜLUNG

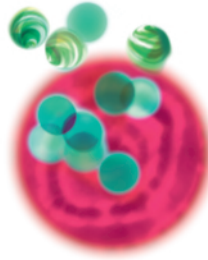

Mit **Resinox^{FP}**,
einem natürlichen Molekülkomplex aus
Polysacchariden, Harzen und Flavonoiden



MIT INHALTSSTOFFEN AUS
BIOLOGISCHEM ANBAU

MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Oroben Mundspülung ist ein Medizinprodukt, das den Schmerz lindert und die Heilung von Aphthen, wiederkehrenden apthösen Stomatitiden, entzündetem Zahnfleisch und kleinen Verletzungen im Mundraum fördert, die beispielsweise auf Zahnbehandlungen oder auf die Verwendung von Zahnspangen und Zahnprothesen zurückzuführen sind.

WIRKUNGSWEISE

Oroben Mundspülung wirkt dank **Resinox FP**, einem natürlichen Molekülkomplex aus der Aboca-Forschung, bestehend aus Polysacchariden, Harzen und Flavonoiden, die in Synergie eine aktive Barriere mit zweifacher Wirkung auf der Schleimhaut bilden:

1. SCHÜTZEND UND FEUCHTIGKEITSSPENDEND

Der Komplex bildet einen adhäsiven Film auf der Verletzung bzw. dem entzündeten Bereich, der den Kontakt mit externen Pathogenen oder Reizstoffen einschränkt, die dem natürlichen Heilungsprozess und der Geweberegeneration entgegenwirken.

2. ANTIOXIDATIV

Er schützt die Schleimhaut vor der Reizwirkung der freien Radikale.

Dank dieser Mechanismen hat das Produkt eine **indirekte entzündungshemmende Wirkung**, fördert die Geweberegeneration und verringert die Genesungszeiten. Darüber hinaus entfaltet das ätherische Pfefferminzöl eine erfrischende Wirkung und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl im Mund, nützlich auch zur Reduzierung von Mundgeruch, der oftmals in Verbindung mit Zahnfleischentzündungen auftritt.

Durch das Spülen und Gurgeln mit Oroben Mundspülung wird jeder Bereich der Mundhöhle erreicht. Sie ermöglicht die Beseitigung von Reizstoffen und fördert demzufolge die Kontrolle der Mikroumgebung, die Hygiene und den Schutz des Mundes.

ANWENDUNGSGEBIETE

Spezifisches Mittel zur Behandlung von Aphthen, wiederkehrenden apthösen Stomatitiden und entzündetem Zahnfleisch. Kann auch bei kleinen Verletzungen im Mundraum angewandt werden, die beispielsweise auf Zahnbehandlungen oder auf die Verwendung von Zahnspangen und Zahnprothesen zurückzuführen sind. Bei erhöhter Sensibilität kann das Produkt zum präventiven Schutz der Mundschleimhaut auch über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Geeignet auch für Kinder über 6 Jahre. Versehentliches Verschlucken während der Anwendung ist unbedenklich.

Die hohe Konzentration von funktionellen Bestandteilen kann zu einer leichten Ablagerung auf dem Flaschenboden führen; ein leichtes Schütteln reicht aus, um eine homogene Dispersion zu erhalten.

ANWENDUNGSHINWEISE

Flasche vor Gebrauch schütteln. Es wird empfohlen, 2 oder 3 Mal täglich, etwa 10 ml der Mundspülung mit dem entsprechenden Messbecher zu verwenden und damit mindestens eine Minute lang den Mund spülen und gurgeln. Das Produkt kann pur oder in wenig Wasser verdünnt verwendet werden. Für die Verwendung bei Kindern wird empfohlen, das Produkt zu verdünnen. Die Aufnahme von Getränken und Speisen mindestens 15 Minuten lang nach der Anwendung vermeiden, um die Haftung des Produktes an der Schleimhaut zu fördern. Flasche nach Gebrauch sorgfältig verschließen und den Dosierbecher gründlich mit Wasser reinigen.

ZUSAMMENSETZUNG

Funktionelle Bestandteile: Resinox FP, natürlicher Molekülkomplex aus Polysacchariden (aus Aloe vera*), Flavonoiden (aus Kamille*) und Harzen (aus Myrrhe).

Enthält außerdem: Wasser-Alkohol-Lösung, pflanzliches Glycerin, Ethylalkohol aus biologischem Weizen*; ätherisches Pfefferminzöl; natürliche Aromen; Lakritzenextrakt*; Xanthangummi.

* *Inhaltsstoff aus biologischem Anbau*

Enthält keine Konservierungsstoffe.

HINWEISE

Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden.

Kühl und trocken aufbewahren und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das ungeöffnete und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt zu Rate ziehen, um etwaige systemische bzw. dentale Ursachen auszuschließen, die andere Behandlungsarten erfordern.

VERFALLSDATUM

Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen, das Produkt nach dem Öffnen nicht länger als 6 Monate zu verwenden.

PACKUNG: 150 ml Glasflasche.

Mit Dosierbecher  0373

Hydrate 150 ml - Anhydride 30 ml

Liz. UTF IT00PG-A00035A - Alkohol 20 Vol.-%

Ergänzend zur Linie Oroben Mundgel.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 11/2018

APHTHEN, ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNGEN UND KLEINE VERLETZUNGEN IM MUNDRaum

Mundschleimhaut und Zahnfleisch leiden häufig unter akuten, oft wiederkehrenden bzw. chronischen Entzündungszuständen, wie Stomatitis, Zahnfleischartzündungen und kleine Verletzungen.

Die aphthöse Stomatitis, auch Aphthe genannt, ist eine lokalisierte ulzerative Verletzung von variabler Größe, die eine oder mehrere Stellen der Schleimhaut in der Mundhöhle miteinbezieht. Diese Verletzungen sind gewöhnlich selbstlimitierend, d. h. sie neigen dazu, innerhalb von einer oder zwei Wochen spontan zu heilen, jedoch sind sie im Allgemeinen wiederkehrend und sehr schmerzhaft, sodass Schwierigkeiten beim Essen, Trinken oder Sprechen auftreten können. Dementgegen können diffusere Entzündungszustände das Zahnfleisch miteinbeziehen. Die Ursachen dafür können eine falsche Mundhygiene (Plaquesammlung oder falsche Verwendung von Zahnbürste und Zahnseide), kieferorthopädische Behandlungen bzw. die Verwendung von Zahnspangen und Zahnprothesen sein. Dies kann zu kleinen Verletzungen im Zahnfleisch oder an anderen Stellen der Mundhöhlenschleimhaut führen.



 0477