

Der Resultan Vaterschaftstest.

Beim Kauf in der Apotheke.

Beim Resultan Vaterschaftstest (auch DNA-Vaterschaftstest) werden die genetischen Merkmale des Kindes mit den genetischen Merkmalen des Vaters und gegebenenfalls der Mutter verglichen. Sie kaufen die Resultan Testbox mit allen Probenentnahmematerialien und Dokumenten und bezahlen damit gleich die Analyse.







Die Probenentnahme wird per Abstrich von der Wangeninnenseite bei einem Zeugen (Arzt, Anwalt, Apotheke oder Behörde) durchgeführt. Nach dem Versand der Proben durch den Zeugen in unser Labor dauert die Analyse 5 Tage. Anschließend erfolgt der Versand des schriftlichen Testergebnisses.

DIE RESULTAN TESTBOX


- Sterile Wattestäbchen (Mundschleimhautabstrich) in Probenkuverts
- Gebrauchsanleitung, Codekarte, Sicherheitssiegel & Checkliste
- Auftragsformular & Identitätsnachweisformular(e)



DER ABLAUF


-  Vaterschaftstest von Resultan in der Apotheke kaufen
-  Probennahme bei einem Zeugen wie Arzt, Anwalt, Behörde oder Apotheke durchführen. Die Anwesenheit aller Testpersonen und aller gesetzlichen Vertreter (Mutter) ist **PFLICHT**.
-  Den Analyseauftrag und den/die Identitätsnachweis(e) ausfüllen und unterschreiben. Kopien der Ausweise/Geburtsurkunden sowie Fotos aller Testpersonen beilegen.
-  Versand der Proben durch den Zeugen.
-  Analyse von mindestens 21 Merkmalen im Labor durch akkreditierte Untersuchungsmethoden
-  Statusabfrage zum Auftrag sicher unter www.vaterschaftstest-resultan.de mittels Testnummer & Passwort von der Codekarte. Ergebnis nach 5 Arbeitstagen online und per Briefpost erhalten.

Weitere Services und Material für Zusatzpersonen beim Anbieter erhältlich: www.vaterschaftstest-resultan.de.

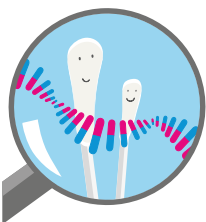

Resultan Vaterschaftstest: Analyse von Vater und Kind

Garantierte Sicherheit mind.: 99,9 %
PZN: 00001614 160,00 € inkl. MwSt.
(empfohlener Endkundenpreis inkl. Analyse)

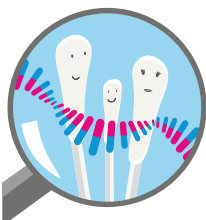

Resultan Vaterschaftstest: Analyse von Vater, Mutter und Kind

Garantierte Sicherheit mind.: 99,999 %
PZN: 01174239 240,00 € inkl. MwSt.
(empfohlener Endkundenpreis inkl. Analyse)

Nur mit identitätsgesicherter Probennahme beim sachkundigen Zeugen (Arzt, Anwalt, Behörde oder Apotheke).

Zur Verwendung für Privat, zur Vorlage bei Behörden und vor Gericht!


Telefon bei Fragen: 0341-149 59 10 (Mo-Fr 8-17 Uhr)

CHECKLISTE

- Zeuge (gesetzlich vorgeschrieben)**
Vereinbaren Sie einen Termin bei einem sachkundigen Zeugen, wie z.B. Arzt, Anwalt, Behörde, Apotheke
 - Fotos**
Fotos der Testpersonen (keine Passfotos notwendig) zur Probennahme mitnehmen und den Unterlagen beilegen.
! Tipp: Ausdruck vom Smartphone im Drogeriemarkt
 - Testpersonen und gesetzliche Vertreter**
Alle Testpersonen und gesetzlichen Vertreter (bei Minderjährigen auch die Mutter) müssen beim Zeugen anwesend sein (es können ggf. unterschiedliche Termin wahrgenommen werden).
 - Ausfüllen**
Alle Formularfelder auf allen Dokumenten müssen vollständig ausgefüllt bzw. unterschrieben werden.
 - Ausweisdokumente und Geburtsurkunde**
Ausweispapiere und bei Minderjährigen Geburtsurkunde* kopieren, zur Probennahme mitnehmen und den Unterlagen beilegen (*ggf. gelbes Kinderuntersuchungsheft)
- Bei Nichtbeachtung eines Punktes keine Analyse!
Für einen schnellen und reibungslosen Ablauf, einfach Checkliste nutzen und erledigte Punkte mit einem Stift abhaken.
Die Abrechnung der Probennahme erfolgt direkt durch den Zeugen (ca. 20,00-30,00 €).
Auskunft zu einem Auftrag nur mit Daten der Codekarte.


Checkliste und Gebrauchsanweisung finden Sie auch auf der Resultan Testbox

GEBRAUCHSANWEISUNG

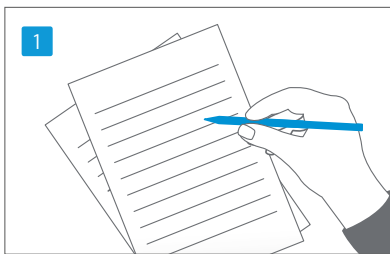


1. AUFTRAG

Beiliegende Dokumente sorgfältig durchlesen und gut lesbar mit einem Kugelschreiber ausfüllen. Formulare von allen Testpersonen bzw. gesetzlichen Vertretern (i.d.R. Vater und Mutter) unterschreiben lassen. Fotos der Testpersonen beilegen.

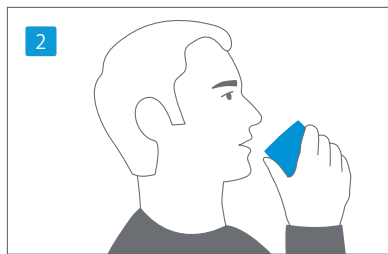


2. VORBEREITUNG: SPÜLEN

Mundraum muss frei von Speiseresten sein – evtl. mit klarem Wasser spülen. Bitte keine Zahnpasta benutzen! Bei Kindern, die gestillt werden: Nach dem letzten Stillen bitte 2 Stunden mit der Probennahme warten.

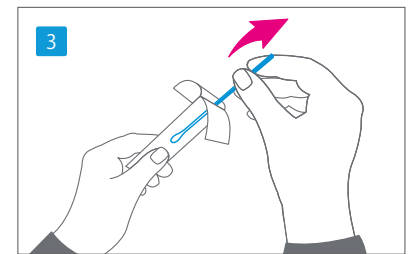


3. VORBEREITUNG: WATTSTÄBCHEN

Legen Sie für jede Person ein Probenkuvert bereit. Ziehen Sie die Wattestäbchen aus dem Kuvert und reißen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf. Pro Person 1 Probenkuvert und 2 Wattestäbchen.

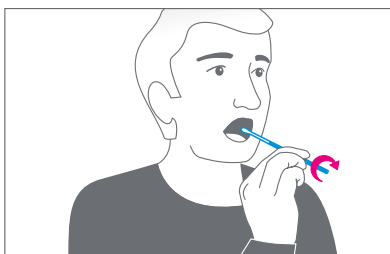


4. PROBENNAHME

Probennahme vor den Augen des Zeugen. Verwenden Sie pro Person 2 Wattestäbchen. Berühren Sie die Wattestäbchen nur am Griffbereich und streichen Sie bei jeder Person 5 mal drehend an der Wangeninnenseite auf und ab.

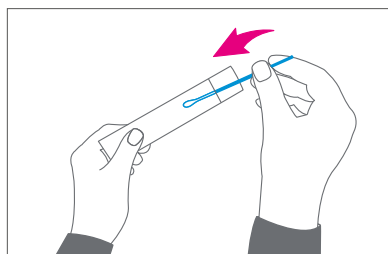

5. EINTÜTEN

Stecken Sie beide Wattestäbchen einer Person (ohne Folie) in das entsprechende Probenkuvert (ohne Folie) in das entsprechende Probenkuvert (Nicht verwechseln!). Legen Sie die Kuverts sowie die ausgefüllten, unterschriebenen Formulare in die Testbox. Anschließend versiegeln Sie die Testbox mit dem beiliegenden Sicherheitssiegel.

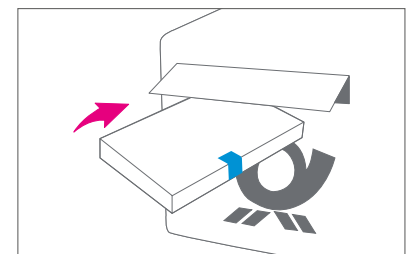

6. VERSAND

Versand der versiegelten Testbox durch den Zeugen (Arzt, Anwalt, Behörde, Apotheke) an die GENOLYTIC GmbH. Wenige Tage nach Zahlungs- und Probeneingang erhalten Sie Ihr Testergebnis online unter www.vaterschaftstest-resultan.de. Zugangsdaten siehe Codekarte. Adresse für das schriftliche Testergebnis auf dem Identitätsnachweisformular angeben.

RECHTSHINWEISE

Laut Gendiagnostikgesetz und weiterführender Richtlinien ist für jeden Vaterschaftstest das schriftliche Einverständnis aller Testpersonen bzw. der gesetzlichen Vertreter (Vater und Mutter) mit Identitätssicherung notwendig. Auch bei der Analyse von „nur“ Vater und Kind, muss die Mutter Ihr Einverständnis für das beispielsweise minderjährige Kind geben.

Durch die Regelung in § 1598a BGB wird das Recht auf einen Vaterschaftstest gewährleistet. Beide Elternteile und auch das Kind haben ein gegenseitiges Recht auf den Vaterschaftstest. Damit kann die Einwilligung und Duldung sowohl beider Eltern, als auch des Kindes zur Abstammungsuntersuchung gerichtlich erzwungen werden.