

Gebrauchsanweisung

OCUsalin® 5% OSD

Augentropfen mit Natriumchlorid 5%

BESCHREIBUNG

OCUsalin® 5% OSD ist eine sterile, hypertone, konservierungsmittelfreie ophthalmische Kochsalzlösung, abgefüllt in Flaschen.

OCUsalin® 5% OSD wird angewendet zur Behandlung von Hornhautödemen und entzieht durch seine physikalisch-osmotischen Eigenschaften die überschüssige Flüssigkeit und verbessert somit das Sehvermögen.

OCUsalin® 5% OSD findet vor allem Anwendung nach Augenoperationen (z. B. Kataraktoperationen) und diagnostischen Eingriffen am Auge (z. B. Gonioskopie) durch die das osmotische Gleichgewicht des Hornhautgewebes gestört wurde.

ANWENDUNG

Zum Öffnen der Flasche entfernen Sie den Sicherheitsring durch Ziehen an der vorgefertigten Lasche, bis dieser komplett entfernt ist (1 + 2). Danach heben Sie die Kappe durch Ziehen nach oben ab (3).

Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab. Halten Sie die Flasche mit der Tropföffnung nach unten und geben Sie 3-5mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges (4). Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.

Vermeiden Sie jegliche Berührung der Tropföffnung mit dem Auge oder den Händen. Ein sich eventuell an der Tropföffnung noch befindlicher Tropfen sollte durch leichtes Klopfen auf den Flaschenboden entfernt werden. Setzen Sie nun die Kappe durch leichten Druck wieder auf die Flasche auf. Die Anwendungsdauer sowie die Dosierung sollten Sie mit Ihrem Augenarzt absprechen.



ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumchlorid 5 %, Wasser für Injektionszwecke.

PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: 1 x 10 ml


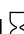
VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Bitte verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht ohne ärztliche Empfehlung!
- Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.


- Mit der Tropföffnung der Flasche das Auge nicht berühren. Bei dieser Art von Hornhauterkrankungen sollte generell auf das Tragen von Kontaktlinsen verzichtet werden. Sollte das Tragen von Kontaktlinsen zwingend erforderlich sein, so müssen sie vor der Anwendung entfernt werden. Warten Sie nach der Anwendung mindestens 15 Minuten, bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Sollen andere Arzneimittel gleichzeitig mit OCUsalin® 5 % OSD am Auge angewendet werden, sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Augenarzt. Es sollte ein Abstand von mindestens 5 Minuten zwischen den beiden Anwendungen eingehalten werden.
- Es kann ein Brennen und/oder eine Irritation des betroffenen Auges auftreten.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett sowie der Faltschachtel eingeprägt.
- Nach dem ersten Öffnen des Fläschchens das Präparat nicht länger als 90 Tage anwenden.
- Aufgrund des speziellen innovativen Sterilfilter-Systems des Tropfeinsatzes bleibt stets eine geringe Menge in der Flasche zurück.

LAGERUNG

Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen. Verschließen Sie das Fläschchen nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe. Flasche vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.

 Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Etikett und der Faltschachtel eingeprägt.

 aseptische Herstellung.

 Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigelegte Gebrauchsanweisung.

 Lagerungstemperatur.

 Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.



Hersteller:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Deutschland

Vertrieb in Deutschland:
Pharma Stulln GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Deutschland

 0483

STAND DER INFORMATION: 02/2016



pharma **STULLN**