

# FRÜHTEST Schwangerschaftstest

Bereits 5 Tage vor der erwarteten Periode anwendbar!

Der Frühtest Schwangerschaftstest ist ein ultra-sensitiver Schwangerschaftstest, der einfach zu handhaben und abzulesen ist.

Bereits ca. 5 Tage vor der erwarteten Periode kann er zu jeder Tages- und Nachtzeit angewendet werden. Eine Anwendung mit dem ersten Morgenurin wird jedoch empfohlen.

Der Frühtest Schwangerschaftstest kann hCG im Urin bei einer Konzentration größer als oder gleich 10 mIU/ml nachweisen.

Wie schnell kann ich den Test machen, wenn ich vermute, dass ich schwanger bin?

Sie können Ihren Urin bereits früher als am ersten Tag Ihrer ausbleibenden Periode testen.

Muss ich den Test mit dem ersten Morgenurin durchführen?

Sie können den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Allerdings ist Ihr erster Morgenurin in der Regel der am stärksten konzentrierte des Tages und enthält das meiste HCG.

Wie weiß ich, dass der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde?

Das Erscheinen einer farbigen Linie in der Kontrollregion (C) zeigt Ihnen, dass Sie das Testverfahren richtig durchgeführt haben und die richtige Menge Urin aufgenommen wurde.

Können Testergebnisse später als innerhalb der fünf Minuten interpretiert werden?

Nein. Die Testergebnisse müssen innerhalb von 5 Minuten abgelesen werden. Ein positives Ergebnis sollte sich mehrere Tage lang nicht ändern, ein negatives Ergebnis kann jedoch innerhalb weniger Minuten nach Ende des Testzeitraums in ein falsches positives umschlagen, was keiner genauen Messung entspricht.

Pharmazentralnummer: 10043884

Pharma Peter GmbH, 22419 Hamburg