

# AUGENLIDSCHAUM. ZUM ENTFERNEN VON AUGENSEKRETEN.

**Nur zur äußerlichen Anwendung.**

## ZUSAMMENSETZUNG

Teebaumöl (Melaleuca alternifolia), Kamillenöl (Anthemis Nobilis), D-Panthenol, Allantoin, Taurin und gereinigtes Wasser.

## BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSGEBIETE

Wenn Sie trockene, juckende oder gereizte Augen haben, liegt das Problem vielleicht nicht an den Augen, sondern den Augenlidern. Die tägliche Hygiene der Augenlider und Wimpern mit **NAVIBLEF® DAILY CARE** bietet viele Vorteile einschließlich der Verringerung dieser Symptome.

**NAVIBLEF® DAILY CARE** entfernt wirksam überschüssigen Talg, Pollen und andere Verunreinigungen von den Augenlidern, die das Risiko einer Reizung, einer Blepharitis, verursacht durch Demodex (Augenlidmilben) und einem Bakterienbefall oder von Symptomen eines Trockenen Auges erhöhen.

**NAVIBLEF® DAILY CARE** wird als weiterführende Pflege für Patienten empfohlen, die sich einer Behandlung gegen Blepharitis mit **NAVIBLEF® INTENSIVE CARE** unterzogen haben.

## VERPACKUNG

Pumpflasche mit 50 ml. **REF** F50ND121

Pumpflasche mit 5 ml. **REF** F5ND120

## EIGENSCHAFTEN

**NAVIBLEF® DAILY CARE** ist eine fettfreie und nicht reizende Formulierung für die topische Anwendung.

## WAS IST BLEPHARITIS?

Die Blepharitis ist eine chronische Entzündung der Augenlider und eine der häufigsten Erkrankungen des Auges. Sie ist oft die Hauptursache für Augenbeschwerden, Rötung und tränende Augen.

Weitere Symptome der Blepharitis sind Brennen, Jucken, Lichtempfindlichkeit und Reizung sowie ein sandiges und griesbiges Gefühl im Auge, insbesondere beim Aufwachen.

## WAS IST DAS TROCKENE AUGE?

Das Trockene Auge ist eine Störung des Tränenfilms aufgrund einer mangelnden Produktion von Tränenflüssigkeit oder der übermäßigen Verdampfung der Tränenflüssigkeit, die Schäden an der Hornhaut und Augenoberfläche verursachen kann.

## BEI AUGENOPERATION

Vor oder nach einem operativen Augeneingriff besteht das Risiko von Infektionen auf den Lidern und Wimpern. Daher ist es wichtig, die Empfehlungen Ihres Augenarztes in Bezug auf Hygiene und Pflege zu befolgen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG



1 - Vor dem Auftragen des Schaums die Hände waschen und dann die Fingerspitzen mit **NAVIBLEF® DAILY CARE** reinigen.

2 - Den Pumpspender drücken und den Schaum auf die sauberen Fingerspitzen geben. Bei der Anwendung vor oder nach einer Operation empfiehlt es sich, den Schaum auf sterile Gaze zu geben.

3 - Die Augen schließen und Augenlid und Wimpern mit **NAVIBLEF® DAILY CARE** massieren. Während der Anwendung die Augen nicht berühren oder öffnen. Den Schaum für ungefähr 60 bis 80 Sekunden einwirken lassen.

4 - Nach jeder Anwendung die Wimpern und Augenlider mit warmem Wasser abspülen.

**Hinweis: Dieselbe Vorgehensweise für das andere Auge wiederholen.**


Diese Behandlung zwei- bis dreimal täglich für die Langzeitpflege und Hygiene von Augenlidern und Wimpern wiederholen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor und nach der Anwendung immer die Hände waschen.
- Vor dem Auftragen des Schaums die Kontaktlinsen entfernen. Vor dem erneuten Einsetzen der Kontaktlinsen sicherstellen, dass der gesamte Schaum und Rückstände entfernt wurden.
- Während der Anwendung die Augen geschlossen halten.
- Das Produkt ist für die Anwendung auf Augenlidern und Wimpern bestimmt. **Nicht direkt in die Augen geben.**
- **Nur zur äußerlichen Anwendung.**
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.
- Während des Anwendungszeitraums hypoallergenes Augen-Make-up und Lotionen für empfindliche Haut rund um die Augen verwenden.
- Nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Produkts anwenden.
- Beim Auftreten von Reizungen die Behandlung sofort beenden, die Augen mit Wasser spülen und bei anhaltender Reizung Kontakt mit dem Augenarzt aufnehmen.
- Verbleibende Lösung innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Öffnen verwerfen.
- **Nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden.**

## LAGERUNG

- Das Produkt in einem trockenen Raum zwischen 5°C und 35°C aufbewahren.

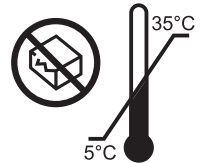

Vertrieb für Deutschland:  
VISUfarma International,  
2405, route Des Dolines - Drakkar D,  
06560 Valbonne, FRANKREICH

**VISUfarma**

**NOVAX® PHARMA**  
Le Coronado  
20, Av. de Fontvieille  
MC 98000 MONACO



V1 - Rev. 25-03-2016

DE

**DARREICHUNGSFORMEN: NAVIBLEF® gibt es in zwei Formulierungen:**

- **NAVIBLEF® INTENSIVE CARE** für die Entfernung starker Verunreinigungen und Sekrete aufgrund von durch Bakterien und Demodex verursachten Infektionen (rote Verpackung).
- **NAVIBLEF® DAILY CARE** für die langfristige tägliche Hygiene und Vorbeugung vor Verunreinigungen und Sekreten aufgrund von durch Bakterien und Demodex verursachten Infektionen (blaue Verpackung).