



# COMPRESSANA CALYPSO 70

ca. 12 – 14 mmHg **Stützklasse II** **medium 70 den**

Die unwiderstehliche Synthese aus Wirkung und modischem Chic. Luftig und transparent wie Feinstrümpfe, bietet CALYPSO 70 höchsten Tragekomfort und beste Verarbeitung. Das vielfältige und umfassende Sortiment lässt bestimmt keine Wünsche offen.

- **passgenaue anatomische Form**
- **weich, hautsympathisch und transparent (appearance 20 den)**
- **unsichtbar eingestrickte Ferse und Spitze**



Produkt	Größe	Farbe							
Strumpfhose mit Komfort-Hosenteil	<b>I-VI</b> XS-XXL	sandel	silk	sepia	perle	romance	nachtblau	schwarz	
Strumpfhose extraweit / Umstands-Strumpfhose	<b>II-VI</b> S-XXL		silk	<b>TIPP für Schwangere</b>		romance	nachtblau	schwarz	
„Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos	<b>I-V</b> XS-XL	sandel	silk	sepia	perle	romance	nachtblau	schwarz	
Schenkelstrümpfe zur Strapsbefestigung	<b>I-V</b> XS-XL		silk		perle	romance			
Kniestrümpfe mit Softbündchen*	<b>I-VI</b> XS-XXL	sandel	silk	sepia	perle	romance	nachtblau	schwarz	

## Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

- **Vor dem Tragen waschen • auf links waschen**
- **keine Weichspüler verwenden**

## Größenübersicht Calypso 70

Gr.	Konfektion		Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp
<b>I</b>	XS	34–36	36–38	ca. 43–52	schmal – klein
<b>II</b>	S	36–38	37–39	ca. 50–60	schmal – normal
<b>III</b>	M	40–42	39–40	ca. 57–66	normal
<b>IV</b>	L	42–44	40–42	ca. 63–75	normal – groß
<b>V</b>	XL	44–46	41–43	ca. 73–90	kräftig – normal
<b>VI</b>	XXL	48–50/52	41–43	> 80	extra

