

Natürliches Ohrenspray aus pflanzlichen Inhaltsstoffen zur Reinigung des Ohrkanals Das Otosan® Ohrenspray für eine schonende und natürliche Ohrenhygiene. Otosan® Ohrenspray mit Biopflanzenextrakten unterstützt die Entfernung von Ohrenschmalz. Zum Einsatz bei übermäßigem Ohrenschmalz. Auf Basis einer isotonischen Kochsalzlösung wurde das Ohrenspray mit Teebaumöl, welches hygienisierende Eigenschaften besitzt, angereichert. Für eine tägliche, schonende Ohrenhygiene. Ohrenschmalz hat eine wichtige Funktion. Es schützt den Gehörgang und verhindert das Eindringen von Krankheitserregern. Auch wenn Ohrenschmalz wichtig ist, zu viel davon kann das Hörvermögen beeinflussen, Beschwerden hervorrufen und ungepflegt wirken. Deshalb nutzt die Mehrheit der Bevölkerung Wattestäbchen. Doch diese bergen ein nicht zu unterschätzendes Risiko, das auch Verletzungen des Gehörgangs oder Trommelfells zur Folge haben kann: Das Ohrenschmalz wird durch die Stäbchen nicht herausbefördert, sondern nach innen gedrückt. Es entsteht ein Ohrenpfropf. Zu den häufigsten Beschwerden daraus zählen: Beeinträchtigung des Hörvermögens, Ohrensausen, Pfeifen, Tinnitus, Schmerzen sowie Schwindelgefühl. Otosan® hat ein schonendes Ohrenspray auf natürlicher Basis entwickelt. Es kann für die tägliche Ohrenhygiene eingesetzt werden. Otosan® Ohrenspray hilft beim Austritt von übermäßigem Ohrenschmalz. Bei regelmäßiger Benutzung beugt es dessen Bildung vor. Auf Basis einer isotonischen Kochsalzlösung wurde das Ohrenspray mit Teebaumöl, welches hygienisierende Eigenschaften besitzt, angereichert. Otosan® Ohrenspray enthält keine Farbstoffe. Otosan® Ohrenspray eignet sich für die tägliche Anwendung bei: übermäßigem Ohrenschmalz Die Vorteile des natürlichen Ohrensprays im Überblick: Mit Biopflanzenextrakten (Aloe, Mallow, Marigold, Chamomile, Lemon) Ökologisches Ohrenspray ohne Treibgas Ohne Farbstoffe Vegan Inhalt: 50ml Otosan® Ohrenspray ist ein Medizinprodukt.

Die richtige Anwendung des natürlichen Ohrensprays

1. Den Kopf aufrecht und gerade halten, das Otosan® Spray an das Ohr legen und darauf achten, dass der Rand des Sprühkopfes genau am Gehörgang ansetzt. Das Spray senkrecht halten und ein paar Mal den sprühen.
2. Einige Minuten warten, damit das Otosan® Spray seine Wirkung entfalten kann. Anschließend den Kopf zur Seite neigen, sodass das behandelte Ohr nach unten zeigt und die Flüssigkeit und der Schmutz herausfließen können.
3. Die Behandlung am anderen Ohr wiederholen. Den Sprühkopf nach jeder Benutzung mit warmem Wasser abspülen. Otosan® Spray dient nicht nur zur Entfernung von Ohrenschmalzpfropfen, sondern auch zu deren Vorbeugung sowie zur Pflege der Ohren. Eine tägliche Anwendung von Otosan® Spray ist empfehlenswert. »