

MediGel Wundbehandlungs-Set

- Beeinhaltet Wundreinigungsspray (50 ml), Wundgel (20 g) & Pflastermäppchen (1)
- Zum Reinigen und Heilen von Alltagswunden
- Die praktische & hochwertige Zippertasche ist ideal für unterwegs oder zuhause

Das MediGel-Wundkonzept – Jetzt neu als Wundbehandlungs-Set!

Alles was Sie für eine zuverlässige und schnelle Wundversorgung benötigen, bekommen Sie nun in dem Wundbehandlungs-Set von MediGel. Die Schürfwunde am Knie, der Schnitt in den Finger – Nur eine Unachtsamkeit und wir haben uns eine Verletzung zugezogen. Alltagswunden gehören einfach dazu und sollten allzeit fachgerecht versorgt werden, um Infektionen vorzubeugen und einen optimalen Heilungserfolg zu erzielen. Gut, wenn man dafür auf drei optimal aufeinander abgestimmte Produkte für die ganze Familie vertrauen kann, um eine schnelle und effektive Heilung für alle Wunden garantieren kann.

MediGel Wundreinigungsspray

- Reduziert das Infektionsrisiko
- Schmerzfremde Anwendung – ohne Brennen
- Besonders hautfreundlich
- Farblos
- 360° Sprühkopf

MediGel Schnelle Wundheilung

- Verkürzt die Heilungsdauer
- Vermindert das Narbenrisiko und reduziert die Narbenbildung
- Ohne Kruste. Ohne Spannungsschmerz.
- Kühleffekt

Pflastermäppchen

- 6 Pflaster in einer praktischen Mappe
- Unterschiedliche Motive (Einhorn, Fußball, Seestern)

Anwendungshinweise

Ziel vom Wundbehandlungs-Set ist eine schmerzfreie Reinigung, die Wundheilung zu fördern und im Anschluss schützend abzudecken. Folgende 3 Schritte sind zu empfehlen:

1. Im ersten Schritt sollte die Wunde immer möglichst gründlich und zugleich verträglich gereinigt werden. MediGel Wundreinigungsspray enthält ein besonders hautverträgliches Tensid, welches Mikroorganismen, Schmutz und abgestorbene Hautzellen effektiv aus der Wunde löst, sodass diese ganz einfach mit der Lösung ausgespült werden können. Das Infektionsrisiko wird dadurch deutlich reduziert. Und ganz wichtig: Ohne Brennen!

2. Im zweiten Schritt ist es wichtig die Wunde optimal feucht zu halten, sodass sich keine harte Kruste ausbilden kann. Dazu empfiehlt es sich ein spezielles Lipogel wie MediGel Schnelle Wundheilung aufzutragen. Dank seiner speziellen Zink-Eisen-Formel erzeugt es ein pH-Wert-optimiertes feuchtes Wundmilieu, in dem neue Gewebezellen schnell gebildet werden und sich auf direktem Wege vernetzen können. Ihr Vorteil: Die Wunde heilt schnell und bei deutlich verringerten Narbenrisiko ab.

3. Nun noch die Wunde mit einem Pflaster abdecken. Fertig! Das Pflaster schützt die Wunde vor äußerlichen Einflüssen und sorgt dafür, dass immer genügend Wundgel auf der Wunde verbleibt.

MediGel Wundreinigungsspray ist eine alkoholfreie Lösung zur Reinigung und Befeuchtung von Wunden.

Die physikalischen Eigenschaften von MediGel Wundreinigungsspray dienen:

der Vorbeugung von Infektionen

der Optimierung des Wundmilieus

dem schmerzfreien Aufsprühen

der Kühlung

Tipps zur Anwendung von MediGel Wundreinigungsspray

MediGel Wundreinigungsspray kann unmittelbar nach der Verletzung auf die Wunde gesprüht werden. Anschließend sollte MediGel® Wundreinigungsspray

mittels handelsüblicher steriler Mullkompressen wischend entfernt werden. Ein Nachspülen ist nicht erforderlich.

Gut zu wissen: MediGel Wundreinigungsspray kann auch beim Verbandwechsel zum Lösen anhaftender Verbandstoffe oder Verkrustungen verwendet werden.

MediGel Schnelle Wundheilung eignet sich bei akuten, trockenen und mäßig nässenden Wunden. Dazu zählen unter anderem:

Schürfwunden

Schnittwunden

Kratzwunden

Platzwunden

Risswunden

Bisswunden (Wichtig: Suchen Sie aufgrund der hohen Infektionsgefahr bei Bisswunden zur Erstbehandlung immer einen Arzt auf.)

Auch bei chronischen Wunden (Dekubitus 2. Grades, Ulcus cruris venosum; nur unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal) kann das hydroaktive Lipogel eingesetzt werden.

Bei den genannten Anwendungsgebieten entfaltet MediGel Schnelle Wundheilung seine umfassende Wirkung:

Förderung der Wundheilung

Wiederherstellung eines geeigneten Mikroklimas in der Wunde

Verringerung der Infektionsgefahr

Verringerung der Narbenbildung

Rasche Schmerzlinderung und Kühlung

Reduktion der Schwellung

Darüber hinaus unterstützen natürliche pflegende Öle und Vitamin E die Regeneration der geschädigten Haut.

Tipps zur Anwendung von MediGel Schnelle Wundheilung

Waschen Sie sich vor und nach der Behandlung einer Wunde die Hände. Vor Behandlung mit MediGel Schnelle Wundheilung sollte die Wunde sorgfältig gereinigt werden. Tragen Sie eine etwa 2 mm dicke Schicht auf die gereinigte Wunde und über die Wundränder hinaus auf (die Wunde heilt von außen nach innen ab). In den ersten Tagen der Verletzung sollte MediGel Schnelle Wundheilung mehrmals täglich angewendet werden.

Gut zu wissen: Die Anwendung kann in jeder Phase der Wundheilung erfolgen – bis zur vollständigen Abheilung.